



Família de eletrocardiógrafos FÁCIL

Modelo:

ECGV6

Manual de Utilização

HW Sistemas – HeartWare Ltda.

Revisão 1.8



Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzido de forma alguma, incluindo fotocópia, ou utilizado para algum outro propósito, ou distribuído avulsamente, sem a permissão por escrito da HW Sistemas - HeartWare Ltda. Qualquer reprodução autorizada de alguma parte deste documento deverá ser citada a fonte.

PREFÁCIO

Congratulações!

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade da HeartWare – Sistemas para Cardiologia

Pioneira em sistemas computadorizados para cardiologia, atuando no mercado desde 1992, a HeartWare se empenha na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias visando o constante aprimoramento dos recursos diagnósticos à disposição de seus clientes.

Como exemplo desta política, nos orgulhamos de termos sido os primeiros a desenvolver sistemas em 12 derivações simultâneas em 1992 e, em 1997, também fomos pioneiros ao colocar à disposição de nossos clientes os primeiros sistemas desenvolvidos no país especificamente para ambientes Windows.

Toda a experiência acumulada nestes anos nos permite oferecer os melhores, mais práticos e completos sistemas do mercado para Eletrocardiografia, Ergometria e Ergoespirometria.

Leia com muita atenção o conteúdo deste manual antes de operar o produto. Este manual contém todas as informações necessárias para você usufruir de todos os recursos disponíveis neste moderno equipamento. Mantenha este manual sempre a sua disposição.

Agradecemos a sua escolha pela HeartWare.

Equipe HW Sistemas.

1. Dados da empresa.....	1
2. Convenções.....	2
3. Glossário.....	4
4. Descrição detalhada do produto.....	5
4.1. Princípio básico de funcionamento.....	5
4.2. O Eletrocardiograma (ECG).....	5
4.3. Indicação, finalidade e uso do produto.....	6
5. Especificações técnicas e Características.....	7
5.1. Fabricante:.....	7
5.2. Equipamento:.....	7
5.3. Classificação:.....	7
5.4. Composição:.....	7
5.5. Características físicas do eletrocardiógrafo FÁCIL:.....	7
5.6. Fonte de alimentação:.....	8
5.7. Descrição técnica e características do equipamento:.....	8
5.8. Especificações técnicas do cabo de paciente:.....	8
5.9. Saídas:.....	8
5.10. Condições de ambientais de operação:.....	9
5.11. Condições de ambientais de armazenamento:.....	9
5.12. Esquemas de circuitos, listas de peças, componentes e outros.....	9
6. Embalagem.....	10
6.1. Características da embalagem.....	10
6.2. Rotulagem da embalagem.....	11
6.3. Conteúdo da embalagem.....	12
6.3.1. Composição do sistema ECGV6.....	12
7. Identificação das partes.....	13
7.1. Eletrocardiógrafos <i>Fácil</i>	13
7.1.1. Etiqueta indelével.....	14
7.2. Cabo de conexão HW-USB.....	15
7.3. Cabo de paciente de 10 vias (DB15).....	15
7.4. Mídia de instalação dos programas.....	16
7.5. Documentação.....	17
8. Advertências, Precauções e Outros Cuidados.....	18
8.1. Advertências.....	18
8.2. Precauções.....	22
8.3. Limpeza.....	24
8.4. Conservação e armazenamento.....	24
8.5. Manutenção.....	26
8.5.1. Manutenção periódica.....	26
8.5.2. Manutenção corretiva.....	26

8.6. Descarte.....	27
8.7. Preparação do paciente.....	27
8.8. Posicionamento dos eletrodos.....	29
8.8.1. Montagem dos eletrodos em ECG de repouso ou convencional.....	30
9. Instalação.....	31
9.1. Pré-requisitos da instalação.....	31
9.1.1. Pré-requisitos do sistema elétrico.....	31
9.1.2. Pré-requisitos do computador.....	31
9.2. Instalando o equipamento.....	32
9.2.1. Instalação do software.....	32
9.3. Treinamento.....	33
9.4. Desinstalação do programa.....	33
10. Noções básicas do programa.....	34
10.1. A <i>Tela inicial</i>	34
10.2. A janela <i>Novo Exame</i>	36
10.3. A janela <i>Dados do Paciente</i>	38
10.4. A janela de <i>Dados da Anamnese</i>	39
10.5. As telas de monitoração de sinais.....	40
10.5.1. Botões comuns em todos os tipos de exames.....	42
10.5.2. Outras funções na tela de monitoração.....	43
10.6. A tela de <i>Visualização de Traçados</i>	44
10.7. Janela <i>Edição das Conclusões Finais</i> do laudo.....	46
10.8. Zoom de Sinal.....	47
11. Cadastros e Configurações gerais.....	48
11.1. Cadastros de Médicos Responsáveis e de Médicos Solicitantes.....	48
11.2. Cadastro de Profissões.....	49
11.3. Cadastro de convênios.....	51
11.4. Cadastro de itens da Anamnese.....	52
11.5. Cor da pele.....	53
11.6. Manobras.....	53
11.7. Cadastro de Frases pré-programadas.....	54
11.8. Impressão.....	56
12. Configurando o ECGV6.....	57
12.1. Guia <i>Impressão</i>	57
12.2. Guia <i>Geral</i>	59
12.3. Guia <i>Registro de ECG</i>	60
12.4. Guia <i>Valores</i>	62
12.5. Guia <i>Periféricos</i>	63
12.6. Guia <i>Derivações</i>	64
12.7. Guia <i>Internet</i>	65
12.8. Guia <i>Aparência</i>	66
12.9. Salvar Perfil.....	66
13. Iniciando um Novo Eletrocardiograma.....	67
13.1. Cadastrando o paciente.....	67
13.2. Preenchendo a Anamnese.....	67
13.3. Monitorando e registrando os sinais.....	68
13.4. Visualizando os registros.....	70

13.5. Editando as conclusões finais do laudo.....	70
14. Manipulação de Pacientes e Exames.....	72
14.1. Abrindo exames.....	72
14.2. Apagando exames.....	73
14.3. Apagando pacientes.....	74
14.4. Movendo exames.....	75
14.5. Imprimindo exames já realizados.....	78
14.6. Exportando exames.....	78
14.7. Intercâmbio de exames.....	79
14.7.1. Enviando exames para Caixa de Saída.....	79
14.7.2. Recebendo exames na Caixa de Entrada.....	81
15. Recursos Adicionais.....	84
15.1. Módulo de Medidas.....	84
15.1.1. Complexo Médio <i>versus</i> Complexo Representativo.....	84
15.1.2. Convenções adotadas.....	87
15.1.3. Medições no complexo representativo.....	89
15.2. Relatórios administrativos.....	94
15.2.1. Relatório comparativo breve.....	94
15.2.2. Relatório comparativo extenso.....	94
15.2.3. Relatório de exames por convênio.....	95
15.2.4. Relatório comparativo por médico responsável.....	95
15.2.5. Relatório comparativo por médico solicitante.....	95
15.3. Inserindo frases pré-programadas.....	95
15.4. Registro contínuo de ECG.....	97
15.5. Carteira de ECG.....	100
15.6. Recursos avançados na edição das conclusões finais do laudo.....	101
15.7. Exportação para arquivo de imagem.....	104
16. Solução de problemas.....	105
16.1. O eletrocardiograma não liga.....	105
16.2. Problemas de comunicação do eletrocardiograma.....	105
16.2.1. Erro na detecção do pré-amplificador na entrada do programa.....	105
16.3. Problemas de instalação.....	106
16.4. Problemas nos sinais de ECG.....	107
16.4.1. Sinais “grossos” ou ilegíveis.....	107
16.4.2. Sinais com ruídos ou espículas.....	107
16.4.3. Inversão de polaridade do complexo QRS.....	108
16.4.4. Sinais com grande variação na linha de base.....	108
16.4.5. Discrepância no cálculo da frequência cardíaca.....	108
16.5. Problemas de impressão.....	109
16.5.1. Impressora não imprime automaticamente.....	109
16.5.2. Impressão lenta ou demorada.....	109
16.5.3. Impressão clara nos traçados e/ou no milimetrado.....	109
16.6. Problemas relativos ao exame de esforço.....	110
16.6.1. O programa não realiza o pré-esforço e/ou recuperação.....	110
16.6.2. Discrepância na frequência cardíaca máxima atingida.....	110
17. Rede de Assistência Técnica.....	111
18. Garantia.....	112
19. Compatibilidade Eletromagnética.....	113
19.1. Tabela 201.....	113

19.2. Tabela 202.....	114
19.3. Tabela 204.....	115
19.4. Tabela 206.....	116
20. Anexos.....	117
20.1. Impressão de registros.....	117
20.1.1. Registro padrão.....	117
20.1.2. Registro com médias, longa e comentário.....	118
20.1.3. Registro com longa e comentários.....	119
20.2. Impressão de registro contínuo.....	120
20.2.1. Registro longo – 2.5 mm/mV – 1 página.....	120
20.2.2. Registro longo – 10 mm/mV – 2 páginas.....	121
20.3. Impressão de registro com 1, 3 ou 6 derivações.....	122
20.3.1. Registro longo de 1 derivação.....	122
20.3.2. Registro longo – 2.5 mm/mV – 1 derivação.....	123
20.3.3. Registro longo – 2.5 mm/mV – 3 derivações.....	124
20.3.4. Registro longo – 2.5 mm/mV – 6 derivações.....	125
20.3.5. Registro longo – 10 mm/mV – 3 derivações.....	126
20.4. Impressão de registro em cores.....	127
20.5. Impressão do Módulo de medidas.....	128
20.5.1. Módulo de medidas no exame de repouso (ECG).....	128
20.6. Impressão da Carteira de ECG.....	129
20.7. Impressão da Anamnese.....	130
20.8. Impressão das Conclusões Finais do Laudo.....	131
20.9. Impressão dos Relatórios Administrativos.....	132
20.9.1. Relatório Comparativo Breve.....	132
20.9.2. Relatório Comparativo Extenso.....	133
20.9.3. Relatório por Exames de Convênio.....	134
20.9.4. Relatório Comparativo por Médico Responsável.....	135
20.9.5. Relatório Comparativo por Médico Solicitante.....	136
20.10. Cópia de segurança da base de dados.....	137
20.11. Outros modos de funcionamento do programa.....	137
21. Anotações.....	138

1. DADOS DA EMPRESA

Fabricado, Comercializado e Distribuído no Brasil por:

HW Sistemas - HeartWare Ltda.

CNPJ: 41.847.112/0001-60

Responsável Legal e Técnico: Eng. Eletricista Robson Portugal Starling – CREA/MG: 51924 / D

Empresa autorizada AFE: M062H3X40X2H (ANVISA/MS)

Registro do produto ANVISA / MS: 80398450002

Endereço:

Av. Alphonsus de Guimarães, 115

Bairro Santa Efigênia

Belo Horizonte - MG

CEP: 30270-020

Contactando a HW Sistemas:

Telefone: (31) 3461-7226

(31) 99711-7226

Atendimento: atendimento@hw.ind.br

Central de Vendas: vendas@hw.ind.br

Suporte Técnico: suporte@hw.ind.br

Assistência Técnica: at@hw.ind.br

Site: www.hw.ind.br

2. CONVENÇÕES

Todas as informações deste produto estão descritas neste **Manual do Usuário**. Leia-o integralmente antes de manusear este produto. Para a compreensão na leitura deste texto, da embalagem e também do produto, veja a simbologia adotada a seguir. Em caso de dúvida, procure o representante mais próximo na Rede de Assistência Técnica (página 111) ou o Suporte Técnico (página 1).



Este símbolo indica **ATENÇÃO**. Leia atentamente as informações contidas nesta caixa pois são de fundamental importância.



Este símbolo indica **IMPORTANTE**. As informações contidas nesta caixa servem para destacar alguma informação importante.



Este símbolo indica **NOTA**. As informações contidas nesta caixa apenas complementam o assunto do texto.



Indica *Equipamento de Classe II*
(afixado externamente na embalagem e no equipamento)

IPX0

Indica *Equipamento sem proteção contra penetração de líquidos*
(afixado externamente na embalagem e no equipamento)



Indica *Atenção! Consultar Documentos Acompanhantes*
(afixado externamente na embalagem e no equipamento)



Indica *Equipamento com Parte Aplicada do Tipo BF, à prova de desfibrilador*
(afixado externamente na embalagem e no equipamento)



Indica *Posicionamento correto: Este lado para cima*
(afixado externamente na embalagem)

Indica *Equipamento frágil. Cuidado no Transporte!*



(afixado externamente na embalagem)



Indica *Não tolera água. Mantenha longe da chuva!*
(afixado externamente na embalagem)



Indica *Empilhamento máximo de 5 embalagens idênticas*
(afixado externamente na embalagem)



Indica *Limites de temperatura de armazenamento e de transporte: entre 10 e 50°C*
(afixado externamente na embalagem)



Indica sensibilidade a descargas eletrostáticas.



Indica equipamento emissor de RF.

3. GLOSSÁRIO

Computador: é o equipamento composto por processador, memórias permanente (disco) e volátil, vídeo monitor, teclado, mouse e impressora. Também pode conter outras partes em sua composição.

Sistema Operacional: conjunto de programas aplicativos, processos e serviços que possibilitam a utilização do computador. Por exemplo, *Microsoft Windows XP*.

Programa: é a parte não física deste produto, que funciona no computador.

Equipamento: refere-se ao conjunto físico que compõe este produto, excluindo-se o programa do computador.

Pré-amplificador: é o eletrocardiógrafo, parte deste produto, sendo essencial para aquisição dos sinais de ECG.

Periférico: é o equipamento médico, não produzido pela HeartWare, que interage com este produto.

Sistema: refere-se ao conjunto instalado – o equipamento e o programa deste produto, os periféricos (quando presentes), o computador, o sistema operacional;

Área de trabalho: é o ambiente de fundo do sistema operacional Windows.

ABREVIATURAS:

ECG = eletrocardiograma

TE = teste ergométrico

TCPE = teste cardiopulmonar de esforço

CPU = *central processing unit* (unidade central de processamento) ou processador

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO

4.1. PRINCÍPIO BÁSICO DE FUNCIONAMENTO

Em linhas gerais, os equipamentos que compõem a família FÁCIL são eletrocardiógrafos digitais, microcontrolados, que captam os sinais eletrocardiográficos do paciente em 13 derivações simultâneas, fazem a conversão dos sinais de Analógico para Digital (conversão A/D) e enviam estas informações para um programa no microcomputador através de comunicação padrão USB.

4.2. O ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

A captação do ECG baseia-se no fato de que toda atividade muscular está associada a uma perturbação elétrica. Se colocarmos eletrodos na pele do paciente, esta atividade elétrica, dependendo de sua amplitude, pode ser captada. O mesmo princípio vale para os músculos cardíacos e seus movimentos de contração (sístole) e relaxamento (diástole). Com o paciente em repouso, com seus músculos torácicos e de membros relaxados, a maior atividade elétrica captada por eletrodos posicionados na pele de seu tórax e membros é causada pela atividade muscular do coração. Através de circuitos eletrônicos, estes sinais podem ser amplificados e registrados, fornecendo, assim, uma visão do coração do ponto de vista elétrico. A este registro chamamos Eletrocardiograma (ou ECG). O equipamento responsável por captar, amplificar e registrar o ECG é chamado de Eletrocardiógrafo.

Nesta família de produtos os equipamentos destinados ao registro do ECG com o paciente em repouso são o **ECG V6** e o **ECG V7**.

Existem padrões de normalidade de morfologia e ritmo para o ECG, a partir dos quais várias patologias cardíacas podem ser diagnosticadas. Para que se possa comparar e analisar os resultados dos registros de ECG, os eletrodos devem ser posicionados na pele do paciente de maneira padronizada. Assim, pode-se combinar eletricamente os sinais captados por estes eletrodos para se registrar o sinal cardíaco de diferentes “ângulos”, podendo-se assim avaliar todas as áreas do coração do ponto de vista de sua atividade elétrica. Cada combinação de eletrodos é chamada “derivação” e possui padrões eletrocardiográficos próprios. A partir do final da década de 1960, com o advento da eletrônica digital e dos microprocessadores, surgiram os eletrocardiógrafos digitais que deram mais flexibilidade ao registro das derivações, especialmente ao permitir o registro simultâneo de várias derivações. Com a popularização dos microcomputadores, programas de computador foram introduzidos no processamento rotineiro dos ECGs captados pelos eletrocardiógrafos digitais, ampliando a funcionalidade destes equipamentos e introduzindo novas funções como a impressão dos registros eletrocardiográficos em papel comum, através de impressoras de uso geral; gravação dos sinais em padrões de armazenamento suportados por microcomputadores; visualização do ECG na tela; ferramentas de apoio ao diagnóstico através de medidas e análise de morfologia; arquivamento dos registros e laudos; filtragem dos sinais através de algoritmos matemáticos, etc.

4. Descrição detalhada do produto

4.3. INDICAÇÃO, FINALIDADE E USO DO PRODUTO

O ECGV6 foi idealizado para a execução de eletrocardiogramas em 12 derivações simultâneas: D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS

5.1. FABRICANTE:

HW Sistemas – HeartWare Ltda.

5.2. EQUIPAMENTO:

Nome Técnico: Eletrocardiógrafo Digital Família Fácil;

Nome Comercial: ECGV6

5.3. CLASSIFICAÇÃO:

Quanto ao tipo de proteção elétrica: Equipamento de Classe II;

Quanto ao grau de proteção contra descarga elétrica (desfibrilador): Parte aplicada do Tipo BF, à prova de desfibrilador;

Quanto ao tipo de proteção contra penetração de líquidos: Equipamento do Tipo IPX0, sem proteção;

Quanto aos procedimentos de esterilização e/ou desinfecção: Não necessita. Apenas procedimentos de limpeza (consulte [Limpeza](#), página 24);

Quanto ao regime de operação: Operação em modo contínuo;

Outras limitações: equipamento inadequado ao uso em presença de mistura anestésica inflamável com o ar; equipamento inadequado para ambientes cirúrgicos; equipamento inadequado para aplicações cardíacas diretas.

Normas de segurança aplicáveis: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-1, NBR IEC 60601-2, NBR IEC 60601-2-25.

5.4. COMPOSIÇÃO:

Eletrocardiógrafo, cabo de comunicação USB, cabo de paciente 10 vias, acessórios de monitorização.

5.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ELETROCARDIOGRAFO FÁCIL:

Altura: 0,035 m;

Largura: 0,110 m;

Profundidade: 0,175 m;

Peso: 0,5 kg;

Volume: 0,00067375 m³.

5.6. FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

Alimentado diretamente pela porta USB do microcomputador, que deverá atender à norma IEC 60950;

5.7. DESCRIÇÃO TÉCNICA E CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO:

Faixa de passagem (banda passante): 0,05 a 150 Hz;

Faixa dinâmica (máxima excursão de sinal de entrada): 10 mV;

Número de bits de conversão: 12 bits;

Resolução digital: 2,44 μ V por bit;

Precisão (amplitude): $\pm 2,44 \mu$ V;

Taxa de aquisição: 600 amostras por segundo por canal;

Precisão (tempo): $\pm 1,6667$ ms;

Número de canais de entrada: 10;

Número de canais (derivações): Até 13 derivações simultâneas (a saber: D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 e CM5);

Processamento de sinais: analógico e digital (conversão analógica-digital);

Impedância de entrada: maior que 10 M Ω ;

Rejeição de modo comum: maior que 100 dB;

Polarização máxima (off-set): 1000 mV;

Isolamento elétrico na entrada de alimentação: conforme norma NBR IEC 60601-1.

Corrente de fuga: menor que 5 μ A;

Comunicação: adaptador próprio para portas USB

5.8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CABO DE PACIENTE:

Número de vias: 10 vias;

Impedância: 10 k Ω ;

Energia máxima admissível de descarga por desfibrilador: 400 J.

5.9. SAÍDAS:

Número de derivações: 12 derivações simultâneas (a saber: D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6);

Armazenamento de registros: feito automaticamente pelo programa de controle do sistema, que armazena digitalmente todos os dados associados a um exame numa base de dados num disco rígido;

Meio de apresentação de resultados: no programa deste produto (na tela do computador – resolução mínima 1024x768 em 256 cores) ou na impressão (em papel comum);

Velocidades de monitoração: 25 ou 50 mm/s;

Escalas de amplitude: 5, 10 ou 20 mm/mV;

Filtros de sinais: Linha de base, musculares (suave, médio e forte), elétrico (60 Hz) e altas frequências (maior que 100 Hz);

Meio de controle: através do programa deste produto.

5.10. CONDIÇÕES DE AMBIENTAIS DE OPERAÇÃO:

Temperatura: entre 15 e 40°C;

Umidade relativa: entre 50 e 80 %;

5.11. CONDIÇÕES DE AMBIENTAIS DE ARMAZENAMENTO:

Temperatura: entre 10 e 50°C;

Umidade relativa: entre 20 e 85 %;

5.12. ESQUEMAS DE CIRCUITOS, LISTAS DE PEÇAS, COMPONENTES E OUTROS

A HeartWare mantém à disposição de seus usuários, mediante acordo particular com cláusula de confidencialidade, os esquemas de circuitos, listas de componentes, descrições detalhadas, instruções para calibração e aferição do equipamento e demais informações necessárias para que o pessoal técnico autorizado pelo usuário possa reparar as partes do equipamento definidas como reparáveis no referido contrato.

6. EMBALAGEM

6.1. CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

Dimensões:

Altura: 0,09 m;

Largura: 0,18 m;

Profundidade: 0,27 m;

Volume: 0,004374 m³.

Peso:

Da embalagem: 0,115 kg;

Com produto: 0,975 kg.



Visão frontal/lateral esquerda



Visão traseira/lateral direita



Caixa desmontada

- ❶ Etiqueta externa completa: conteúdo, manuseio, armazenamento, dados do fabricante, etc. (ver item 6.2 a seguir).
- ❷ Etiqueta externa com símbolos para manuseio e armazenamento (ver item 6.2 a seguir).

6.2. ROTULAGEM DA EMBALAGEM

Prazo de Validade: **INDETERMINADO**
Dimensões (LxAxP): **180x260x460 mm**
Peso: **2,0 kg**

VER INSTRUÇÕES DE USO INDÚSTRIA BRASILEIRA

Produto / Modelo: **Eletrocardiógrafo FÁCIL / ErgoMET13**
Registro ANVISA:
Número de Série:
Data de Fabricação:
Liberado por:

ATENÇÃO: Verifique o conteúdo da caixa antes de aceitar a encomenda

Conteúdo desta embalagem:

Descrição	Quantidade	Código
Eletrocardiógrafo FÁCIL / ErgoMET13	1	ELT.06
Cabo de conexão HW-USB	1	USB.01
Cabo de paciente para esforço, DB15, 11 vias	1	CBP.03
CD de instalação do programa e manual eletrônico ErgoMET13	1	CDI.06

HW Sistemas – HeartWare Ltda.
CNPJ: 41.847.112 / 0001-60 AFE: M062H3X40XZH
Av. Alphonsus de Guimarães, 115 Fone: (31) 3461-7226
Bairro Pompéia Fax: (31) 3482-8615
Belo Horizonte, MG Site: www.hw.ind.br
CEP: 30.270-020 Email: suporte@hw.ind.br
Responsável Técnico: Eng. Robson Portugal Starling
CREA-MG: 51924/D

Etiqueta externa completa: conteúdo, manuseio, armazenamento, dados do fabricante, etc. (1)



Etiqueta externa com símbolos para manuseio e armazenamento (2).



Veja o significado dos símbolos das figuras acima no capítulo *Convenções* (página 2).

6.3. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Segue a lista de itens enviados. Havendo alguma discrepância, procure o representante mais próximo na *Rede de Assistência Técnica* (página 111) ou diretamente através do *Atendimento* (página 1).

6.3.1. Composição do sistema ECGV6

Item	Descrição	Quantidade	Código
1	Eletrocardiógrafo ECGV6	1	ELT.04
2	Cabo de conexão HW-USB	1	USB.01
3	Cabo de paciente para repouso, DB15, 10 vias removíveis	1	CBP.01
4	Mídia de instalação do programa ECGV6	1	CDI.04
5	Manual do Usuário, Certificado de Garantia e Rede de Assistência Técnica Autorizada na mídia de instalação ou em www.hw.ind.br	1	DOC.04



ATENÇÃO:

- A HeartWare só reconhece os cabos de sua própria fabricação (códigos USB.01 e CBP.01, respectivamente, na lista acima) para uso com o eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ECGV6, alegando única e exclusivamente para os mesmos o atendimento dos requisitos de compatibilidade eletromagnética e proteção elétrica da norma NBR IEC 60601-1-2.
- A utilização de quaisquer outros cabos, de quaisquer outros fabricantes pode resultar em mau funcionamento do sistema, bem como aumento das emissões e/ou diminuição de sua imunidade eletromagnética.

7. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES



As figuras a seguir são meramente ilustrativas. Nelas, podem existir setas e alguns números, semelhante a este: ❶. Estes números são mostrados apenas para facilitar a identificação de um determinado detalhe descrito na lista após as figuras.



Todas as partes componentes do equipamento são adequadas para operação no ambiente do paciente.

7.1. ELETROCARDIÓGRAFOS FÁCIL



Vista frontal



Vista traseira

7. Identificação das partes







Vista inferior

- ❶ Luz verde indicativa do estado de operação (Desligado/Ligado)
- ❷ Porta de entrada DB-15 fêmea para o *cabo de paciente*
- ❸ Porta de entrada Mini-DIN fêmea para o *cabo USB*
- ❹ Pés de silicone

7.1.1. Etiqueta indelével

Posicionada no verso do eletrocardiógrafo, com o tamanho de 80 x 35 mm segundo modelo abaixo:

	HW Sistemas - HeartWare Ltda. CNPJ: 41.842.112/0001-60 Indústria Brasileira	Registro ANVISA / MS: <input type="text"/>	❶
	Av. Alphonsus de Guimarães, 115 B. Pompéia, Belo Horizonte, MG CEP: 30.270-020	Produto / Modelo: <input type="text"/>	❷
	Site: www.hw.ind.br	Número de Série: <input type="text"/>	❸
  	Responsável Técnico: Robson Portugal Starling (CREA-MG 51924/D)	Dimensões(LxAxP): 110x35x175 mm Peso: 0,5 kg VER INSTRUÇÕES DE USO	

- ❶ Campo para o número de registro ANVISA / MS.
- ❷ Campo para descrição do *Produto/Modelo*, por exemplo "*Eletrocardiógrafo Fácil / ECGV6*".
- ❸ Campo para o *Número de Série* do equipamento.



Veja o significado dos símbolos da figura acima no capítulo *Convenções* (página 2).


7.2. CABO DE CONEXÃO HW-USB



Código USB.01

- ❶ Conector Mini-DIN macho, a ser conectado no eletrocardiógrafo
- ❷ Conector USB, a ser conectado no computador

7.3. CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS (DB15)

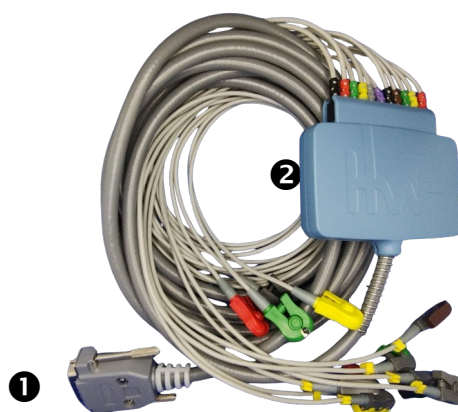

Cabo de paciente para esforço, 10 vias, DB-15 – Código CBP.02

- ❶ Conector DB-15 macho para ligação no eletrocardiógrafo
- ❷ Corpo central com figura ilustrando a montagem de alguns eletrodos

7.4. MÍDIA DE INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS

Baixe o instalador para seu ECGV6 em:
<https://tinyurl.com/ecgv6-instalador>




Periodicamente, a HW Sistemas disponibiliza atualizações do programa a seus clientes. Você pode verificar se existem atualizações disponíveis: a partir do menu principal dos programas clique em **Ajuda** e **Verifica se há atualizações**.

7.5. DOCUMENTAÇÃO

Contém: *Manual do Usuário (este), Certificado de Garantia e Rede de Assistência Técnica Autorizada:*



Capa deste documento (modelo)

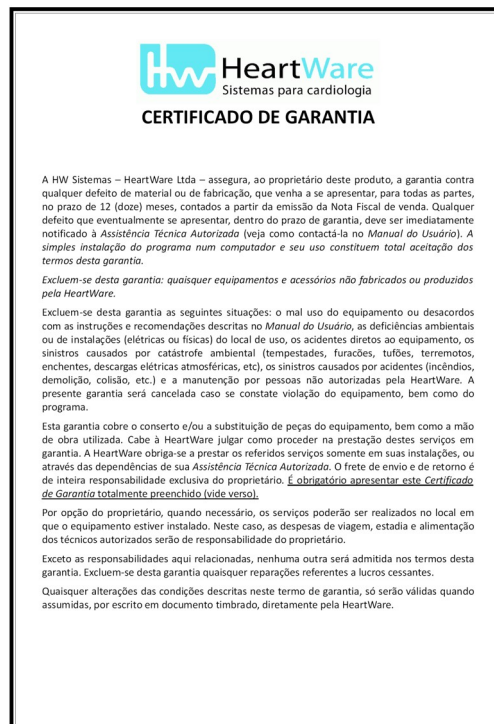

Certificado de garantia (modelo)

Rede de Assistência Técnica Autorizada (modelo)



Esta documentação se encontra em forma eletrônica na mídia de Instalação.

8. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E OUTROS CUIDADOS

8.1. ADVERTÊNCIAS



Recomendamos a leitura dos seguintes documentos, publicados pelo Departamento de Ergometria e Reabilitação Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia:

Consenso Nacional de Ergometria

Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Volume 65 - II (1995)
<http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2002/7805/default.asp>

II Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Teste Ergométrico

Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Volume 78 - Suplemento II (2002)
<http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2002/7805/default.asp>



Especialmente em exames de esforço, este produto deverá ser manuseado por um profissional médico cardiologista, devidamente habilitado pela *Sociedade Brasileira de Cardiologia* (SBC), que, na ocasião do exame, poderá impedir, sempre que necessário, dentro do ponto de vista clínico, a utilização deste produto ou de algum dos periféricos citados neste manual. Cabe também a este profissional, julgar qual o método de utilização mais adequado e quais recursos disponíveis no programa deste produto poderão ser empregados.



ATENÇÃO:

Este equipamento atende aos requisitos de compatibilidade eletromagnética da norma IEC 60601-1-2 para aparelhos grupo I, classe B (CISPR 11) e requer precauções especiais quanto ao ambiente eletromagnético em que funcionará. Este manual contém as informações sobre compatibilidade eletromagnética necessárias para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. Recomendamos que este equipamento não seja usado próximo ou empilhado sobre outros equipamentos. Caso isso seja necessário, recomenda-se que este equipamento seja observado para verificar a operação normal na configuração na qual será utilizado.



ATENÇÃO:

Equipamentos de comunicação por radiofrequência (RF) móveis e portáteis tais como telefones celulares e sem fio podem afetar o funcionamento de equipamentos eletromédicos.



Todas as partes componentes do equipamento são adequadas para operação no ambiente do paciente.



Este equipamento é adequado ao uso em conjunto com equipamentos eletrocirúrgicos e protege o paciente contra queimaduras oriundas de falha do eletrodo comum destes equipamentos



BIOCOMPATIBILIDADE

Por sua própria natureza e dos exames a que se destinam, os Cabos de Paciente (conectados ao paciente através de eletrodos) podem entrar em contato superficial e limitado com a pele, conforme definições da norma ISO 10993-1. A HeartWare, de acordo com sua experiência, atesta que os materiais empregados em sua fabricação obedecem os requisitos da referida norma no tocante à citotoxicidade, sensibilização, irritabilidade e reatividade intracutânea.



Este equipamento não possui proteção contra penetração de líquidos (tipo IPX0).



A proteção contra descargas de desfibrilador e correntes de alta frequência encontra-se montada no cabo de paciente (*Equipamento com Parte Aplicável do Tipo BF, a prova de desfibrilador*). Desta forma, os equipamentos só estarão protegidos para descargas de desfibrilador e correntes de alta frequência se estiverem sendo usados com os cabos de paciente originais. O uso dos equipamentos sem seus cabos de paciente originais não garante proteção contra descargas de desfibriladores e correntes de alta frequência. Deve-se respeitar a restrição de carga máxima admissível especificada na seção *Especificações técnicas e Características*, página 7.



Este equipamento é inadequado ao uso em presença de mistura anestésica inflamável com o ar; equipamento inadequado para ambientes cirúrgicos.



Este equipamento é inadequado para aplicações cardíacas diretas.



Em caso de saturação dos amplificadores ou sobrecarga nos circuitos, o programa do sistema indicará na tela de monitorização de traçados a situação INOPERANTE. Veja mais detalhes em As telas de monitoração de sinais, página 40

Quanto aos dados obtidos de qualquer produto compatível com este e usado concomitantemente, o programa do sistema se limita a registrar estes valores. Sua precisão depende da correta instalação, configuração, uso e funcionamento destes periféricos. Consulte informações descritas nos manuais de seus respectivos fabricantes.

Os ergômetros compatíveis com este produto apenas recebem os dados de velocidade, inclinação e/ou carga e não transmitem nenhuma informação de retorno, quando controlados através do programa. Assim, o programa se limita apenas a enviar os comandos de operação a estes periféricos, conforme protocolo utilizado, não tendo como verificar, sua está correta execução.

Quanto à precisão dos valores metabólicos de esforço, calculados no programa, quando o paciente se submete ao exercício através do ergômetro, o sistema não tem como garanti-la. Isto se deve ao nível de precisão do trabalho exercido pelo paciente no ergômetro. Logo, deve-se atentar às recomendações descritas pelos fabricantes destes periféricos, principalmente no que diz respeito à correta postura do paciente e das forças por ele aplicadas no ergômetro, devendo-se evitar que o paciente se segure na esteira, tensionando os grandes grupos musculares do tórax (anterior e posterior) e braços, aumentando o

8. Advertências, Precauções e Outros Cuidados

consumo de oxigênio e gerando ruído muscular que pode comprometer a interpretação do sinal eletrocardiográfico.

Este produto não causa efeitos colaterais. Particularmente nos Testes Cardiopulmonares de Esforço e Testes Ergométricos, é essencial a leitura do manual do fabricante do ergômetro; devendo-se também garantir a adaptação do paciente ao mesmo, evitando acidentes, quedas e, acima de tudo, respeitar as contraindicações do exame conforme Consenso Nacional de Ergometria e revisões, de acordo com as condições clínicas do paciente.

Os itens de informática são todos de uso geral, não específicos deste produto e não são equipamentos médicos, devendo seu uso levar em conta esta característica. Para informações sobre sua instalação, configuração e correto funcionamento, deverão ser consultados os manuais dos respectivos fabricantes. Como é fonte de alimentação para os sistemas da família FÁCIL, o microcomputador deverá atender a requisitos de segurança elétrica conforme a norma IEC 60950.

Durante o registro do ECG podem ocorrer vários tipos de ruídos causados por fatores externos. Todos os filtros aplicados ao ECG nesta família de eletrocardiógrafos são digitais, aplicados pelo programa de computador. Os sinais são armazenados da forma original, como captados do paciente e os filtros somente são aplicados no momento em que estes sinais são visualizados ou impressos, sempre preservando em arquivo os dados originais (sem filtro) do ECG.

A utilização de filtros implica alterações no traçado do ECG. Em função disto, recomendamos sempre que estes sejam usados apenas quando o nível de interferências é tal que impossibilita a adequada interpretação do ECG. **É sempre recomendável que se tente primeiro eliminar as causas das interferências e, se for preciso, aplicar os filtros.**

Os filtros de ruído muscular (>35 Hz, >40 Hz, >45 Hz) têm como objetivo remover as interferências geradas por tensão muscular do paciente. Como, por definição, são filtros passa-baixa, ou seja, retiram do ECG todas as frequências acima de seu valor de corte, parte da informação do eletrocardiograma é removida junto com o ruído muscular. Antes de se utilizar estes filtros, especialmente em baixas FCs (< 60bpm), deve-se buscar eliminar as interferências, recomendando ao paciente que permaneça com a musculatura o mais relaxada possível, assegurando uma monitoração de boa qualidade e observando o correto posicionamento dos eletrodos. Desta forma, devem ser usados com bastante critério pois podem introduzir alterações no traçado do ECG. Em caso de dúvida, como os sinais são gravados sem nenhuma filtragem de software, pode-se sempre avaliar o exato efeito dos filtros aplicados sobre o sinal.

O filtro de 60 Hz remove interferências causadas pela rede elétrica de corrente alternada, especialmente em condições de ausência ou má qualidade de aterramento na rede elétrica que alimenta o sistema. O nível de distorção causado pelo uso deste filtro é pequeno uma vez que este remove apenas a componente de 60 Hz do ECG. A norma NBR 5410 especifica como equipamentos eletrocardiográficos, micro e o ergômetro devem ser aterrados, de forma que este filtro não seja necessário.

O filtro de linha de base tem como objetivo remover as oscilações da linha de base do ECG, geralmente causadas pelo movimento do paciente, respiração, fixação inadequada ou má qualidade dos eletrodos ou movimentação excessiva dos rabichos do cabo de paciente. O nível de distorção causada por este filtro é pequeno, no entanto, se os problemas descritos acima forem evitados, pode-se dispensar o uso deste filtro.

Estimuladores elétricos e/ou marcapassos cardíacos podem ser usados, simultaneamente,

com este equipamento. Deve-se, entretanto, observar que a somatória da corrente de fuga destes equipamentos pode ultrapassar os valores admissíveis.

Este equipamento pode sofrer alterações de funcionamento quando submetido a campos eletromagnéticos intensos ou a radiação. Mantenha-o distante de aparelhos que geram tais campos como, por exemplo, micro-ondas, monitores e televisores, fontes de alimentação elétrica, reatores eletroeletrônicos de iluminação, transformadores elétricos, estabilizadores e *no-break* elétricos, motores elétricos, inversores de frequências, aparelhos telefônicos sem fio e celulares, transmissores e receptores de rádio, aparelhos de ultrassom, salas e aparelhos de raio X, etc.

8.2. PRECAUÇÕES



Em caso de suspeita de mal funcionamento do equipamento, alteração no comportamento do sistema, adulteração ou violação de qualquer parte deste equipamento, deve-se suspender imediatamente o seu uso e contactar um representante mais próximo na *Rede de Assistência Técnica* (ver página 111) ou o *Suporte Técnico* (ver página 1).



Caso este equipamento sofra sobrecargas elétricas severas (raios, defeitos na rede elétrica), algum choque mecânico violento ou for submetido a calor ou campos eletromagnéticos ou radiantes intensos, umidade excessiva ou se algum líquido for derramado sobre ou perto dele, **DESLIGUE-O IMEDIATAMENTE**, desconectando-o do computador, retire os eletrodos do paciente, desligue o micro e desconecte-o da rede elétrica. **SUSPENDA SEU USO POR TEMPO INDETERMINADO**. Entre em contato com o representante mais próximo na Rede de Assistência Técnica (página 111) ou com o Suporte Técnico (página 1), reportando os detalhes do acidente ocorrido.

Devem-se tomar algumas precauções e cuidados no uso do sistema operacional instalado no computador. Recomenda-se usar bons programas *antivírus* (ou outros que desempenham a função de protegê-lo de programas mal-intencionados). O uso do computador, apesar de ser do tipo geral, deverá ser responsável, sendo recomendável usá-lo apenas para a finalidade deste produto, evitando instalar programas de terceiros que não sejam essenciais.

O usuário deverá estar atento à qualidade do computador e suas partes, principalmente a impressora. Também deve-se estar atento à performance do computador e do sistema operacional. Se houver mal funcionamento no computador ou no sistema operacional deve-se contactar o fornecedor / fabricante do mesmo para solucioná-lo.



É necessário que o usuário tenha conhecimentos básicos para manusear o computador e o sistema operacional.



Este produto não possui botão de *Ligar* ou *Desligar*: quando o micro estiver ligado, ele também estará.



Leia atentamente outras precauções listadas a seguir:

- Mantenha este manual do usuário sempre à mão;
- Os conectores do cabo de paciente, estando ou não conectados aos eletrodos, não devem tocar qualquer parte metálica, mesmo que esta esteja aterrada;
- Os eletrodos, montados no paciente, não devem tocar quaisquer condutores elétricos;
- Os eletrodos descartáveis (não incluídos neste produto), adquiridos pelo cliente, não devem ser reutilizados;
- O operador do sistema não deverá tocar, simultaneamente, o paciente e qualquer parte do equipamento durante o exame;

- Recomenda-se ter um desfibrilador na sala de exames de esforço; deve-se mantê-lo operacional, seguindo-se as instruções de seu fabricante;
- Quando eventualmente necessário, o paciente, monitorado por este equipamento, não deverá tocar quaisquer partes metálicas quando se aplica um choque elétrico através de um desfibrilador (vide instruções do fabricante);
- Quando houver necessidade de aplicar um choque elétrico através de um desfibrilador, não deixe que as pás do mesmo toquem os eletrodos e o cabo de paciente que, eventualmente, possam estar montados sobre o paciente;
- Evite dobrar, flexionar ou esticar os cabos deste equipamento, especialmente o cabo de paciente;
- Deve-se observar, atentamente, as recomendações e os procedimentos descritos no capítulo *Instalação* (página 31), principalmente no que se refere aos pré-requisitos (do sistema elétrico e do computador);
- Deve-se observar, atentamente, todas as recomendações e procedimentos descritos nas demais seções deste capítulo e restante deste manual.

8.3. LIMPEZA



Antes de limpar qualquer parte do equipamento, **DESLIGUE** o computador. **DESCONECTE** a fonte de alimentação do eletrocardiógrafo e o computador da rede elétrica. Somente após a limpeza e absoluta secagem das partes é que se pode reconectá-los e ligar os equipamentos.



A limpeza de outros dispositivos e periféricos deverá ser realizada de acordo com as recomendações de seus fabricantes.



Use, sempre que possível, luvas descartáveis na limpeza do equipamento.

É importante limpar e manter conservado este equipamento e suas partes. Se exposto à poeira ambiental constante e excessiva umidade, este equipamento sofrerá no desempenho e na confiabilidade. Caso esteja utilizando eletrodos reutilizáveis é importante limpá-los, especialmente após utilização.

O eletrocardiógrafo, os cabos e os conectores podem ser limpos usando um pano limpo de algodão, levemente umedecido em uma solução de sabão neutro, sem adição de solventes, detergentes, álcoois, éteres ou produtos corrosivos. Evite respingos e excessos de líquido. Se o equipamento contiver resquícios de sangue ou material infeccioso, deverá ser realizado o procedimento de desinfecção conforme normas sanitárias vigentes. **IMPORTANTE:** nenhuma das partes desse equipamento é autoclavável.

Para limpeza do cabo de micro e de paciente, desconecte-os de seus respectivos conectores e limpe-os em toda sua extensão, sem forçá-los. Evite a flexão do cabo durante a limpeza para não quebrá-lo internamente. Limpe os conectores de eletrodos do cabo de paciente. Não use lixas, palhas de aço ou materiais abrasivos. Os conectores dos cabos não devem ser lavados e/ou imersos em água ou em qualquer tipo de solução.

8.4. CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Os eletrocardiógrafos da família FÁCIL requerem cuidados essenciais para garantir o seu bom funcionamento. Quando montados, deve-se mantê-los sobre uma superfície plana, estável, nivelada, seca, limpa, fresca, protegida dos raios solares e arejada. Deixe-o na posição normal, isto é, com os pés de silicone sobre a superfície. Não deixe o eletrocardiógrafo diretamente sobre o piso. Deve-se mantê-lo afastado das áreas molhadas, janelas e aparelhos de ar condicionado, para evitar, principalmente, respingos de água. Evite poeira excessiva e, se houverem excessos de partículas sólidas suspensas no ar, então, não será recomendável manter este equipamento neste local.

Este equipamento e suas partes são frágeis. Não podem ser submetidos a choques mecânicos violentos, como batidas, empurrões e quedas. Também não se pode submetê-los ao calor intenso (como fogo direto ou indireto, exposição prolongada ao sol ou superfícies quentes), à umidade excessiva (como vapores) ou à penetração de líquidos.

O cabo de paciente deve ser conservado em repouso sobre uma superfície, sem dependurá-lo em pedestais ou suportes suspensos. Evite flexão e dobra com ângulos maiores que 60°.

8. Advertências, Precauções e Outros Cuidados

Para armazenagem e conservação deste equipamento, em períodos muito longos ou para o transporte, deve-se usar a embalagem original (use as recomendações descritas através de símbolos na etiqueta externa). Na falta desta, utilize uma caixa de proporções semelhantes, tomando-se o cuidado de usar algum material que absorva os impactos mecânicos (como espuma, jornais, etc). Certifique-se que o equipamento está limpo e seco antes de guardá-lo. Desmonte todas suas partes para colocá-las na caixa, que deverá ser fechada e armazenada em local seco, abrigado da luz, em superfície plana e estável. Não empilhe outros materiais sobre ela.

Condições de conservação e armazenamento – equipamento desligado:

- *Temperatura ambiente:* de 10 a 50°C;
- *Umidade relativa:* de 20 a 85 % (sem condensação);

8.5. MANUTENÇÃO

8.5.1. Manutenção periódica

A HeartWare recomenda a verificação da calibração dos eletrocardiógrafos da família **Fácil** a cada 24 meses de operação normal. Caso o equipamento seja submetido a condições elétricas extremas como descargas atmosféricas ou defeitos graves na rede elétrica ou sofra algum choque mecânico extremo, o mesmo deve ser enviado para o fabricante ou seus prepostos autorizados. A calibração completa requer equipamentos e conhecimento técnico detalhado do equipamento, devendo ser normalmente feita pelo fabricante ou seus prepostos autorizados. Isto posto, descreveremos a seguir um procedimento relativamente simples para verificação do correto funcionamento básico do sistema:

1. Equipamento adicional necessário: simulador de sinais eletrocardiográficos de boa qualidade, em perfeito estado de funcionamento e devidamente calibrado, bem como seu respectivo manual.
2. Seguindo as instruções do fabricante, conecte o simulador de ECG ao cabo de paciente e simule um exame, fazendo um registro (impressão) com todos os filtros desligados para cada forma de onda sugerida pelo fabricante de seu simulador de ECG.
3. Meça as amplitudes e durações em todos os canais das formas de onda impressas, comparando-as com os padrões definidos pelo fabricante do simulador de ECG. *OBS: nunca faça comparações e/ou medições na tela do computador, use sempre o sinal impresso.*
4. Caso observe qualquer discrepância, entre em contato com a Assistência Técnica (página 1).

8.5.2. Manutenção corretiva

Havendo necessidade a qualquer momento de uma manutenção corretiva nos eletrocardiógrafos FÁCIL ou seus cabos, o cliente deverá recorrer ao representante mais próximo na *Rede de Assistência Técnica* (página 111) ou à *Assistência Técnica* (página 1).

Excluem-se também desta manutenção quaisquer partes ou equipamentos não produzidos ou fabricados pela HW Sistemas. Nestes casos, o usuário deverá seguir as instruções de seus respectivos fabricantes.

O cliente poderá solicitar este manual e o programa de instalação deste produto para reposição, desde que sejam comprovadas esta necessidade e o vínculo comercial entre ele e a HW Sistemas. Neste caso, a HW Sistemas se reserva no direito de escolher a melhor forma de distribuir estes materiais (física ou digitalmente) e não se responsabiliza por versões diferentes do original que o cliente possua.

Em caso de necessidade de reposição, quaisquer itens componentes dos sistemas da família FÁCIL devem necessariamente ser adquiridos, através da *Rede de Assistência Técnica* (ver página 111) ou pela *Central de Vendas* (ver página 1).

O transporte deste equipamento ou parte dele para a manutenção corretiva, seja ela feita por representante ou por Assistência Técnica HeartWare, ficará por conta e responsabilidade do cliente, mesmo estando no prazo de garantia. Recomenda-se usar a embalagem original para acomodação do equipamento ou, na falta desta, uma caixa segura e protegida internamente por materiais que absorvam impactos mecânicos.



Periodicamente, a HW Sistemas disponibiliza atualizações do programa a seus clientes. Você pode verificar se existem atualizações disponíveis: a partir do menu principal dos programas clique em **Ajuda** e **Verifica se há atualizações** ou consulte o representante mais próximo na Rede de Assistência Técnica (página 111) ou o Suporte Técnico (página 1).

8.6. DESCARTE

O eletrocardiógrafo, os cabos e a fonte de alimentação possuem materiais eletrônicos que, eventualmente, podem conter metais pesados e tóxicos ao meio ambiente. Somando-se a isto, todas as partes são constituídas de materiais não biodegradáveis. Portanto, deve-se tomar o cuidado de descartá-las.

A eliminação das partes ou todo deste equipamento deverá obedecer à política de proteção ambiental da instituição ou entidade proprietária ou, na ausência desta, os elementos descartados deverão ser enviados de volta à fábrica.

8.7. PREPARAÇÃO DO PACIENTE

Esta etapa, muitas vezes pouco valorizada, é o fator mais importante para a obtenção de um registro dos traçados com boa qualidade, uma vez que a impedância elétrica da pele, naturalmente elevada, associada à movimentação física dos eletrodos, é responsável pela maior parte das interferências no sinal. A presença destas interferências e oscilações da linha de base pode, muitas vezes, ser atribuídas a uma aplicação inadequada dos eletrodos. Seguem algumas recomendações para um bom preparo da pele.



Leia com muita atenção as recomendações abaixo.



Para adequada qualidade de monitorização do paciente, deverão ser utilizados eletrodos descartáveis, de boa qualidade, adequados ao uso em esforço e que tenham registro junto à ANVISA. Sugerimos o uso de eletrodos descartáveis para esforço da marca 3M ou de qualidade similar.

1. Tricotomia, se necessária, com barbeador descartável;
2. Desengorduramento da pele nos locais determinados para a colocação dos eletrodos usando água e sabão, éter, álcool anidro ou acetona;
3. Remoção da camada córnea da pele por abrasão, usando lixas finas (número 400 ou maior), gaze ou uma esponja áspera. Os movimentos devem ser suaves e num único sentido (não fazer movimentos de vai-e-vem);
4. Use sempre eletrodos de boa qualidade e em boas condições (veja recomendação acima). Nunca misture tipos diferentes de eletrodos ou em diferentes estados de conservação num mesmo paciente;
5. No caso de eletrodos reutilizáveis, caso necessário, use gel condutor para melhorar a condução elétrica da interface pele/eletrodo. Tome cuidado para não usar uma quantidade excessiva de gel, pois, o mesmo poderá escorrer e descolar o eletrodo. Não utilizar gel para ultrassom pois este tipo de gel NÃO É CONDUTOR.

8. Advertências, Precauções e Outros Cuidados

6. Use, se necessário, uma fita adesiva de boa qualidade para garantir uma boa fixação dos eletrodos, de forma a evitar que eles se movimentem em relação à pele;
7. Posicione o cabo de paciente de forma que os rabichos não fiquem muito esticados, evitando que a movimentação do paciente acarrete puxões nos eletrodos; quando aplicável (em exames de esforço), use o cinto para prender o corpo central do cabo de paciente ao abdômen do paciente;
8. Garanta o correto posicionamento dos eletrodos, de acordo com o modelo de monitoração escolhido (veja *Posicionamento dos eletrodos*, página 29);
9. Durante um exame de ECG em repouso, o usuário deve recomendar ao paciente para não se movimentar e manter-se relaxado. Durante o esforço, siga as recomendações descritas no manual do usuário de seu ergômetro, principalmente no que se refere a correta postura do paciente.













Ocasionalmente, os eletrodos de sucção podem deixar, temporariamente, marcas ou hematomas em pacientes com pele mais sensível. Para diminuir a probabilidade de tal evento, estes eletrodos devem permanecer no paciente durante o menor prazo possível para obtenção de um bom traçado eletrocardiográfico. O paciente deve ser informado desta eventual possibilidade.



Se, eventualmente, após aplicar todas as recomendações descritas nesta e na próxima seção, os traçados estiverem com um aspecto incoerente ou ilegível, consulte a seção *Problemas nos sinais de ECG* (página 107), ou entre em contato com o representante mais próximo na *Rede de Assistência Técnica* (página 111) ou com o *Suporte Técnico* (página 1).


8.8. POSICIONAMENTO DOS ELETRODOS

Os conectores para ligação dos eletrodos no cabo de paciente deste equipamento seguem o padrão internacional de cores e de nomenclatura descritos abaixo. O posicionamento e o tipo de eletrodos descritos abaixo se referem ao ECG de repouso ou convencional.

Cor	Nomen- clatura	Posição em ECG de repouso (12 derivações)	Tipo de eletrodo (repouso)
 (amarelo)	L	Braço esquerdo (L)	Cardioclip
 (verde)	F	Perna esquerda (F)	Cardioclip
 (vermelho)	R	Braço direito (R)	Cardioclip
 (preto)	N	Perna esquerda (N)	Cardioclip
 (branco / vermelho)	C1	Quarto espaço intercostal direito, junto ao esterno	Sucção
 (branco / amarelo)	C2	Quarto espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno	Sucção
 (branco / verde)	C3	No ponto médio de uma linha imaginária entre C2 e C4	Sucção
 (branco / marrom)	C4	Quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular	Sucção
 (branco / preto)	C5	Quinto espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior	Sucção
 (branco / roxo)	C6	Quinto espaço intercostal esquerdo, na linha axilar média	Sucção

8. Advertências, Precauções e Outros Cuidados

8.8.1. Montagem dos eletrodos em ECG de repouso ou convencional

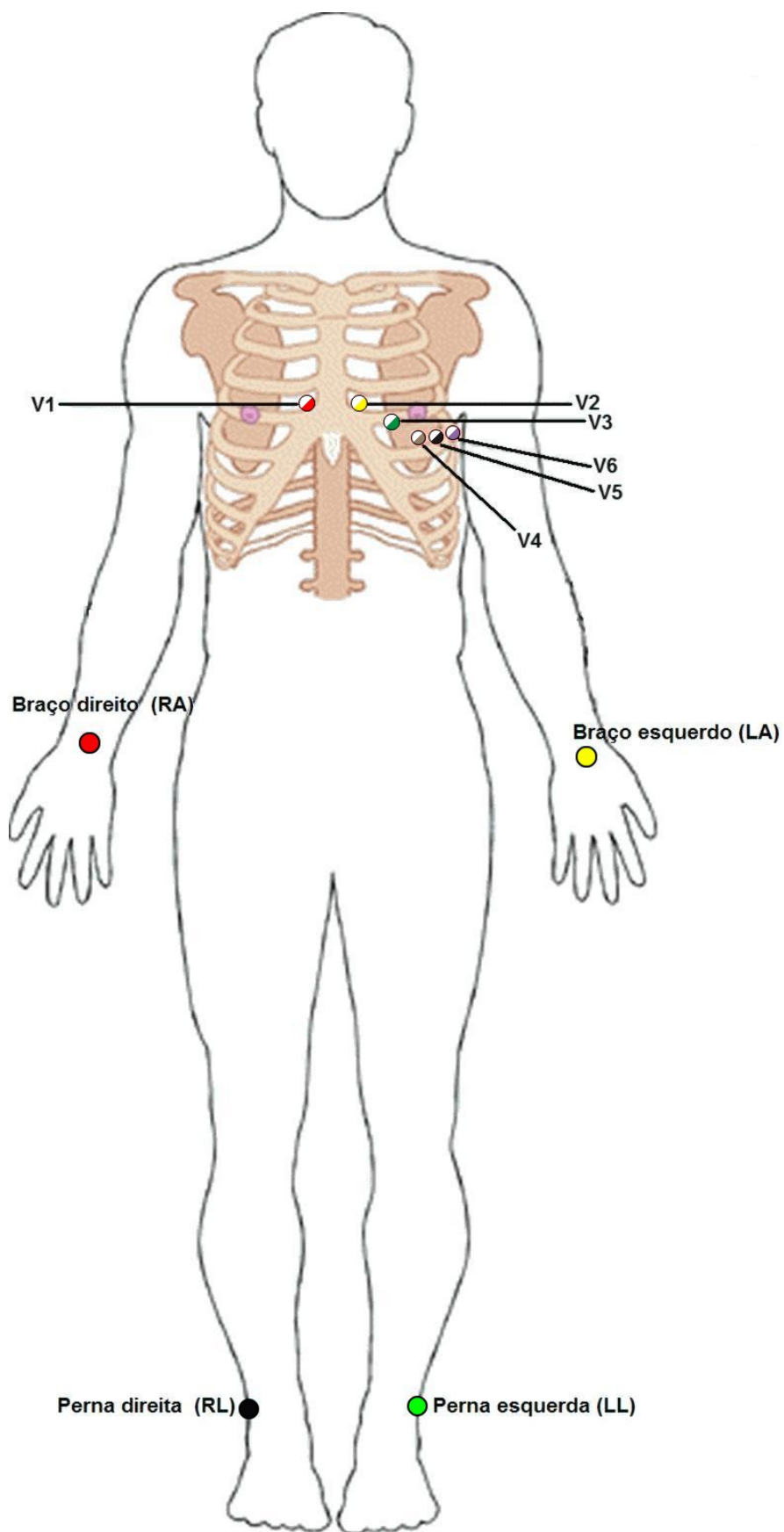

9. INSTALAÇÃO



A instalação deste produto deverá ser efetuada por um técnico autorizado pela HW Sistemas. Consulte a *Rede de Assistência Técnica* (página 111) ou o *Atendimento* (página 1)

Na instalação, não se faz necessário o uso de equipamentos de proteção, como, por exemplo, luvas, óculos e jalecos.



1. O computador já deve estar montado, com sistema operacional Windows instalado e pronto para utilização. Suas partes (monitor, impressora, etc.) também já devem estar instaladas de acordo as instruções de seus respectivos fabricantes. Entre em contato com seu(s) fornecedor(es) para esclarecer eventuais dúvidas.
2. Pressupõe-se que o usuário tenha conhecimentos básicos para manusear o computador e seu sistema operacional.
3. **Para executar o instalador é necessário que o usuário corrente possua os direitos de Administrador do Windows.**

9.1. PRÉ-REQUISITOS DA INSTALAÇÃO



Leia atentamente os pré-requisitos descritos a seguir, essenciais para a instalação, configuração e correto funcionamento deste produto.

9.1.1. Pré-requisitos do sistema elétrico

É necessário que micro e eventuais periféricos (ergômetros) possuam um aterramento elétrico de boa qualidade, em conformidade à Norma Brasileira **NBR-5410**. A não observância à referida norma pode prejudicar o correto funcionamento do produto e/ou comprometer a segurança, tanto do paciente quanto do operador. Em caso de dúvida, consulte seu electricista de confiança e com experiência em instalações elétricas hospitalares para certificar-se que sua instalação elétrica atende aos requisitos da norma **NBR-5410**.

9.1.2. Pré-requisitos do computador

Configuração mínima:

processador multi-core Intel ou AMD; clock 3.0 GHz; 6 GB RAM; Drive CD-ROM ou conexão internet para download do programa de instalação; tela no formato 16:9 com resolução mínima de 1280x720, 256 cores; sistema operacional Windows 10; impressora compatível com o sistema operacional; 1 porta USB 2.0 disponível.

IMPORTANTE: o microcomputador ao qual o equipamento será conectado deverá atender à norma IEC 60950.
os aparelhos HeartWare requerem **Portas USB versão 2.0!**


USB

9.2. INSTALANDO O EQUIPAMENTO



ATENÇÃO - IMPORTANTE: NÃO CONECTE O APARELHO À PORTA USB ATÉ QUE O PROGRAMA TENHA SIDO COMPLETAMENTE INSTALADO.

A figura abaixo ilustra o esquema básico de ligação do eletrocardiógrafo (pré-amplificador). Posicione o eletrocardiógrafo próximo ao computador, em uma superfície plana, estável, nivelada, seca, limpa, protegida dos raios solares e arejada. Deixe-o na posição normal, isto é, com os pés de silicone sobre a superfície, garantindo livre circulação de ar para ventilação do equipamento. Não deixe o eletrocardiógrafo diretamente sobre o piso, evitando que ele seja molhado. Mantenha-o também afastado de janelas e aparelhos de ar condicionado, para evitar respingos de água. Evite também locais empoeirados. Deixe um espaço vazio mínimo de 5 cm nas laterais esquerda e direita, 10 cm na face superior e 20 cm nas faces frontais e traseira.

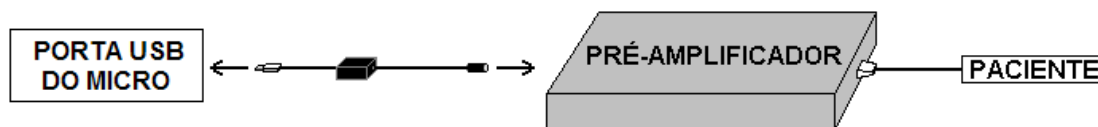

*A figura acima mostra o esquema básico de conexão do sistema, a ser detalhada mais adiante pois **precisamos primeiramente instalar o programa**. No que se refere à conexão dos periféricos ao micro, consulte a seção [Erro: Origem da referência não encontrada](#) (página [Erro: Origem da referência não encontrada](#)).*

9.2.1. Instalação do software

Descreveremos agora uma instalação típica; contudo, dependendo da configuração de seu Windows, podem haver algumas diferenças, mas os princípios básicos são os mesmos.

1. Feche todos os programas que estiverem abertos.
2. Insira a mídia de Instalação do programa no computador e aguarde a execução automática do programa instalador.
3. Siga na tela as instruções de instalação.
4. Ao término da cópia dos arquivos, aguarde alguns segundos e dê um clique em "Concluir".
5. Neste ponto, todos os arquivos necessários devem ter sido copiados para seu disco rígido. O próximo passo é a instalação do hardware.
6. Conecte o Cabo HW-USB na traseira do amplificador e o cabo de paciente na parte frontal.
7. Conecte o Cabo HW-USB a uma porta USB de seu micro para instalação e configuração dos drivers de comunicação dos dispositivos.
8. A instalação é plug-and-play e o Windows irá baixar todos os arquivos necessários. Caso precise instalar manualmente os drivers, estes podem ser encontrados em C:\HW\Drivers.



Este produto não possui botão de *Ligar* ou *Desligar*. Ele estará ligado enquanto o computador estiver ligado.

Neste ponto, a instalação básica do equipamento e do programa está completa. Mais adiante, após a introdução de conceitos básicos de uso do programa, você estará apto para realizar alguns exames como teste de funcionamento.

9.3. TREINAMENTO

O treinamento sobre o manuseio do equipamento e do programa poderá ser aplicado ao responsável designado pelo cliente, somente através de um técnico autorizado pela HW Sistemas. Consulte o representante mais próximo na Rede de Assistência Técnica (página 111) ou o Suporte Técnico (página 1).

9.4. DESINSTALAÇÃO DO PROGRAMA



A DESINSTALAÇÃO DO PROGRAMA IMPLICA NA REMOÇÃO DOS ARQUIVOS PRINCIPAIS DA BASE DE DADOS, OU SEJA, ESTA AÇÃO ELIMINA SUA BASE DE DADOS ! SÓ FAÇA ISTO COM A ABSOLUTA CERTEZA. Quaisquer dúvidas, procure um representante mais próximo na Rede de Assistência Técnica (página 111) ou o Suporte Técnico (página 1).

Para desinstalar o programa, acesse o *Painel de Controle* do Windows, abra a opção *Adicionar ou Remover Programas* e escolha, na lista de programas instalados o programa a família FÁCIL e clique no botão "Remover".



Antes de desinstalar o sistema, certifique-se que exista uma cópia de segurança da base de dados pois, ao *desinstalar* os programas da família FÁCIL, as tabelas principais de controle instaladas originalmente com programa são apagadas, permanecendo os arquivos de exames feitos mas esses arquivos por si só não são de nenhuma valia. UMA BASE DE DADOS SÓ É VÁLIDA SE CONTIVER AS TABELAS DE CONTROLE E OS ARQUIVOS COM OS DADOS COLHIDOS NOS EXAMES. **Se desejar reinstalar o sistema, entre em contato com o representante mais próximo na Rede de Assistência Técnica (página 111) ou com Suporte Técnico (página 1).**



ATENÇÃO:

SEMPRE mantenha cópias de segurança atualizadas da base de dados (veja como fazer na página 137)! Elas são sua única segurança contra vírus, HDs e micros queimados!

10. NOÇÕES BÁSICAS DO PROGRAMA

Veremos a seguir, na ordem em que normalmente surgem na realização de um exame, as principais telas, janelas, ícones e comandos do programa. Ao longo deste manual, serão feitas referências a estas telas e suas funções. Sempre que precisar, recorra a este capítulo.

10.1. A TELA INICIAL

A *Tela inicial* dos programas da família FÁCIL é mostrada abaixo. A partir dela são acessadas todas as funções do programa. Para maior agilidade, algumas destas funções estão prontamente acessíveis através dos ícones da *Barra de Ferramentas*. As outras funções podem ser acessadas a partir do *Menu Principal*. Uma opção interessante desta tela é a possibilidade de colocar sua logomarca (ou uma outra figura qualquer) como papel de parede. Veremos como fazer isto na seção *Configuração do programa*, mais adiante.



A Barra de Ferramentas

Veja as funções dos principais ícones do programa, algumas das quais serão aprofundadas neste capítulo.





Alguns botões só estarão habilitados se houver um exame aberto.
Alguns botões são específicos de modelos de equipamentos.



Inicia um **Novo Eletrocardiograma** (equivale ao menu *Exame* ⇒ *Novo – Eletrocardiograma...*). Também significa fazer um *ECG*. Disponível em todos os programas



Disponível apenas no *ECGV6*, permite acesso rápido a realização de um eletrocardiograma



Usado para **Abrir um Exame** feito anteriormente, definindo-o como o exame corrente, que pode ser editado, reimpresso etc. (equivale ao menu *Exame* ⇒ *Abrir*).



Botão de **Fechar Exame** corrente (equivale ao menu *Exame* ⇒ *Fechar*).



Permite imprimir todo o exame ou partes dele.



Permite a geração de arquivos em formato PDF de todo o exame ou partes dele.



Abre a **Ficha do Paciente**, para visualização e/ou edição (equivale ao menu *Editar* ⇒ *Ficha do paciente*).



Exibe a **Ficha de Anamnese**, para visualização e/ou edição (equivale ao menu *Editar* ⇒ *Ficha da Anamnese*).



Exibe a tela de **Traçados** para visualização, impressão, etc. (equivale ao menu *Editar* ⇒ *Traçados*).



Exibe as telas de **Laudo** e/ou de **Conclusões finais** para sua visualização e/ou edição (equivale ao menu *Editar* ⇒ *Laudo*).



Prosseguir exame: Quando habilitado, serve para dar prosseguimento ao exame não concluído.



Enviar para caixa de Saída o exame corrente. Veja mais detalhes em *Enviando exames para Caixa de Saída*, página 79.



Incorporar exame à Base Local. Só estará disponível se o exame corrente for proveniente da *Caixa de Entrada*. Veja detalhes em *Recebendo exames na Caixa de Entrada*, página 81.




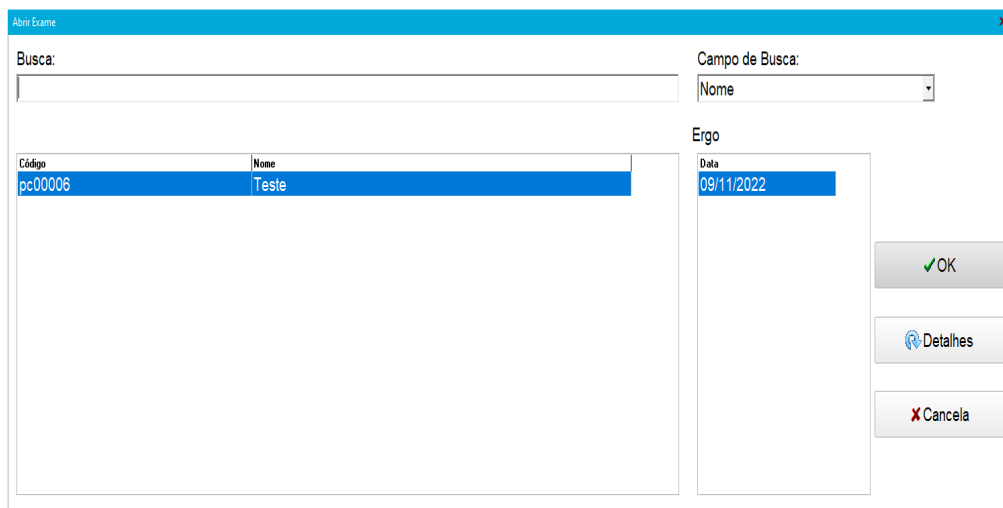
Fecha o exame corrente e **vai para a Caixa de Entrada**.




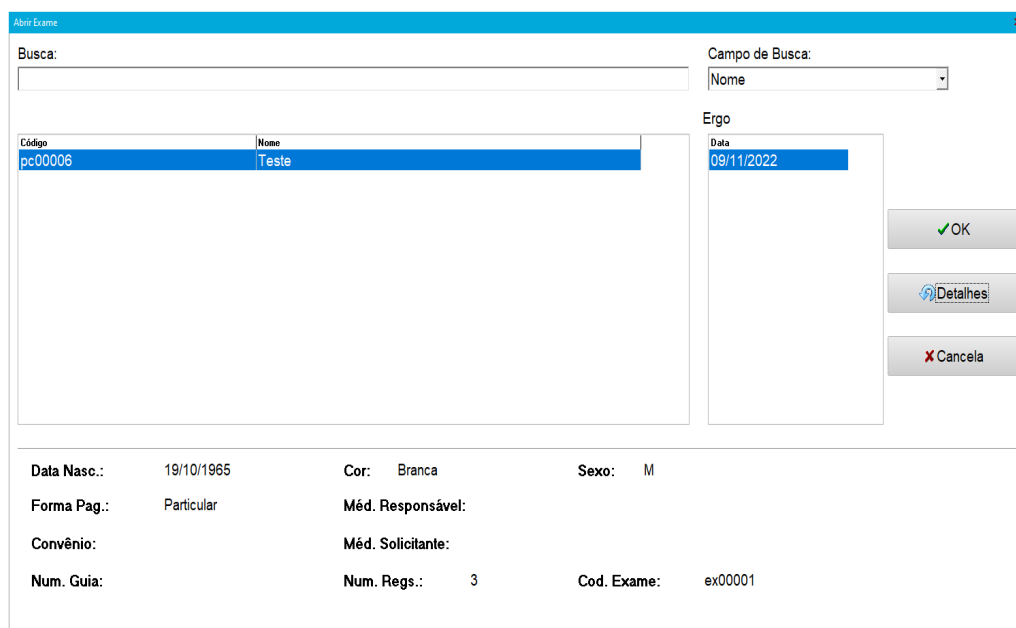
Abre o site da HW Sistemas: <http://www.hw.ind.br> no navegador de internet padrão


10.2. A JANELA **NOVO EXAME**


A janela de novo exame surgirá ao usar o botão  (*Novo Eletrocardiograma*) a partir da tela principal do programa. O título da janela é definido pelo tipo de exame escolhido. Por exemplo, na figura a seguir vemos uma janela de *Novo Eletrocardiograma*:



Nesta janela você poderá selecionar um paciente digitando o início de seu nome no campo *Busca* ou localizando-o na lista de pacientes já cadastrados. Existindo dois ou mais pacientes com o mesmo nome (homônimos) use o botão  (*Detalhes*) para ver informações adicionais do paciente correntemente selecionado. A figura a seguir mostra as informações detalhadas em destaque.




Se o paciente já está na lista, é porque já foi cadastrado e, provavelmente, está retornando para um novo exame. Neste caso, para prosseguir, clique no botão  (*Novo Exame*). Caso o

paciente ainda não tenha sido cadastrado, dê um clique no botão  (*Novo Paciente*) para prosseguir.




Você pode buscar o paciente através do critério de *Código do exame*. Para isto, mude o critério em *Campo de busca*.


Todos os exames seguem o ciclo básico mostrado a seguir e detalhado nos próximos capítulos:

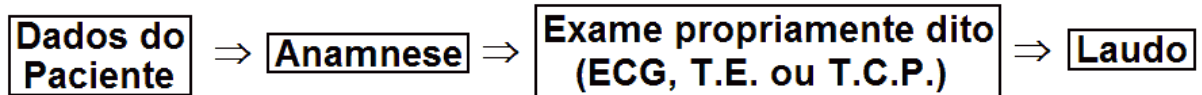






10.3. A JANELA **DADOS DO PACIENTE**

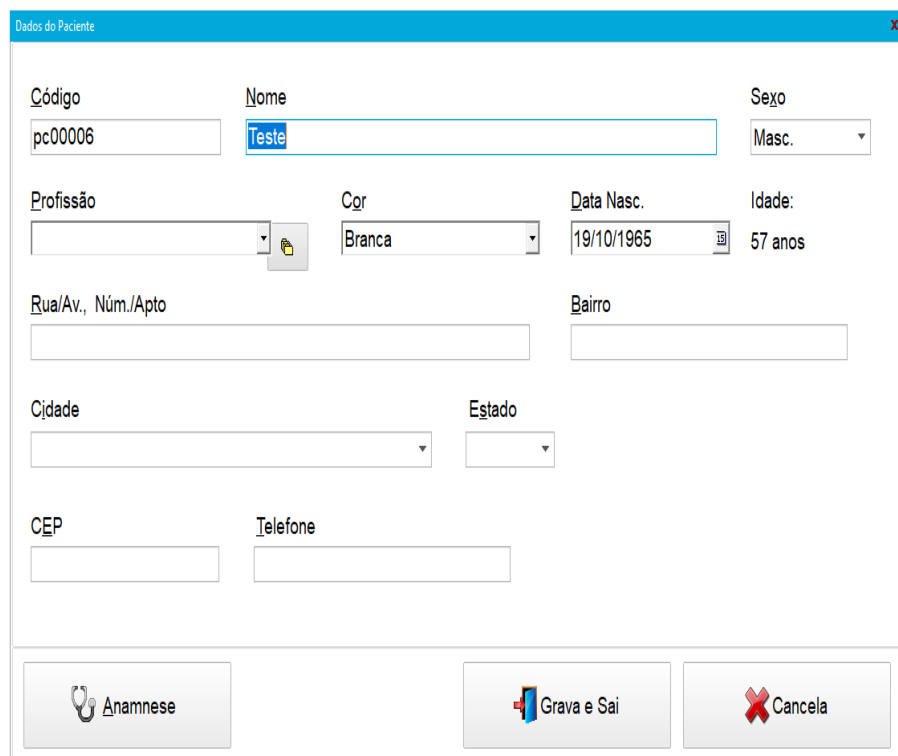A janela *Dados do Paciente*, vista na figura abaixo, é usada para cadastrar as informações básicas do paciente em todos os tipos de exame, sendo, portanto definida para o paciente. Esta janela surgirá após a janela de *Novo Exame* ou, caso algum exame esteja aberto, através do botão  (*Ficha do Paciente*) na tela principal do programa.

Em um exame de *Eletrocardiograma*, apenas os campos *Nome* e *Código* (normalmente gerado automaticamente) são obrigatórios. Nos Testes Ergométricos, os campos *Data de Nascimento* e *Sexo* também são obrigatórios. Os demais campos são opcionais.




A profissão do paciente pode ser escolhida a partir de uma lista ao clicar no botão . Caso a profissão do paciente não conste nesta lista, clique em  (*Edita Profissões*) para adicioná-la à lista. Para mais detalhes deste recurso, consulte Cadastro de Profissões (página 49). A cidade pode ser digitada diretamente no devido campo ou escolhida através da lista que armazena automaticamente os nomes digitados anteriormente.


O botão  (*Anamnese*), quando disponível, leva à próxima etapa do exame. O botão  (*Grava e Sai*) salva o cadastro do paciente e retorna à tela principal do programa. Esta opção é usada em casos especiais, por exemplo, quando o cadastro é feito previamente por um(a) auxiliar. O botão  (*Cancela*) aborta o cadastro/edição da ficha de dados do paciente, descartando adições e/ou edições eventualmente feitas.

10.4. A JANELA DE DADOS DA ANAMNESE

Após o preenchimento dos dados básicos do paciente, o próximo passo é a janela *Dados de Anamnese*, que depende do exame que está sendo feito. Na figura abaixo, é mostrada a janela mais completa, usada para Testes Ergométricos. No caso de *ECGs*, esta janela é mais simples, possuindo apenas as guias *Dados Gerais*, *Escore Pré-teste* e *Framingham*. Uma vez que os dados contidos na Anamnese podem variar ao longo do tempo, esta janela é única para cada exame realizado.


Caso algum exame previamente realizado estiver aberto, esta janela pode ser acessada através do botão  (*Ficha da Anamnese*), na barra de ferramentas.


Nos exames de *Eletrocardiograma* todas as informações são opcionais, exceto os campos *Código Exame* e *Data do Exame* (normalmente gerados automaticamente) que estão na guia *Dados Gerais*. Recomenda-se o preenchimento do peso e altura para cálculo do *Índice de Massa Corporal*.




Os nomes dos médicos solicitante e responsável são inicializados com os valores do último exame realizado. Mas você poderá escolhê-lo a partir da lista disponível no botão ▼. Caso o nome seja diferente do desejado ou inexistente na lista, clique em  (*Edita Médicos Responsáveis ou Médicos Solicitantes*) para cadastrá-lo ou editá-lo. Para maiores detalhes, consulte *Cadastros de Médicos Responsáveis e de Médicos Solicitantes* (página 48). As opções do campo *Forma de pagamento* são: *Particular*, *Convênio*, *Gratuito* ou *Cortesia*. Se a forma de pagamento selecionada for “Convênio”, é obrigatória a seleção da empresa

10. Noções básicas do programa

conveniada no campo *Convênio* e, opcionalmente, o preenchimento do *Número da guia* (estes campos só estarão habilitados se a forma de pagamento for Convênio).

O campo *Medicações em uso* pode ser preenchido diretamente ou se pode usar o botão  (*Inserir Frases*) para inserir frases previamente cadastradas. Para mais detalhes, consulte *Inserindo frases pré-programadas*, página 95. No campo *Observações* pode ser digitado um texto livre, descrevendo eventuais sinais e/ou sintomas não constantes da Anamnese padrão do programa.

As guias *Indicações*, *História Clínica* e *Fatores de Risco* (não disponíveis em exames de Eletrocardiograma) são autoexplicativas e visam acelerar a Anamnese, pois minimizam a necessidade de digitação, bastando clicar nos itens pertinentes. Caso algum item não esteja em uma das listas, o programa permite o acréscimo de novos itens, bastando clicar no botão  (*Novo Item*). Veja mais detalhes em *Cadastro de itens da Anamnese*, página 52.

Uma vez terminada a Anamnese, clique no botão  (*Traçados*) para ir para a tela de ECG (basal em caso de *Ergometria*). Se por alguma razão não desejar prosseguir com o exame, clique em  (*Grava e Sai*) para gravar as informações da Anamnese e retornar à tela principal do programa. O botão  (*Cancela*) aborta a edição da ficha de Anamnese, descartando adições e/ou edições eventualmente feitas.

Nos exames de esforço, fica disponível a geração de uma declaração de Consentimento informado, conforme modelo padrão do DERC-SBC, que pode ser editado pelo usuário.




Se você escolher *Convênio* como *forma de pagamento* mas não escolher a empresa *previamente cadastrada* o botão *Traçados* estará inacessível. Consulte *Cadastro de convênios*, página 51.

10.5. AS TELAS DE MONITORAÇÃO DE SINAIS


As telas de *monitoração de sinais* são usadas durante a execução dos exames propriamente ditos, após a edição da anamnese. Nelas, os sinais eletrocardiográficos dos pacientes são exibidos em tempo real, sendo, portanto as mais importantes na realização de um determinado exame, oferecendo ao usuário o controle da sua evolução do exame e a captura/impressão dos sinais.

A tela de monitoração em *ECGs* é semelhante à tela na etapa de ECG basal em Testes de esforço, com pequenas diferenças. As telas de monitoração no esforço e recuperação são específicas para Testes de esforço.

Seguem figuras mostrando os tipos básicos de tela de monitoração:

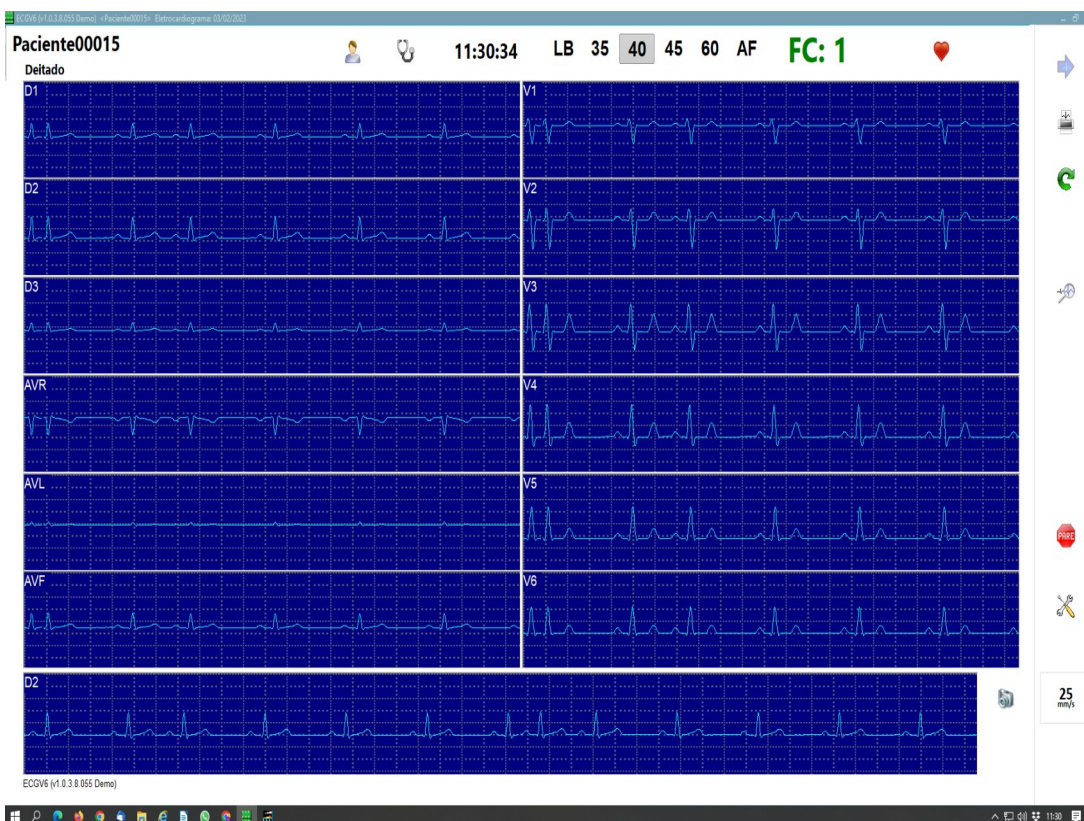

Tela de monitoração de um *Eletrocardiograma*.

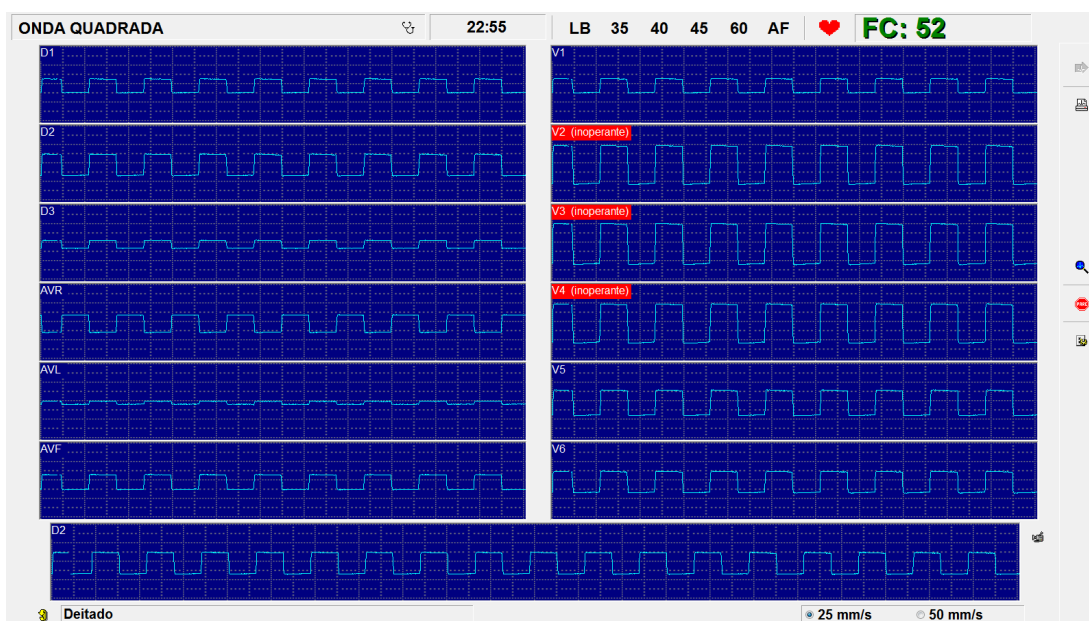

Indicações de equipamento inoperante

Tela de monitoração no esforço de uma *Ergoespirometria*

A seguir, são descritas as funções dos principais botões nas telas de monitoração de sinais. Algumas destas funções serão detalhadas nos capítulos de cada exame, nas seções sobre

10. Noções básicas do programa

como iniciar um novo exame. Outras, serão detalhadas no capítulo *Recursos Adicionais* na página 84. Alguns botões podem estar inacessíveis, com aspecto “desbotado” porque não se aplicam a todos os contextos.

10.5.1. Botões comuns em todos os tipos de exames



Use este botão para **Iniciar Monitorização** do sinal eletrocardiográfico.

Tecla de acesso rápido: **[F2]**



É usado para **Registrar Sinal** corrente na tela que, dependendo da velocidade de registro (25 ou 50mm/s), armazena os últimos 3,4 ou 1,7 segundos do sinal, respectivamente. O programa poderá solicitar uma PA (o campo será mostrado com o último valor registrado); digite o valor medido e dê um clique em (**OK**). Caso não queira registrar a PA, dê um clique em (**Cancela**). Se a impressão estiver habilitada, o registro será impresso assim que for processado. Tecla de acesso rápido correspondente: **[F3]**



Zoom de Sinal - ao clicar neste botão, o cursor do mouse se transformará numa pequena mão; clique em seguida sobre a derivação desejada para vê-la ampliada em uma nova janela com marcadores para medições manuais. Para maiores detalhes, consulte *Zoom de Sinal*, página 47.



Interromper Teste – Auto-explanatório: use este botão com cuidado, apesar de haver uma confirmação antes do encerramento efetivo do teste.

Tecla de acesso rápido correspondente: **[F8]**



Utilizado para acessar as **Configurações** durante o exame. As configurações disponíveis variam conforme a evolução do exame.

Congelar a Derivação Longa – Serve para capturar a derivação longa, mostrando os últimos 36 segundos de sinal. Para ver todo o sinal, use a barra de rolagem.

Tecla de acesso rápido correspondente: **[F3]**

Com a derivação longa congelada, use os botões:



(*Registrar Derivação Longa*) para registrá-la (tecla de acesso rápido **F4**)



(*Descartar Derivação Longa*) para descartá-la.

LB Ativa ou desativa o **Filtro de Linha de Base**.

35 Ativa ou desativa o **Filtro de Ruído Muscular Forte** (atenua os sinais com frequências acima de 35 Hz)

40 Ativa ou desativa o **Filtro de Ruído Muscular Médio** (atenua os sinais com frequências acima de 40 Hz)

45 Ativa ou desativa o **Filtro de Ruído Muscular Suave** (atenua os sinais com frequências acima de 45 Hz)

60 Ativa ou desativa o **Filtro de Interferência da Rede Elétrica** (atenua os sinais na frequência de 60 Hz)

AF Ativa ou desativa o **Filtro de Altas frequências** (atenua os sinais com frequências acima de 100 Hz)



Ativa ou desativa o aviso sonoro de **Deteção do QRS**



Utilizado para **Alterar a Manobra**.

Disponível somente na tela de monitoração de ECG em repouso.



Permite **Editar/Visualizar a Anamnese**, mesmo nas telas de traçados.


25
mm/s

50
mm/s


Utilizado para alterar a **Velocidade** do traçado.

10.5.2. Outras funções na tela de monitoração

Mudança de Escala: para mudar a escala de uma derivação, posicione o mouse sobre a mesma, dê um clique com o botão *direito* do mouse e selecione a opção desejada no menu abaixo (onde N é normal, $Nx2$ é o dobro da normal e $N/2$ é a metade da normal):

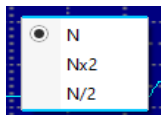

Mudança de derivação: se estiverem sendo visualizadas 3 ou 6 derivações, o menu descrito no parágrafo anterior permitirá, além da troca de escala, a troca da derivação associada a uma janela de sinal. Desta forma, para fazer uma *Mudança de Derivação*, posicione o mouse sobre a mesma, dê um clique com o botão *direito* do mouse e selecione a opção desejada no menu, semelhante a este:

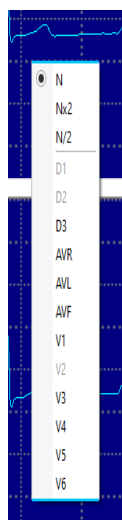


O menu acima também está disponível para troca de escala e da derivação na janela de derivação longa no modo de operação “12 derivações”.




As escalas são individuais por derivação e são indicadas no próprio nome da derivação, tanto na tela como nas impressões. Exemplos: D1x2, V3/2.

Destaque de derivação: se desejar chamar a atenção para alguma derivação em particular, dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela que, assim, passará a ser desenhada com a cor de destaque definida nas configurações do programa. Para retornar à cor normal, dê outro duplo clique sobre a derivação destacada. Ao se registrar o traçado com uma derivação destacada, sua impressão poderá ser em outra cor, diferente daquela usada na tela. Veja como alterar as cores de destaque na tela e nas impressões em “Guia Aparência” (página 66).

10.6. A TELA DE VISUALIZAÇÃO DE TRAÇADOS

No decorrer natural de um exame, após as etapas de monitoração do sinal, quando o exame é interrompido, o programa exibe a *Tela de Visualização de Traçados*, na qual o usuário pode visualizar todos os registros efetuados para, em seguida, editar o laudo. Esta tela pode também ser acessada através do botão  (*Traçados*) da barra de ferramentas, quando um exame previamente feito tiver sido aberto.

Além das funções básicas de visualização e impressão dos registros seja com os filtros originais, seja com novos, outras funções básicas são: *Zoom de Sinal* com medições manuais, apagamento de registros e exportação de traçados para arquivo de imagem nos formatos BMP ou JPG. Através desta tela, também são acessados recursos mais avançados do programa, como, por exemplo, o *Módulo de Medidas*, *Registro Contínuo* e *Carteira de ECG*. Detalhemos estas funções mais adiante, no capítulo *Recursos Adicionais*, página 84.

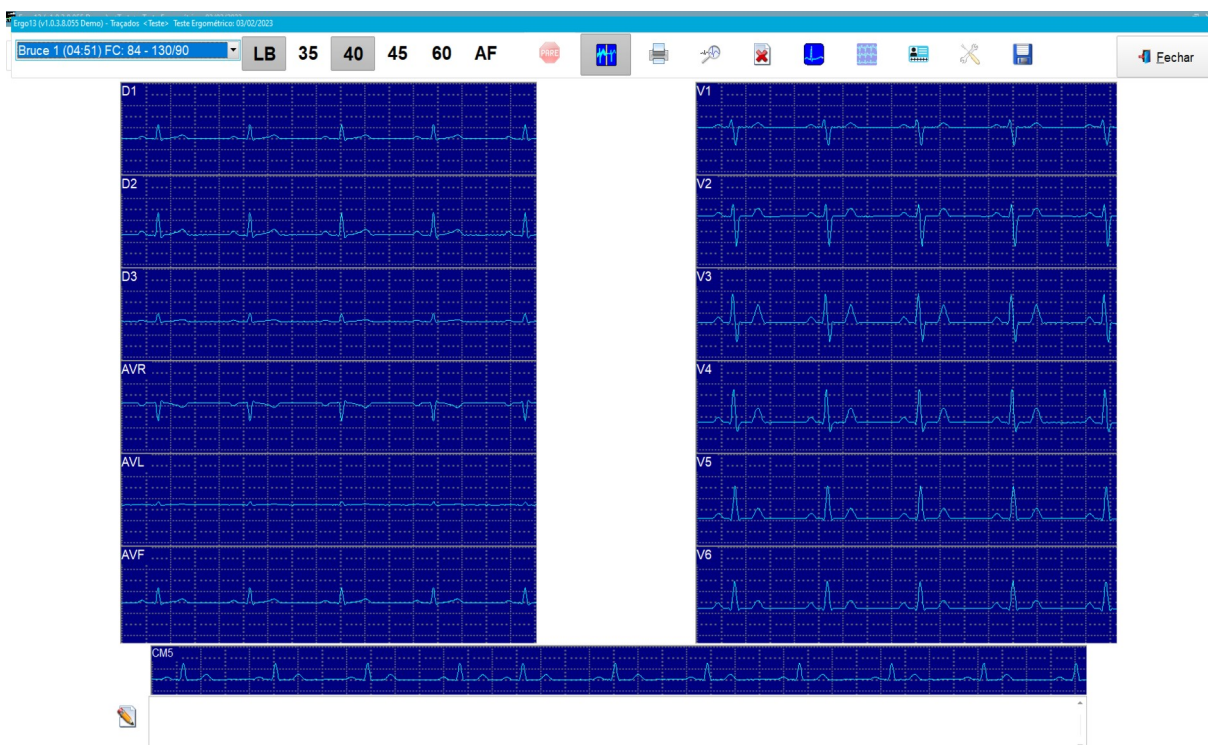

A lista a seguir resume os principais botões disponíveis nesta tela, que é comum a todos os tipos de exames.

- LB** Ativa ou desativa o **Filtro de Linha de Base**.
- 35** Ativa ou desativa o **Filtro de Ruído Muscular Forte** (atenua os sinais com frequências acima de 35 Hz)
- 40** Ativa ou desativa o **Filtro de Ruído Muscular Médio** (atenua os sinais com frequências acima de 40 Hz)
- 45** Ativa ou desativa o **Filtro de Ruído Muscular Suave** (atenua os sinais com frequências acima de 45 Hz)
- 60** Ativa ou desativa o **Filtro de Interferência da Rede Elétrica** (atenua os sinais na frequência de 60 Hz)
- AF** Ativa ou desativa o **Filtro de Altas frequências** (atenua os sinais com frequências acima de 100 Hz)



Imprime Traçado Corrente visualizado.



Filtros Originais - Se ligado, o programa mostrará os registros com os filtros que estavam habilitados originalmente. Se desligado, serão usados os filtros correntemente ativos na Tela de Visualização de Traçados. Como os registros são gravados sem nenhum filtro, esta opção permite que o usuário possa verificar por si mesmo o efeito dos diversos filtros sobre o sinal.



Zoom de Sinal - ao clicar neste botão, o cursor do mouse se transformará numa pequena mão; clique em seguida sobre a derivação desejada para vê-la ampliada em uma nova janela com marcadores para medições manuais. Para maiores detalhes, consulte [Zoom de Sinal](#), página 47.



Apaga o registro corrente. Este botão deve ser usado com cuidado, pois uma vez apagado um registro não será possível recuperá-lo.



Abre o **Módulo de Medidas** com base no registro corrente (não está disponível sobre os registros de derivação longa e contínuo). Veja como utilizar este recurso em [Módulo de Medidas](#), página 84.



Abre o **Registro Contínuo de ECG**. Veja como utilizar este recurso em Registro contínuo de ECG, página 97.



Abre a **Carteira de ECG** com base no registro corrente (não está disponível sobre o registro de derivação longa). Veja como utilizar este recurso em Carteira de ECG, página 100.



Acesso às **Configurações** do exame corrente. Possibilita definir se o registro contínuo do exame corrente será armazenado permanentemente ou descartado. Veja mais detalhes abaixo e em Registro contínuo de ECG, página 97.



Imprime Registro em Arquivo (BMP/JPG). Usado para exportar o registro corrente em arquivo de imagem, facilitando a troca de informações com colegas, via internet. Veja mais detalhes em Exportação para arquivo de imagem, página 104.




Quando disponível, abre a **Edição de Laudo** ou, se o exame for um ECG Convencional, a **Edição das Conclusões Finais**. Dependendo da configuração do programa, ao clicar neste botão o registro contínuo, que ocupa grande espaço em disco, poderá ser descartado.



Quando disponível, serve para **Fechar** a tela de *Visualização de traçados*.




Quando disponível, abre uma janela para **Editar Comentário** no registro corrente (não está disponível para registro do tipo *padrão*).

Quando habilitado, o botão  (**Configurações**) acessa a opção *Manter o registro contínuo de ECG*, como na figura a seguir. Por padrão, o programa não mantém o registro contínuo, que é descartado quando se fecha a tela de visualização de registros. No entanto, o

10. Noções básicas do programa

programa pode ser configurado para mantê-lo sempre. Para maiores detalhes sobre este recurso, consulte Registro contínuo de ECG, página 97.

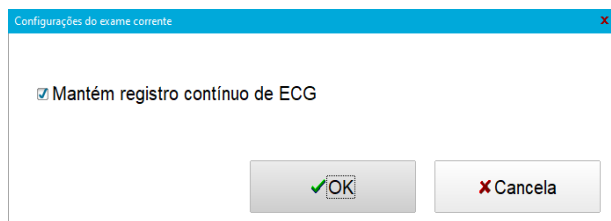


O registro contínuo de ECG consome espaço no disco. Portanto, mantê-los continuamente poderá sobrecarregar seu computador. Veja como eliminá-los em *Apagando exames* (página 73).

10.7. JANELA EDIÇÃO DAS CONCLUSÕES FINAIS DO LAUDO

A janela *Edição das Conclusões Finais* do laudo, mostrada na figura abaixo, faz parte de todos os tipos de exames. Em *ECGs*, ela surgirá ao clicar em *Laudos* na tela de visualização de traçados. Em *Testes Ergométricos*, ela surgirá ao finalizar a *Edição do Laudo*. Você também poderá abri-la através do botão (*Laudos*) na tela principal do programa quando um ECG com ao menos um registro estiver aberto.

O editor das conclusões finais é semelhante aos editores de texto comuns encontrados no Windows, que permite a edição de textos formatados utilizando recursos como negrito, itálico, sublinhado, alinhamento à esquerda, à direita, centralização, etc.

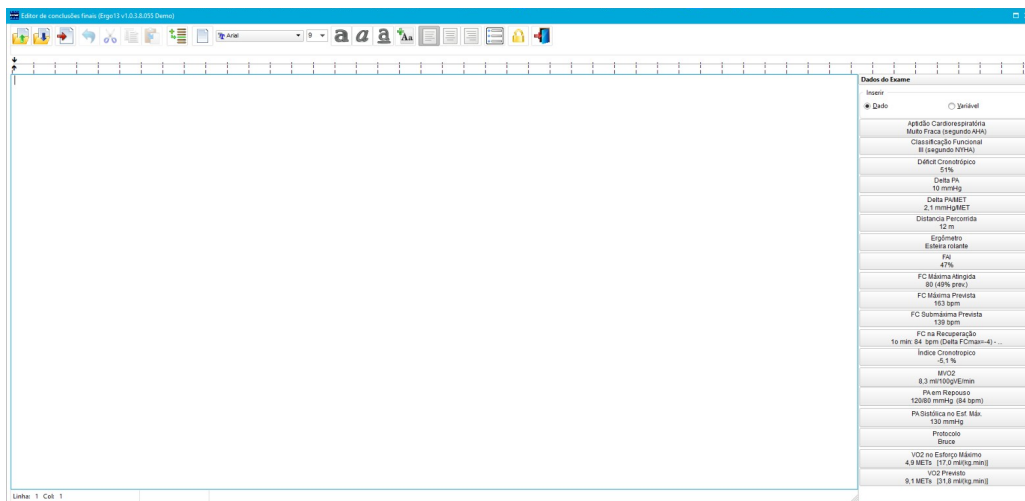

A seguir são mostrados as funções dos botões desta janela:



Usado para **Abri Modelo**. Para mais detalhes veja *Recursos avançados na edição das conclusões finais do laudo*, página 101.



Usado para **Salvar Modelo**. Para mais detalhes veja *Recursos avançados na edição das conclusões finais do laudo*, página 101.



Importar Itens: pode ser usado para *Carregar o último laudo* ou para *Inserir Frases* pré-programadas. Para este recurso veja *Inserindo frases pré-programadas*, página 95.



Desfazer: desfaz, se possível, a última alteração feita no texto.



Recortar: recorta o texto selecionado para *Área de Transferência* do Windows.



Copiar: copia o texto selecionado para a *Área de Transferência* do Windows.



Colar: cola o objeto da *Área de Transferência* do Windows.



Controles de formatação de texto como: **Negrito**, *Itálico*, Sublinhado, fonte, tamanho e cor de caracteres, alinhamento de parágrafo e inserção de marcadores de itens





Usado para **Sair** da janela de *Edição das Conclusões Finais* do laudo. Se o texto tiver sido alterado, o programa perguntará se deseja salvar modificações feitas.




Permite **"fechar" um laudo** mediante senha previamente cadastrada junto com a assinatura digitalizada ou certificado digital do médico responsável pelo laudo. ATENÇÃO: exames "fechados" só poderão ser editados com a senha cadastrada. Ver 11.1 - Cadastros de Médicos Responsáveis e de Médicos Solicitantes (pg. 48).

10.8. ZOOM DE SINAL

Quando desejar efetuar um *zoom* no sinal, clique no botão  (*Zoom de Sinal*) nas janelas em que ele estará disponível e em seguida clique sobre a derivação desejada.

Na tela como na figura a seguir podemos ver o sinal de cada derivação, ampliá-lo e fazer medidas no mesmo. Para trocar de derivação, basta apertar o botão correspondente no seletor de derivações. Para ampliar uma parte do sinal, posicione o mouse sobre o canto superior esquerdo da área a ser ampliada, mantenha o botão esquerdo do mouse apertado enquanto o mesmo é movido para baixo e para a direita. Enquanto botão do mouse estiver apertado, será desenhado um retângulo delineando a área a ser ampliada assim que o botão for liberado. Para movimentar todo o sinal durante o zoom, basta manter o botão **direito** do mouse apertado enquanto o mesmo é movido na direção desejada. Para voltar à ampliação original use o botão  (*Escala Original*). Para fazer medições, basta arrastar os marcadores amarelos para as posições desejadas e o resultado será mostrado no canto superior esquerdo da janela.

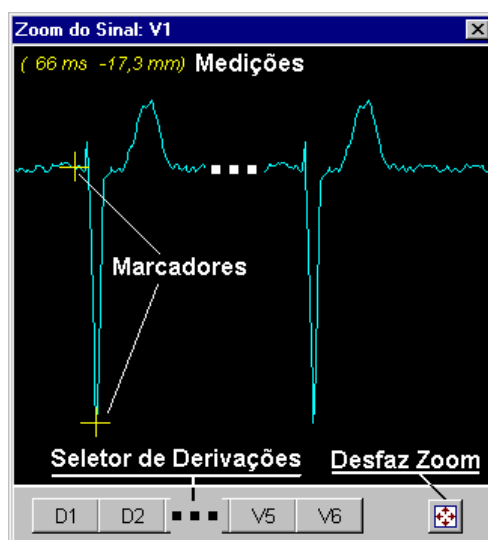

11. CADASTROS E CONFIGURAÇÕES GERAIS



Descreveremos a seguir, outros parâmetros configuráveis do programa, também acessíveis através do menu *Configurações*.

11.1. CADASTROS DE MÉDICOS RESPONSÁVEIS E DE MÉDICOS SOLICITANTES

As listas de médicos responsáveis e de médicos solicitantes são independentes. Um médico cadastrado na lista de responsáveis não estará disponível na lista de solicitantes, e vice-versa. Você poderá consultar, alterar ou cadastrar os nomes das listas abrindo o menu *Configurações* ⇒ *Cadastro* ⇒ *Médicos Responsáveis* ou *Médicos Solicitantes*. Estes cadastros podem ser feitos também durante preenchimento da Anamnese ao se fazer um novo exame (veja detalhes em *Dados da Anamnese*, página 39).

A figura a seguir mostra a janela com a lista de médicos responsáveis. A janela com a lista de médicos solicitantes é praticamente idêntica.


Nome:	CRM:	Ativo:
Dra. (médica responsável)	<456789>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. (médico responsável)	<123456>	<input type="checkbox"/>

Para fazer um cadastro de um médico, clique no botão  (*Novo*). Na janela de cadastro, mostrada abaixo, clique no botão ▼ do campo *Título* e você poderá escolher entre *Dr.*, *Dra.*, *Enfo.* ou *Enfa.* Preencha os campos *Nome* e *CRM*, sendo que apenas o campo *Nome* é obrigatório. Confirme o cadastro clicando no botão  (*OK*).

Se for atribuído um arquivo com a assinatura digitalizada, o programa pedirá uma senha duas vezes para confirmação. Essa senha serve para “fechar” (proteger com senha) um laudo e incluir nele a assinatura. ATENÇÃO: laudos “fechados” só poderão ser editados mediante esta senha, portanto, tome muito cuidado ao criá-la.






Uma vez cadastrado o nome de um médico, não será possível apagá-lo da lista, pois, eventualmente, pode ser necessária reimpressão de exames feitos por qualquer um dos médicos que realizaram exames no programa. Para que um determinado nome não apareça na lista de médicos durante a Anamnese, basta desmarcar a caixa *Ativo*, na lista de médicos *Responsáveis e/ou Solicitantes*, mostrada acima.

Para editar o cadastro de algum médico, escolha-o na lista e depois clique no botão  (*Editar*). Deste modo você poderá alterar quaisquer campos daquele médico.




Nunca use a edição para “cadastrar” um novo médico por cima de outro existente, mesmo que este esteja inativo pois, para cada médico cadastrado é criado um código interno que é gravado junto com os dados de cada exame. Se isso for feito, o programa achará que os exames feitos pelo médico inativo foram feitos pelo recém “cadastrado”.

Para confirmar quaisquer adições e/ou edições feitas na lista da janela *Cadastro de médicos*, clique no botão  (*OK*), caso contrário, isto é, se clicar em  (*Cancela*) ou em , todas as alterações serão perdidas.

11.2. CADASTRO DE PROFISSÕES

Este cadastro estará preenchido com a lista de profissões do IBGE mas novas profissões poderão ser cadastradas pelo próprio usuário, geralmente durante o preenchimento dos dados do paciente, ao se fazer um exame (veja como em *Dados do Paciente*, página 38). Contudo, você poderá cadastrá-las previamente através do menu *Configurações* ⇒ *Cadastro* ⇒ *Profissões*. Acessando este recurso, seja por meio do menu ou no momento em que se está cadastrando o paciente, você abrirá uma janela semelhante à da figura a seguir.

11. Cadastros e Configurações gerais

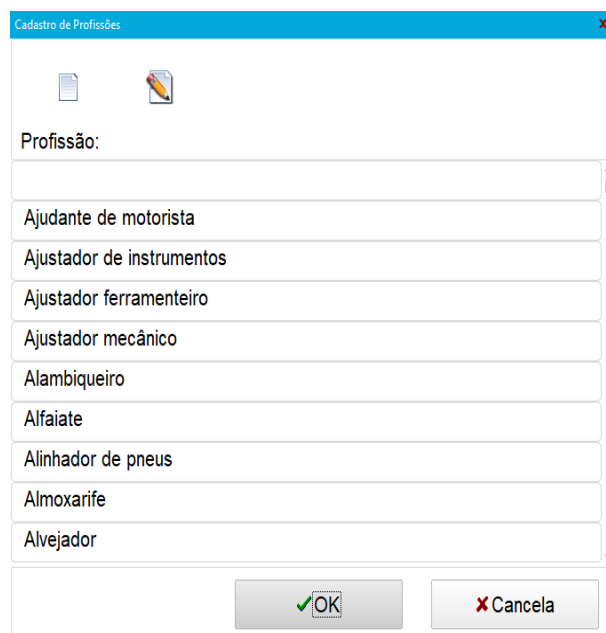

Você poderá cadastrar uma profissão ao clicar no botão (*Novo*). Digite o nome da nova profissão na janela *Descrição da profissão*, como na figura a seguir e confirme clicando no botão (*OK*).


Para editar alguma profissão, escolha-a na lista e depois clique no botão (*Editar*). Para confirmar as adições e/ou edições feitas na lista na janela *Cadastro de Profissões* clique no botão (*OK*).




Por razões semelhantes às explicadas nas notas do item *Cadastros de Médicos Responsáveis e de Médicos Solicitantes* (página 48), não é possível apagar uma *profissão*, portanto tenha cuidado ao cadastrá-las. Também não é recomendável editar uma profissão existente na intenção de cadastrar outra.

Para confirmar quaisquer adições e/ou edições feitas na lista da janela *Cadastro de profissões*, clique no botão (*OK*), caso contrário, isto é, se clicar em (*Cancela*) ou em todas as alterações serão perdidas.



11.3. CADASTRO DE CONVÊNIOS

O cadastro de convênios é feito por tipo de exame. Assim, eles são organizados independentemente em exames de *ECG*, de *Ergometria* e de *Ergoespirometria*. Estes cadastros podem ser realizados previamente através do menu *Configurações* ⇒ *Cadastro* ⇒ *Convênios* ⇒ *ECG* ou *Ergometria* ou *Ergoespirometria* ou preenchidos no momento do exame, clicando em  ao lado do campo de escolha de Convênios.

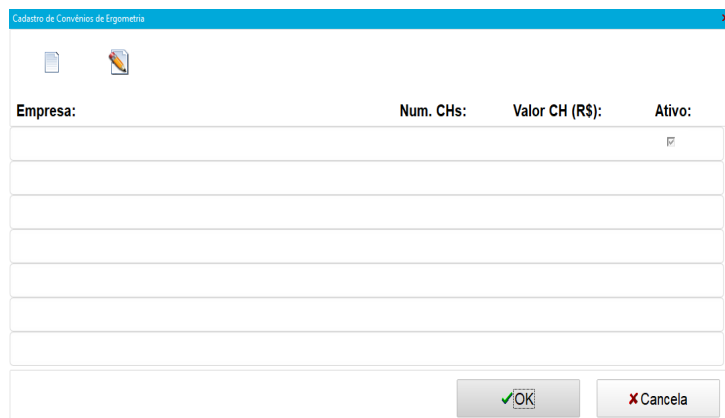A janela a seguir mostra o cadastro de *Convênios de ECG*, que é idêntica para os demais tipos de exames.




Empresa:	Num. CHs:	Valor CH (R\$):	Ativo:
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Para cadastrar um novo convênio, clique no botão  (*Novo*). Digite o nome da *Empresa*, o *Número de CHs* e o *Valor CH* (em *R\$*, com até quatro casas decimais), sendo estes dois últimos campos opcionais (podem ser deixados com zero). O faturamento de um exame por um determinado convênio é calculado multiplicando-se o número de CHs pelo seu valor. Portanto, se estes campos não forem preenchidos, os dados gerados pelos relatórios administrativos ficarão comprometidos. Através destes relatórios, pode-se imprimir o faturamento do hospital, clínica ou consultório por forma de pagamento, por tipo de convênio, por médico responsável ou por solicitante (ver *Relatórios administrativos*, página 94). Para confirmar as alterações feitas, clique no botão  (*OK*).


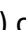



Por razões semelhantes às explicadas nas notas do item *Cadastros de Médicos Responsáveis e de Médicos Solicitantes* (página 48), uma vez cadastrado um convênio, não é possível apagá-lo da lista. Para que um determinado convênio não apareça na lista durante a Anamnese, basta desmarcar a caixa *Ativo*, na lista, mostrada acima.

Para editar o cadastro de algum convênio, escolha-o na lista e depois clique no botão  (*Editar*).




As alterações em *número de CHs* e *valor de CH* de algum convênio não implicam em alterações de faturamento nos exames feitos anteriormente às mudanças. Portanto, ficam valendo os valores que vigoravam quando se fizeram aqueles exames.



Para confirmar quaisquer adições e/ou edições feitas na lista da janela *Cadastro de convênios*, clique no botão  (*OK*), caso contrário, isto é, se clicar em  (*Cancela*) ou em  todas as alterações serão perdidas.

11.4. CADASTRO DE ITENS DA ANAMNESE

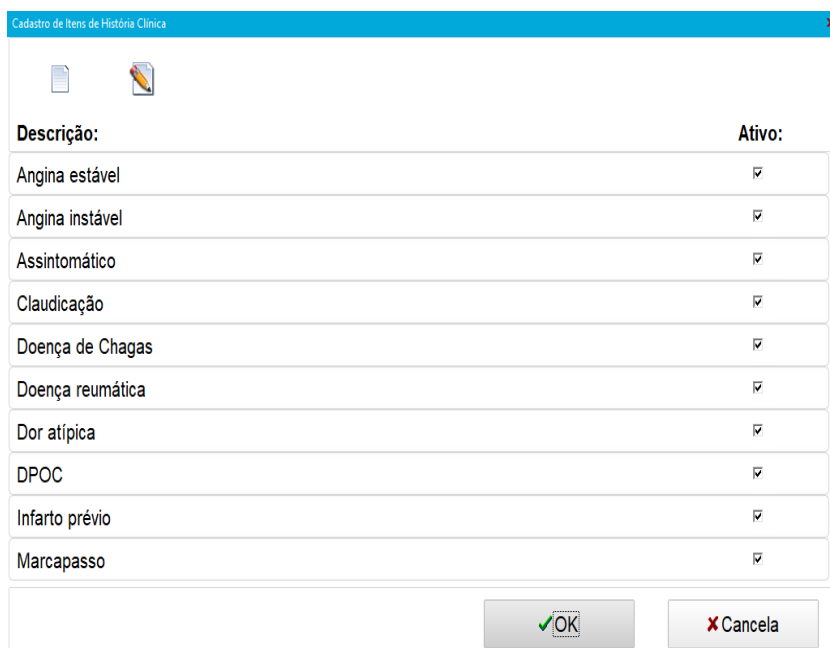As listas de *Fatores de Risco*, *História Clínica* e *Indicações* estão preenchidas com as sugestões do Consenso Brasileiro de Ergometria e suas revisões e cobrem a grande maioria das necessidades da Anamnese. No entanto, caso algum item esteja faltando, é possível adicioná-lo nessas listas. Para tal, vá ao menu *Configurações* ⇒ *Cadastro* e, conforme sua necessidade, selecione *História Clínica*, *Fatores de Risco* ou *Indicações*. O processo segue a mesma lógica do cadastro de médicos e convênios, descritos anteriormente. Surgirá a seguinte janela:



Descrição:	Ativo:
Angina estável	<input checked="" type="checkbox"/>
Angina instável	<input checked="" type="checkbox"/>
Assintomático	<input checked="" type="checkbox"/>
Claudicação	<input checked="" type="checkbox"/>
Doença de Chagas	<input checked="" type="checkbox"/>
Doença reumática	<input checked="" type="checkbox"/>
Dor atípica	<input checked="" type="checkbox"/>
DPOC	<input checked="" type="checkbox"/>
Infarto prévio	<input checked="" type="checkbox"/>
Marcapasso	<input checked="" type="checkbox"/>

Para cadastrar um novo item clique no botão  (*Novo*). Digite a descrição do novo item e confirme com o botão  (*OK*).



Por razões semelhantes às explicadas nas notas do item *Cadastros de Médicos Responsáveis e de Médicos Solicitantes* (página 48), uma vez cadastrado um novo item de *Fator de Risco*, de *História Clínica* ou de *Indicação* para o exame, não é possível apagá-lo da lista. Para que um determinado item não apareça na respectiva lista durante a Anamnese, basta desmarcar a caixa *Ativo* na lista mostrada acima.


Para editar um item, escolha-o na lista e depois clique no botão  (*Editar*).



Se for editar o conteúdo de um item já existente, lembre-se que o mesmo já pode ter sido usado em exames feitos anteriormente, de forma que apenas a grafia ou forma de expressão pode ser modificada, e nunca o conteúdo ou significado do item. Por exemplo: "Diabetes Mellitus" pode ser alterado para "Diabetes" e nunca para, por exemplo "Doença de Chagas", sob pena de alterar de forma significativa a anamnese dos exames já feitos por pacientes portadores de Diabetes Mellitus.


Para confirmar quaisquer adições e/ou edições feitas na lista da janela *Cadastro de itens*,


clique no botão ✓ (OK), caso contrário, isto é, se clicar em ✗ (Cancela) ou em ✗, todas as alterações serão perdidas.

Você poderá acrescentar itens também durante a edição da Anamnese, mas não poderá editá-los (veja detalhes em *Dados da Anamnese*, página 39). Basta dar um clique no botão  (Novo Item) e, neste caso, a janela para digitação da descrição do item é aberta diretamente, sem que a lista completa seja mostrada, conforme figura abaixo. Ao clicar em ✓ (OK), o item é automaticamente adicionado na lista apropriada.

11.5. COR DA PELE

Por padrão, o programa oferece quatro opções de cores de pele, que podem ser usadas no cadastro dos *Dados do Paciente* (página 38): *Amarela*, *Branca*, *Morena* e *Negra*. Se desejar alterá-las para outros nomes, abra o menu *Configurações* ⇨ *Cor da Pele* e uma janela semelhante ao da figura a seguir será aberta.

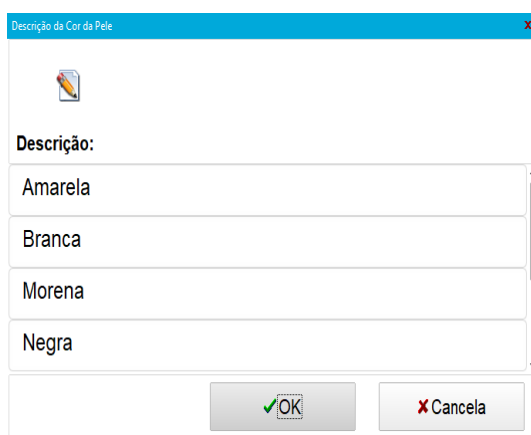

Escolha a cor desejada na lista e clique no botão  (*Editar*) para abrir a janela de *edição da cor*, conforme figura a seguir. Digite a descrição desejada e confirme com o botão ✓ (OK).

Para confirmar quaisquer adições e/ou edições feitas na lista da janela *Descrição da Cor da Pele*, clique no botão ✓ (OK), caso contrário, isto é, se clicar em ✗ (Cancela) ou em ✗ todas as alterações serão perdidas.




O mesmo cuidado descrito na edição dos itens de Anamnese deve ser tomado aqui: apenas a grafia ou forma de expressão da *Cor da Pele* pode ser alterada e nunca seu conteúdo ou significado, sob pena de alterar os dados de pacientes previamente cadastrados como sendo de uma determinada cor. Por exemplo, pode-se alterar "Negra" para "Melanoderme", mas nunca para, por exemplo, "Faioderme".

11.6. MANOBRAS



O programa oferece, por padrão, quatro opções de manobras/posturas para o paciente que são usadas nas telas de monitoração de sinais em repouso: *Deitado*, *Sentado*, *Em Pé* e *Hiperventilando*. Se desejar alterá-las para outros nomes ou adicionar outra manobras, abra


11. Cadastros e Configurações gerais

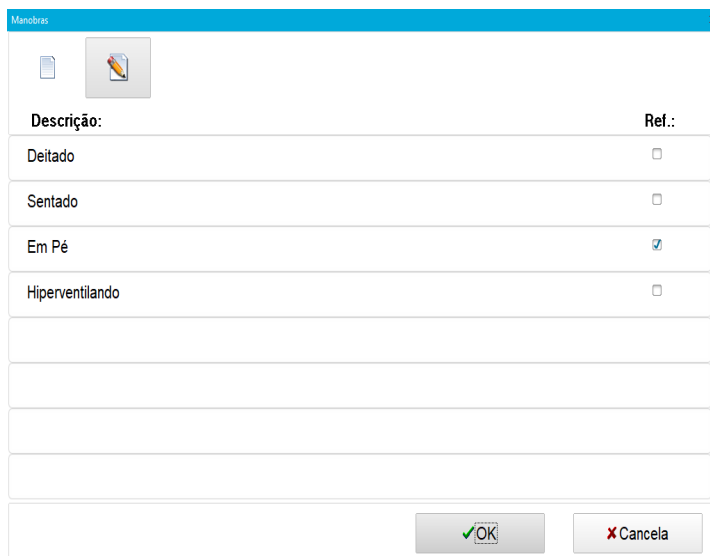o menu *Configurações* ⇒ *Manobras* e uma janela semelhante ao da figura a seguir será aberta.





Descrição:	Ref.:
Deitado	<input type="checkbox"/>
Sentado	<input type="checkbox"/>
Em Pé	<input checked="" type="checkbox"/>
Hiperventilando	<input type="checkbox"/>

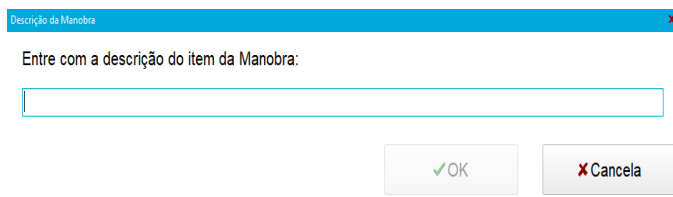Clique no botão  (*Novo*) para criar uma manobra e a janela conforme figura a seguir será aberta. Escreva a descrição da nova manobra e confirme com o botão  (*OK*).






Entre com a descrição do item da Manobra:

Para alterar alguma manobra, escolha-a na lista e clique no botão  (*Editar*) para abrir a janela de *Descrição da manobra*, conforme figura anterior. Confirme com o botão  (*OK*).



Por razões semelhantes às explicadas nas notas do item *Cadastros de Médicos Responsáveis e de Médicos Solicitantes* (página 48), uma vez cadastrada uma nova manobra, não é possível apagá-la da lista.

Deve-se escolher uma única manobra/postura para servir como *Referência de PA* basal para o cálculo do *Delta PA*. Para isso, basta marcar a respectiva caixa na coluna *Ref.*

Para confirmar quaisquer adições e/ou edições feitas na janela *Manobras*, clique no botão  (*OK*), caso contrário, isto é, se clicar em  (*Cancela*) ou em , todas as alterações serão perdidas.

11.7. CADASTRO DE FRASES PRÉ-PROGRAMADAS

As frases pré-programadas são um recurso poderoso que visa facilitar a edição do texto em determinados lugares do programa. Este recurso será citado ao longo deste manual e, para mais detalhes, veja *Inserindo frases pré-programadas* (página 95). Você poderá cadastrá-las somente através do menu *Configurações* ⇒ *Frases pré-programadas*.

A figura a seguir mostra uma janela contendo um exemplo de *lista de frases* que são organizadas em *grupos*, no caso, o grupo *“Carteira de ECG”*. Se quiser ordená-las

alfabeticamente, basta selecionar a caixa no canto inferior esquerdo. Se esta caixa não estiver marcada, as frases serão mostradas por ordem de criação

Selecione o grupo a ser alterado clicando no botão ▾. O programa oferece dois grupos pré-configurados: *Medicamentos* e *Carteira de ECG*, que somente estarão disponíveis, respectivamente por ocasião da Anamnese e impressão de Carteira de ECG. Os demais grupos criados pelo usuário estarão disponíveis em qualquer situação onde o recurso *Frases Pré-Programadas* estiver habilitado.

Para criar um novo grupo de frases, clique no botão ➕ (Novo grupo). Dê um nome ao seu grupo na janela semelhante ao da figura a seguir.


Dentro do grupo escolhido, você poderá criar quantas frases desejar, bastando clicar no botão 📄 (Novo). Digite a frase no campo da janela semelhante ao da figura a seguir.






Não é possível apagar uma *frase*, portanto tenha cuidado ao cadastrá-las.

Para editar alguma frase, escolha-a na lista de seu grupo e clique no botão ✎ (Editar). Para

11. Cadastros e Configurações gerais


remover um grupo de frases, escolha-o e, em seguida, clique no botão  (*Remove grupo*). Somente é possível remover grupos definidos pelo usuário.

Para confirmar quaisquer adições e/ou edições feitas na janela *Frases pré-programadas*, clique no botão  (*OK*), caso contrário, isto é, se clicar em  (*Cancela*) ou em  todas as alterações serão perdidas.

11.8. IMPRESSÃO

No menu *Configurações* você poderá habilitar a *Impressão Automática*. Se ela estiver marcada com um “✓” é porque está ativa. Assim, as impressões de registros, *Anamnese* e *Laudos* serão automáticas na medida em que são efetuados nos exames. Você poderá desabilitar esta opção durante o exame. Mais detalhes a seguir, nas seções que mostram como iniciar um exame.

Para configurar sua impressora ou selecionar outra, acesse o menu *Configurações* ⇨ *Impressora* e a janela *Configurar impressão*, mostrada abaixo, será aberta.

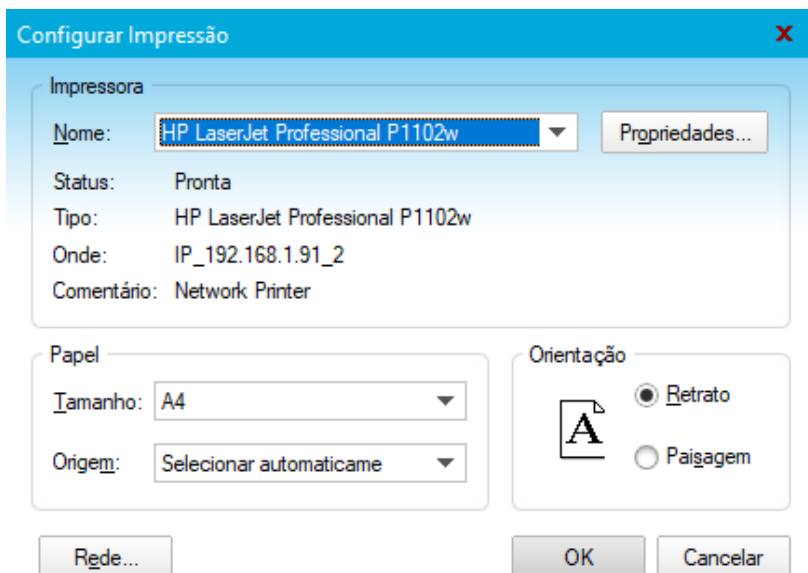

Para selecionar outra impressora, clique no botão ▼. Para configurar opções de sua impressora, dê um clique no botão *Propriedades*. Pode-se ainda alterar o *tamanho*, *origem* e *orientação* do papel. Recomenda-se trabalhar com o tamanho A4.



Toda vez que você entrar no programa será usada a impressora definida como padrão por seu Windows.

12. CONFIGURANDO O ECGV6


Esta seção descreve as opções de configuração. Estas opções são acessíveis através do menu *Configurações*, item *Opções*.

12.1. GUIA IMPRESSÃO

Cabeçalho: configure as 3 linhas que serão impressas no cabeçalho das folhas *Anamnese*, *Laudo*, *Resumo do Exame* e *Carteira de ECG* (veja algumas destas páginas nos anexos *Impressão da Carteira de ECG* e *Erro: Origem da referência não encontrada*, páginas 129 e *Erro: Origem da referência não encontrada*). O texto destas linhas é livre, mas normalmente a *Linha 1* contém o nome da clínica, hospital ou médico (esta linha é impressa também no rodapé de todas as folhas, inclusive nas de traçados); a *Linha 2* é comumente usada para descrever a especialidades e/ou exames disponíveis para os pacientes; a *Linha 3* pode conter, por exemplo, os dados para contato (endereço, telefone, fax, e-mail, etc.). Todas as linhas podem ser formatadas individualmente, clicando no botão **Aa** (*Fonte*). As linhas podem ficar em branco, sem nada escrito.

Logotipo de Impressão (Bitmap): possibilita escolher um arquivo de imagem no formato Bitmap (BMP) para ser usado como logomarca que será impressa à esquerda do cabeçalho de impressão (veja alguns exemplos nos anexos *Impressão da Carteira de ECG* e *Erro: Origem da referência não encontrada*, páginas 129 e *Erro: Origem da referência não encontrada*).


12. Configurando o ECGV6

Pode-se escrever a localização do arquivo diretamente no campo *Arquivo* ou usar o botão  (*Procurar Arquivo*) para encontrá-lo através da janela *Seleciona figura do logotipo*. Os campos *Largura* e *Altura* definem o tamanho (em milímetros) da figura impressa, normalmente na ordem de 20 ou 30 mm.



Recomenda-se que a figura do logotipo tenha um tamanho pequeno, para não prejudicar o desempenho do programa ao imprimir. Seu tamanho não deve ultrapassar 1 MB ou 300 x 300 pixels.

Diversos: configura as densidades do *Traçado* e do *Milimetrado*. As escalas variam de 1 a 5: quanto maior a escala, mais “grosso” o traçado ou milimetrado será.


Configura também a *Fonte padrão do editor das conclusões finais*. Clique em  (Fonte) para escolher a fonte e sua formatação, semelhante à configuração de cabeçalho. Mais abaixo pode-se habilitar ou desabilitar as opções:

- *Esconder idade em ECG:* permite definir se a idade do paciente será impressa na anamnese quando se faz um eletrocardiograma (não altera o ECG basal dos testes ergométricos e cardiopulmonares)
- *Curvas coloridas:* permite definir se os gráficos de FC, PA, Duplo Produto e nível do ST serão impressos em cores.
- *Imprime nome do médico responsável no laudo:* se habilitada, esta opção adiciona automaticamente ao fim do laudo o nome e CRM do médico responsável para sua assinatura. Se esta opção estiver desabilitada, será possível personalizar a área para assinatura com títulos, especializações, etc. bastando criar um Modelo de Laudo (ver *Recursos avançados na edição das conclusões finais do laudo*, página 101).


Margens: permite configurar o tamanho das margens horizontal e vertical em milímetros. Esta opção define as distâncias horizontal e vertical do canto superior esquerdo da área a ser utilizada em todas as impressões, com exceção da *Carteira de ECG* (ver página 100), que possui margem própria.


Impressão Padrão: permite configurar quais recursos serão impressos automaticamente a cada exame. São eles: *Itens de Laudo* e *Conclusões Finais*, *Resposta Cardiovascular*, *Resumo do Exame*, *Score Pré-teste*, *Score Framingham*, *Score Duke* e *Score Raxwall/Morise*.

12.2. GUIA GERAL

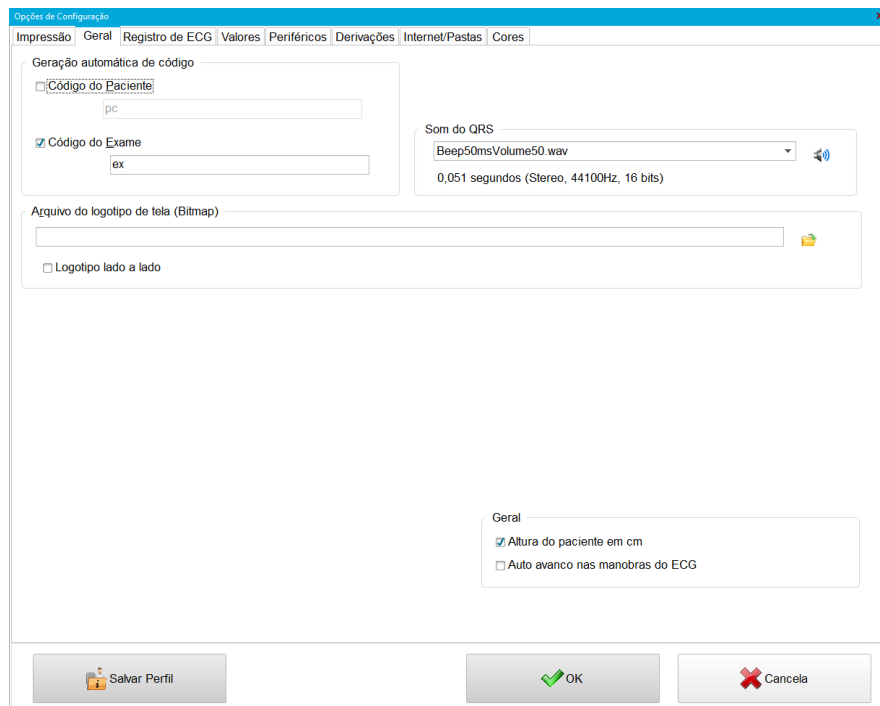


Geração automática de código: permite definir se o código associado a cada paciente e/ou exame será gerado automaticamente pelo programa ou manualmente, digitado pelo usuário, possibilitando a utilização de códigos gerados externamente por sistemas de gerenciamento de consultórios, clínicas ou hospitais. No caso de geração automática, pode-se definir um prefixo para os códigos criados pelo programa.

Som do QRS: permite configurar o bip de frequência cardíaca, alterando o arquivo de som que será tocado a cada QR detectado. Existem quatro opções de arquivos de som, todos com duração de 50ms, nos volumes de 10, 25, 50 e 100%. É possível escolher a linha em branco, assim não será usado nenhum arquivo de som. Para testar o arquivo selecionado, clique no botão  (*Testar Som*).

Arquivo de logotipo de tela (Bitmap): neste campo é possível definir uma figura como “papal de parede” do programa. Assim como no caso de *Logotipo de impressão*, a figura deverá ser um arquivo no formato Bitmap (BMP). Pode-se escrever a localização do arquivo diretamente no campo *Arquivo* ou pode usar o botão  (*Procurar Arquivo*) para encontrá-lo através da janela *Seleciona figura do logotipo*. Caso a logomarca seja menor que a área disponível, esta será centralizada na tela ou, caso a opção *Logotipo lado a lado* esteja habilitada, ela será desenhada lado a lado várias vezes, como ladrilhos numa parede.

12.3. GUIA REGISTRO DE ECG

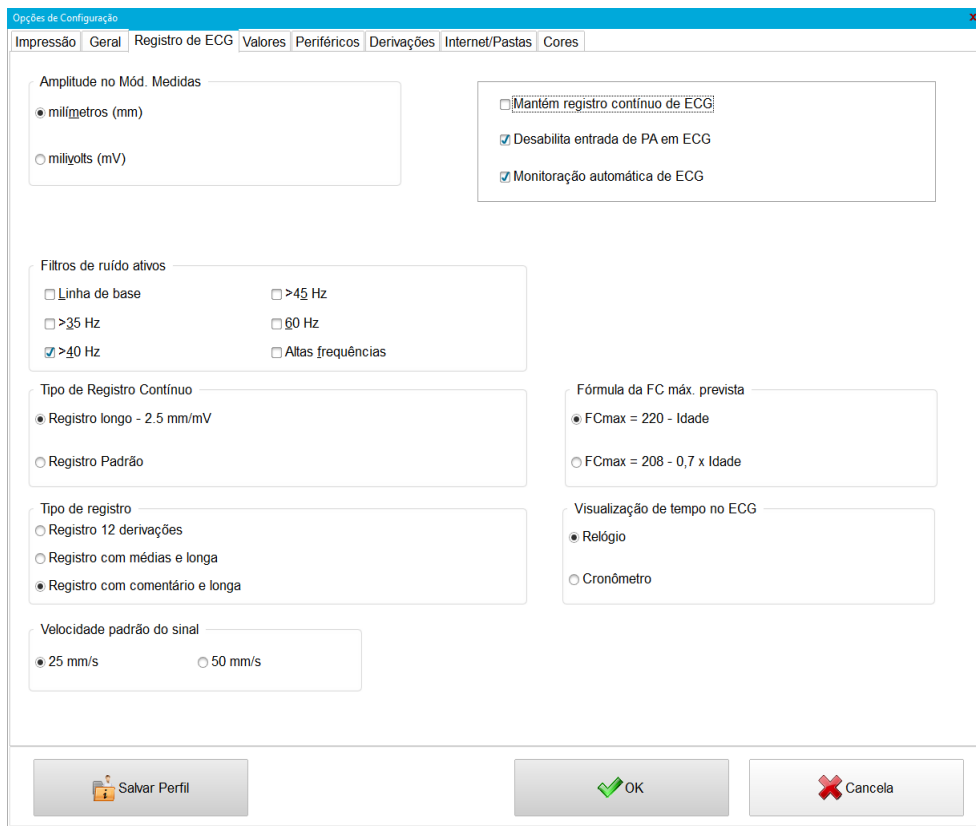

Filtros de ruídos ativos: permite a seleção de quais filtros digitais estarão ligados ao se iniciar um exame. As opções são:

- Estabilização da *Linha de Base*.
- Três filtros de ruído muscular, a saber: forte - corta frequências acima de 35Hz; médio - corta frequências acima de 40Hz; leve - corta frequências acima de 45Hz.
- Filtro contra interferência da rede elétrica, que atenua uma faixa estreita de frequências centralizada em 60Hz. Este filtro torna-se muito necessário quando há uma deficiência de aterramento elétrico ou quando o ambiente está sujeito a muita interferência eletromagnética.



O programa não permite que se ligue o filtro de ruído da rede elétrica quando um dos filtros de ruído muscular estiver ligado pois estes filtros agem sobre as frequências *acima* de seus respectivos pontos de corte (35, 40 e 45Hz), o que torna desnecessário ligar o filtro de 60Hz.

- O filtro “*Altas frequências*” ou “*AF*” corta frequências acima de 100Hz. É um filtro recomendado quando há ruídos de fontes eletromagnéticas como aparelhos de ondas curtas. A observação feita acima, referente ao filtro de 60Hz, torna-se ainda mais válida neste filtro que, portanto, também não pode ser combinado com um filtro de ruído muscular.



Todos os filtros podem ser habilitados/desabilitados durante o exame.

Tipo de Registro Contínuo: permite selecionar o tipo padrão de registro no módulo de *Registro contínuo* (ou *Full disclosure*), que só pode ser efetuado após o término da monitoração dos sinais. Ver *Registro contínuo de ECG* para maiores detalhes (página 97). As opções são (veja-as no anexo *Impressão de registro contínuo*, página 120):

- *Registro longo – 2.5 mm/mV (1 página):* 12 derivações impressas em uma só página na orientação “Paisagem” (página deitada) em escala vertical comprimida (2.5 mm/mV).
- *Registro longo – 10 mm/mV (2 páginas):* 12 derivações impressas em duas páginas na orientação “Paisagem” (página deitada) em escala normal (10 mm/mV).
- *Registro Padrão:* 12 derivações (6 linhas x 2 colunas) impressas em uma página na orientação “Retrato” (página de pé) em escala normal (10 mm/mV).



Pode-se selecionar o tipo de registro no módulo de *Registro Contínuo* dando um clique no botão, à direita do botão de registro.

Tipo de registro: esta configuração permite escolher o tipo padrão de registro usado durante a monitoração. Todos os modelos são impressos na orientação “Retrato” (página de pé) e são mostrados anexo *Impressão de registros*, página 117. As opções são:

- *Registro 12 derivações:* 12 derivações (6 linhas x 2 colunas) impressas em uma página na orientação “Retrato” (página de pé) em escala normal (10 mm/mV).
- *Registro com médias e longa:* 12 derivações e respectivos complexos médios (6 linhas por 2 colunas) mais uma derivação longa após a última linha, impressos em uma página na orientação “Retrato” (página de pé) em escala normal (10 mm/mV). Se um comentário for feito no momento do registro, ele será impresso abaixo da derivação longa, que será então impressa em escala vertical comprimida.
- *Registro com comentário e longa:* o mesmo que “Registro com médias e longa”, só que sem os complexos médios.

Durante a monitoração é possível alterar o “*Tipo de registro de 12 derivações*”. Consulte nos capítulos seguintes as seções que mostram como iniciar um novo exame.



A configuração do tipo de registro de 12 derivações pode ser combinada ao número de derivações. Se o programa estiver configurado para trabalhar com 3 ou 6 derivações, os registros serão feitos de forma análoga aos respectivos tipos em 12 derivações. Consulte a seção *Guia Derivações* (página 64) deste capítulo para alterar estas configurações.

Amplitude no módulo de medidas: permite definir se as medições de amplitude feitas no *Módulo de medidas* serão feitas em *Milímetros (mm)* e *Milivolts (mV)*.

Fórmula da FC máxima prevista: permite selecionar a fórmula para cálculo da frequência cardíaca máxima. As opções são:

- Fórmula de Karnoven: $FC_{max} = 220 - Idade$
- Fórmula de Tanaka/Monahan/Seals: $FC_{max} = 208 - 0,7 \times Idade$



Os pesquisadores que propuseram esta fórmula alegam que a fórmula de Karnoven subestima a FCmax em adultos mais idosos. (J Am Coll Cardiol 2001;37:153-6)

Visualização de tempo no ECG: permite selecionar, somente para *eletrocardiogramas*, se a

12. Configurando o ECGV6

referência de tempo será a hora do dia (opção *Relógio*) ou o tempo transcorrido desde o início da monitoração (opção *Cronômetro*).

Mantém registro contínuo de ECG: permite definir se o registro contínuo de ECG será (ou não) apagado ao término do exame. O programa armazena todo o sinal eletrocardiográfico recebido desde o início da monitoração até o término do exame. Por padrão, esta opção é desmarcada, de forma que o registro contínuo será apagado quando o usuário sair da tela de Visualização de traçados. Mas é possível mantê-lo naquela ocasião. Veja mais detalhes em [Visualização de Traçados](#) e [Registro contínuo de ECG](#) (páginas 44 e 97).



O registro contínuo e os registros (impressões) feitos ao longo do exame são completamente independentes. Antes de apagar o registro contínuo, o programa copia todos os registros impressos para a base de dados.



O registro contínuo de ECG consome cerca 338 KB de espaço no disco para cada minuto de sinal. Por exemplo, em um exame de 10 minutos, o arquivo de registro contínuo ocupará aproximadamente 3,3 MB. Portanto, mantê-los continuamente poderá sobrecarregar seu disco rígido. Veja em [Apagando exames](#) (página 73) como eliminar os registros contínuos.


Desabilita a entrada de PA durante ECG: se habilitada, esta opção faz com que o programa não solicite a edição da PA nos exames de *Eletrocardiograma*. Esta configuração não se aplica aos exames de esforço, mesmo no ECG basal.

12.4. GUIA VALORES

Nesta guia, pode-se definir o *valor* (em Reais) de cada tipo de exame para pacientes particulares (sem convênio). Se na *Anamnese*, no campo *“Forma de Pagamento”*, o exame for definido como *“Particular”*, o valor correspondente será contabilizado integralmente; caso o exame seja definido como *“Cortesia”*, será aplicado o desconto percentual definido no campo *Cortesia* desta guia.


12.5. GUIA PERIFÉRICOS

Nesta guia, pode-se alterar as configurações relativas aos dispositivos periféricos que interagem com este programa.

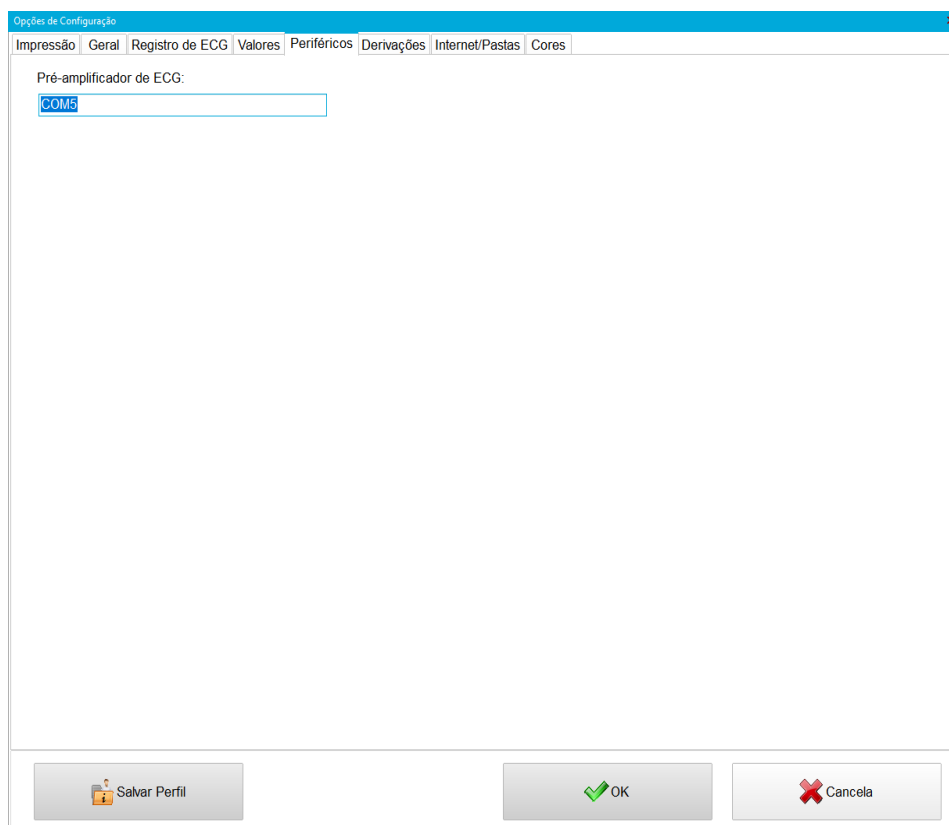

Pré-amplificador de ECG: indica a porta de comunicação onde o Eletrocardiógrafo (ou pré-amplificador) está ligado e é determinada automaticamente pelo programa.

12.6. GUIA DERIVAÇÕES

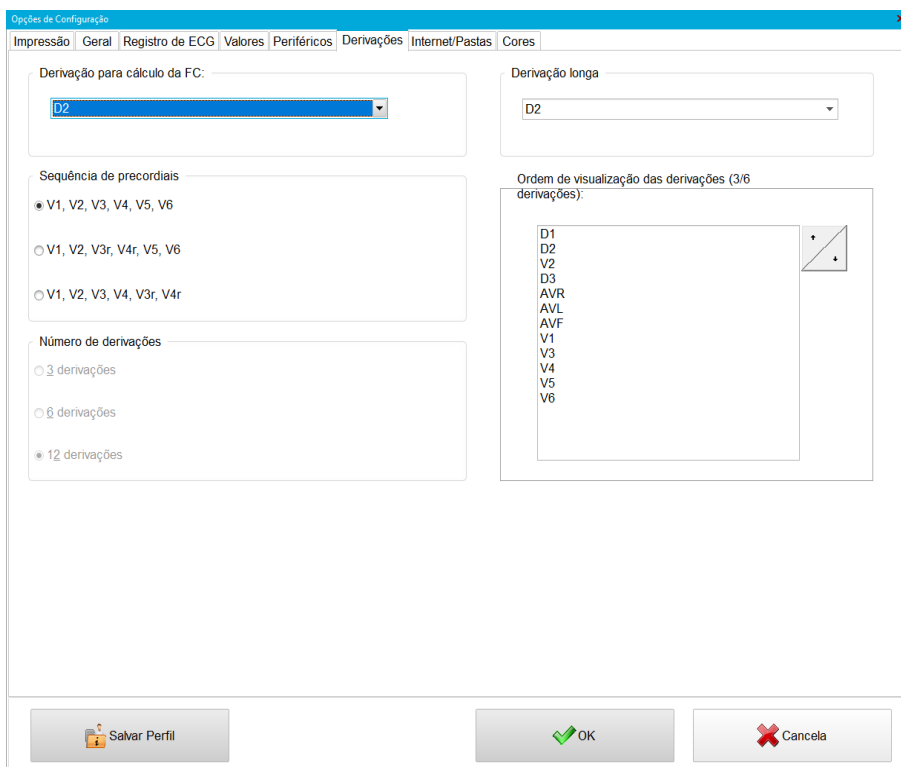

Derivação para cálculo da FC: use o botão ▼ para selecionar a derivação padrão a ser utilizada para o cálculo da frequência cardíaca. Caso seja necessário, esta derivação pode ser trocada durante um exame.

Derivação longa: define qual será a derivação longa padrão nas telas de monitoração de sinais. A derivação longa pode ser alterada durante a execução do exame.

Sequência de precordiais: escolhe a sequência usada na montagem das precordiais. Consulte mais informações em *Preparação do paciente*, página 27.

12.7. GUIA *INTERNET*

The screenshot shows the 'Opções de Configuração' window with the 'Internet/Pastas' tab selected. The window contains several configuration sections:

- Identificação:** A text input field for the sender's name.
- E-mail:** A text input field for the sender's email address.
- Pasta de Exames - CardioNet Server:** A text input field for the exam folder path.
- Pasta de Laudos - CardioNet Server:** A text input field for the reports folder path.
- Pasta para exportação de PDFs:** A text input field containing the path 'D:\Usuarios\robson.starling.HEARTWARE\Documents\PDF_ECGV6\'. A folder icon is next to it.
- Pasta para exportação de DICOMs:** A text input field for the DICOM folder path.
- Pasta de geração automática de PDF/DCMs dos exames:** A text input field for the automatic PDF/DCM generation folder path.
- Pasta de Exames - Conectividade WebECG:** A text input field for the WebECG connectivity folder path.
- Pasta de Exames - CardioFit:** A text input field for the CardioFit folder path.
- Nomes de Arquivos:** A group box containing radio buttons for file naming conventions:
 - NomePac_DDMMAA
 - NomePac_AADDMM
 - DDMMAA_NomePac
 - AAMDD_NomePac
 - NomePac_DDMMAA_hms
- PDF:** A dropdown menu currently set to 'PDF'.
- Criar subestrutura Ano/Mês
- Avaliação de risco HWE
- Avaliação de risco HWT


At the bottom of the window are three buttons: 'Salvar Perfil' (with a floppy disk icon), 'OK' (with a green checkmark icon), and 'Cancela' (with a red X icon).

Identificação: nome do remetente ao utilizar o recurso *Enviar para Internet*. Veja mais detalhes em *Enviando exames para Caixa de Saída*, página 79.

E-mail: endereço eletrônico do remetente no recurso *Enviar para Internet*.

É possível também configurara as pastas de Entrada e Saída para serem combinadas e monitoradas por sistemas de transporte e exames e telemedicina, conforme as abas específicas. Consulte sempre o Ajuda do programa para informações atualizadas.

12.8. GUIA APARÊNCIA

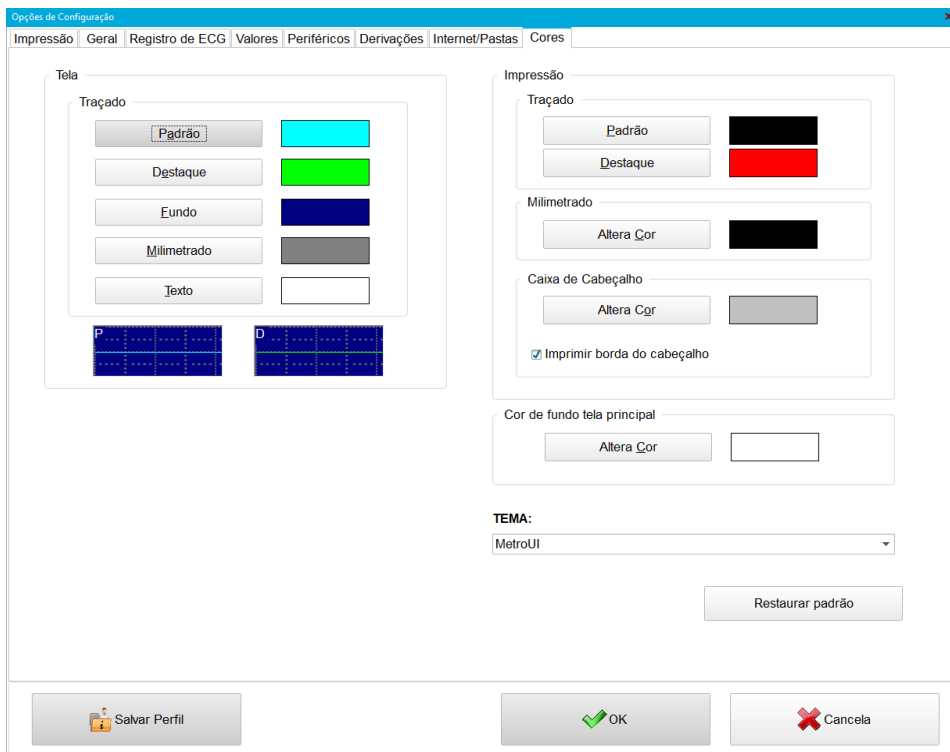

Esta guia configura as cores dos *traçados* (na tela e na impressão), do *milimetrado* e da *caixa de cabeçalho* de algumas folhas impressas. As cores dos traçados são classificadas em *Padrão* e em *Destaque* (ocorre quando alguma derivação é destacada durante o exame). Para alterá-las, clique nas caixas ao lado das cores e a janela de *Cor* será aberta para que você possa escolhê-las. Veja alguns exemplos nos anexos *Impressão de registro em cores* e *Impressão das Conclusões Finais do Laudo* (páginas 127 e 131).

12.9. SALVAR PERFIL

O botão *Salvar Perfil* permite que todas as configurações definidas nas abas sejam salvas em um perfil, com um nome próprio. Desta forma, é possível estarem salvos inúmeros perfis de configuração para os programas, sem a necessidade de que a configuração seja feita item por item. Por exemplo, cada médico que utiliza o sistema poderá ter seu próprio perfil salvo, de forma a prontamente configurar o programa antes de iniciar sua seção de uso.


13. INICIANDO UM NOVO ELETROCARDIOGRAMA



Veremos a seguir os passos básicos para se fazer um *Eletrocardiograma*.



Leia antes as Noções básicas do programa (página 34), pois a maioria das telas, janelas e botões que serão utilizadas neste exame foram mostradas naquele capítulo.

13.1. CADASTRANDO O PACIENTE


Na tela inicial do programa, clique no botão  (*Novo Eletrocardiograma*) ou use o menu *Exame* ⇒ *Novo* ⇒ *Eletrocardiograma*. A janela *Novo Eletrocardiograma* surgirá com a lista de pacientes já cadastrados no programa.


Encontre o paciente na lista e clique em  (*Novo Exame*). Em se tratando de um paciente não listado, clique em  (*Novo Paciente*).

Em seguida, na janela *Dados do paciente*, preencha os dados cadastrais, sendo que o *Nome*, *Sexo* e *Código do Paciente* (normalmente gerado automaticamente) são obrigatórios.

Clique em  (*Anamnese*) para prosseguir.

13.2. PREENCHENDO A ANAMNESE

Na janela *Dados da Anamnese*, todas as informações são opcionais, exceto os campos *Código do Exame* e a *Data do Exame* (normalmente gerados automaticamente). Escolha, se desejar, o *Médico Responsável* e/ou *Solicitante*. Caso eles não constem nas respectivas listas, use o botão  (*Edita Médico Responsável ou Médico Solicitante*) para cadastrá-los. Veja mais detalhes em *Cadastros de Médicos Responsáveis* e de *Médicos Solicitantes*, página 48.

Clique no botão  (*Traçados*) para prosseguir com o exame.




Outro recurso disponível na janela de edição da Anamnese:

- *Inserindo frases pré-programadas*, página 95;


13.3. MONITORANDO E REGISTRANDO OS SINAIS





Na tela de monitoração de sinais ou mesmo antes dela, o paciente deve ser preparado e ter todos os eletrodos ligados. Consulte as seções *Preparação do paciente* e *Posicionamento dos eletrodos* (páginas 27 e 29) para maiores detalhes.

Clique em  (*Iniciar Monitoração*) para começar o exame e aguarde a estabilização dos sinais na tela. **São necessários pelo menos 20 segundos depois de iniciada a monitoração para que o programa calcule a frequência cardíaca.**






Se a frequência cardíaca não se estabilizar ou estiver incorreta, provavelmente há algum problema na *Derivação Para Cálculo da FC*. As causas mais prováveis são:

- *Existência de interferências nesta derivação*. Neste caso, verifique se os eletrodos estão bem afixados e com uma quantidade apropriada de gel condutor (se for o caso).
- *A derivação apresenta complexos QRS de baixa amplitude*. Neste caso, deve-se trocar a *Derivação Para Cálculo da FC*, clicando no botão  (*Configurações*).

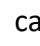Clique em  (*Registrar Sinal*) para registrar os últimos segundos do sinal eletrocardiográfico mostrado na tela. Surgirá então, a janela de *Edição de PA* mostrada abaixo. Basta digitar diretamente a PA desejada e depois clicar no botão  (*OK*) para confirmar. Se clicar no botão  (*Omitir PA*) você estará apenas cancelando a entrada da PA no registro. Para facilitar a edição da PA, o programa preenche o campo com o último valor registrado. Se a atual PA for diferente, basta digitar o novo valor diretamente, sem necessidade de apagar a anterior. Você poderá digitar os números sem precisar posicionar o cursor. Caso o valor digitado seja inconsistente (PAS < PAD, por exemplo), ou fora da faixa 40 - 300 mmHg, será mostrado um aviso mas se o valor estiver correto, você poderá usá-lo assim mesmo. O botão  (*Comentário*) - não disponível no tipo registro padrão - permite acrescentar, no rodapé da folha do registro, um pequeno texto (veja alguns exemplos no anexo Impressão de registros, página 117). Se o modo de *Impressão Automática* estiver habilitado, o registro será impresso sem necessidade de nenhum outro comando.

Estágio	Sist. / Diast.
Em Pé	120/80

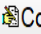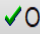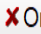 Comentário  OK  Omitir PA



Você pode desabilitar a edição de PA nos exames de ECG convencional, veja mais detalhes na Guia Registro de ECG (pág. 60).

Para pausar a derivação longa, clique no botão (*Congelar Deriv. Longa*). Com ela congelada, clique no botão (*Registrar Deriv. Longa*) para efetuar um registro dela ou clique em (*Descartar Deriv. Longa*), para descartá-la e retirar a pausa (veja um exemplo deste registro no anexo *Registro longo de 1 derivação*, página 122).

Podem ser feitos tantos registros quantos forem necessários. Vale notar que, toda vez em que se faz um registro, a manobra/posição corrente do paciente avança para a seguinte. Se for necessário, clique em (*Manobra*) para selecionar manualmente a manobra/posição desejada.

Para alterar algumas configurações somente para o exame corrente, clique em (*Configurações*). Uma janela será aberta semelhante à da figura a seguir. Você poderá habilitar ou desabilitar a *Impressão Automática* e o número de derivações - esta opção está disponível somente quando se trabalha no modo de 3 ou 6 derivações. Também é possível alterar o *Tipo de Registro* (veja alguns exemplos no anexo *Impressão de registros*, página 117). Para a *Visualização de tempo no ECG* pode-se escolher entre *Relógio* ou *Cronômetro*. Na primeira opção, será impressa a hora em que se fez o registro; no segundo caso, será impresso o tempo transcorrido desde o início da monitoração. Finalmente, é possível mudar a *Derivação para cálculo da FC*.

Configurações do exame corrente

Impressão automática

Tipo de Registro

Registro de 12 derivações

Registro com comentário, médias e longa

Registro com comentário e longa

Derivação para cálculo da FC:

Clique em (*Interromper Teste*) se desejar encerrar a monitoração. O programa perguntará se deseja interromper o exame.


Atenção

?

Deseja interromper o exame?

13. Iniciando um Novo Eletrocardiograma

Confirmada a interrupção e se nenhum registro tiver sido feito, o programa pedirá uma nova confirmação pois, normalmente, todo exame possui ao menos um registro, exceto quando se trabalha apenas com o *Registro Contínuo* (veja mais detalhes sobre isto em Registro contínuo de ECG, página 97).

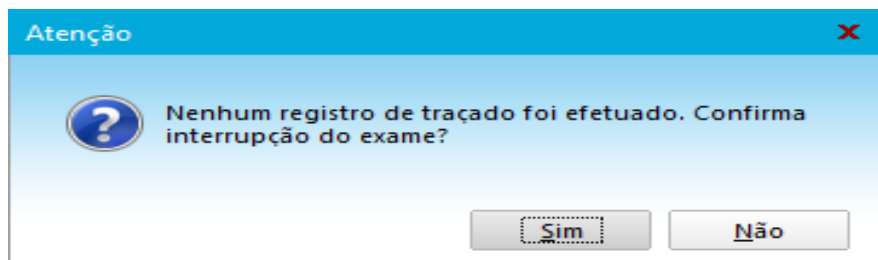

Outro recurso disponível na monitoração dos sinais:

- *Zoom de Sinal*, página 47;

13.4. VISUALIZANDO OS REGISTROS

Na tela de *visualização de traçados*, clique no botão ▼ para ver a lista dos registros efetuados e selecionar, usando o mouse ou o teclado, o registro a ser visualizado, que poderá ser impresso através do botão (*Imprime traçado corrente*). O botão (*Apagar traçado corrente*) elimina o registro atualmente visualizado, sem a possibilidade de recuperá-lo posteriormente.

Terminada a inspeção dos registros, clique no botão (*Laudo*) para abrir a janela de *Edição das Conclusões Finais* do laudo.



Outros recursos disponíveis na tela de visualização de traçados:

- *Zoom de Sinal*, página 47;
- *Módulo de Medidas*, página 84;
- *Carteira de ECG*, página 100;
- *Registro contínuo de ECG*, página 97;
- *Exportação para arquivo de imagem*, página 104.

13.5. EDITANDO AS CONCLUSÕES FINAIS DO LAUDO

Use a janela de *Edição das conclusões finais* para escrever o laudo do exame de ECG. Trata-se de um editor de texto simples, semelhante ao *WordPad* do Windows. Nele, estão à sua disposição recursos mais comuns, tais como formatação de caracteres e alinhamento de parágrafo.

Se quiser recuperar o texto do laudo do último exame feito, clique em (*Importar Itens*) e escolha *Carregar o último laudo*.

Encerrada a edição das conclusões finais, clique em (*Sair*) para sair do editor e salvar o texto no laudo do exame.




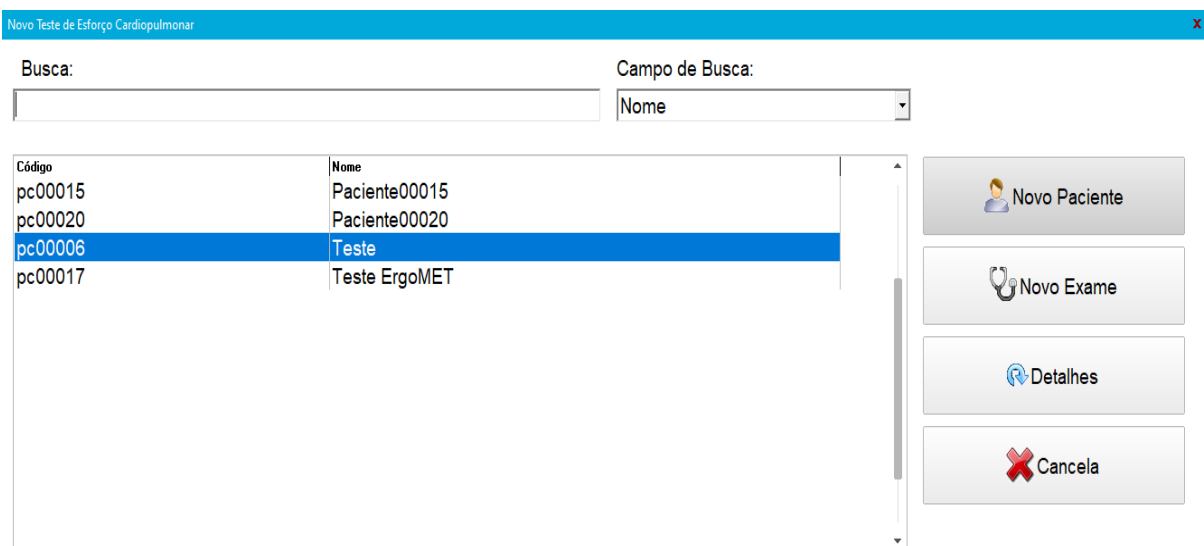
Outros recursos disponíveis na janela de edição das conclusões finais do laudo:

- *Inserindo frases pré-programadas*, página 95;
- *Campos automáticos e Modelos de laudo*, veja na seção Recursos avançados na edição das conclusões finais do laudo, página 101.

14. MANIPULAÇÃO DE PACIENTES E EXAMES

14.1. ABRINDO EXAMES


Para abrir exames realizados anteriormente, a partir da tela principal do programa, clique no botão  (*Abrir*) ou no menu *Exame* ⇒ *Abrir*. A janela *Abrir Exame* será aberta como na figura a seguir:









Novo Teste de Esforço Cardiorpulmonar

Busca: Campo de Busca:

Código	Nome
pc00015	Paciente00015
pc00020	Paciente00020
pc00006	Teste
pc00017	Teste ErgoMET

Esta janela apresenta duas listas: a da esquerda mostra o código e nome dos pacientes já cadastrados; a da direita mostra o(s) exame(s) já feito(s) pelo paciente selecionado na lista à esquerda (no caso da lista acima, o paciente “Paciente A”, que já fez quatro exames). Digite no campo *Busca*, o nome do paciente para que o programa o encontre na lista; se houverem homônimos, use o botão  (*Detalhes*) para ver, entre outros dados, a data de nascimento, permitindo a seleção do paciente correto, bastando dar um clique sobre seu nome. Uma vez selecionado um paciente, seu(s) exame(s) serão mostrados na lista à direita, bastando agora selecionar o exame desejado de acordo com sua data. Note que acima da lista de exames é mostrado o tipo do exame correntemente selecionado (*ECG*, *Ergo* ou *Espirom*). Exames ainda não conclusos são indicados por “(*Incompleto*)”, escrito em vermelho. Neste caso, depois de abertos, podem se prosseguir.

Escolhido o paciente e o exame (a partir de sua data), clique no botão  (*OK*) para abri-lo. Com ele aberto, você poderá consultar ou modificar a *Ficha do paciente* () , a *Ficha de Anamnese* () , os *Traçados* () e o *Laudos* () a partir da dela principal do programa.

Caso o exame aberto esteja *Incompleto*, basta clicar no botão  (*Prosseguir exame*) ou acessar a opção “*Exame*” ⇒ “*Prosseguir*”, no menu principal para terminá-lo. O prosseguimento do exame dependerá de onde ele foi encerrado: se não houver nenhum


registro, é possível entrar na tela de *monitoração de sinal*, basicamente reiniciando o exame. Se foram feitos registros e o laudo ainda não tiver sido elaborado, o programa prosseguirá para a tela de *Visualização de traçados*, permitindo a visualização/impressão/medições sobre os registros e imediata confecção do laudo.

14.2. APAGANDO EXAMES



ESTA OPÇÃO PERMITE A ELIMINAÇÃO, DE FORMA IRREVERSÍVEL DE UM OU MAIS EXAMES DA BASE DE DADOS, DEVENDO, PORTANDO, SER USADA APENAS POR PESSOAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO E COM A DEVIDA CAUTELA. EM CASO DE DÚVIDA, NÃO PROSSIGA.

Para apagar exames de seu banco de dados, acesse a opção *Exame* ⇒ *Apagar* ⇒ *Exame* do menu principal do programa. Devido à natureza irreversível desta operação, é pedida uma confirmação, como na figura abaixo:

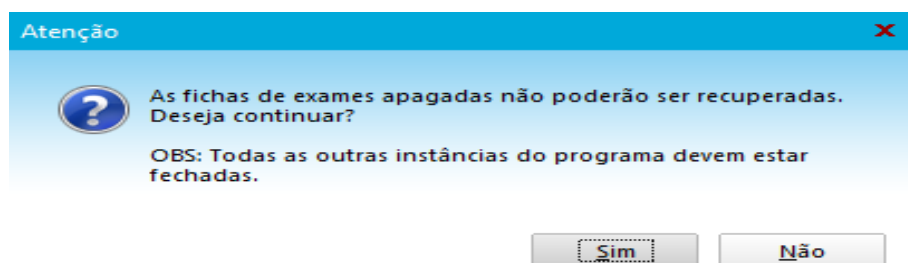


Em caso de dúvida, clique em “*Não*”. Se optar por continuar, será mostrada a janela *Apagar Exame*:

Código	Nome	Data
pc00015	Paciente00015	03/02/2023
pc00020	Paciente00020	03/02/2023
pc00006	Teste	
pc00017	Teste ErgoMET	

Há duas formas de apagamento de exames:


- **Apagamento individual:** se a opção *Apagar exame selecionado* estiver marcada, basta digitar o nome do paciente no campo *Busca* ou escolhê-lo diretamente na lista.

14. Manipulação de Pacientes e Exames

Se desejar, o critério de pesquisa pode ser alterado para *Código*, bastando para isto modificar a opção *Campo de busca*. Clique sobre o paciente desejado e escolha o exame a ser apagado, clicando na data apropriada na coluna *Data*. Para facilitar a identificação inequívoca do exame, logo acima desta coluna é mostrado o tipo de exame (*ECG*, *Ergo* ou *Espirom*) correntemente selecionado. Quando necessário, clique no botão  (*Detalhes*) para obter mais informações sobre este paciente e exame.

- **Apagamento por período:** se habilitada, a opção *Apagar exames entre datas* permite o apagamento num só comando de todos os exames feitos entre duas datas quaisquer. Para tal, defina a data inicial no campo *De* e a data final no campo *Até*. Use o botão ▼ para abrir um calendário.

Uma vez escolhidos o paciente e a data (ou intervalo de datas) dos exames a serem apagados, deve-se selecionar o que se deseja apagar. Tendo em mente que o que realmente ocupa espaço em disco são, principalmente, o *registro contínuo* e os registros individuais (traçados impressos), são oferecidas três opções:

- *Só traçados:* apaga todos os registros associados ao(s) exame(s), inclusive o *Registro Contínuo*, conservando o laudo, as conclusões finais.
- *Exame completo:* o(s) exame(s) são eliminados por completo (registro, laudo e conclusões finais).
- *Registro contínuo:* apaga somente o(s) arquivo(s) de registro contínuo (“*Full disclosure*”) do(s) exame(s) selecionados. Para saber se um determinado exame possui um arquivo de registro contínuo, clique no botão  (*Detalhes*) e verifique se há uma observação “*Reg. Contínuo*” no canto inferior direito da janela.




Em todas as modalidades de apagamento, os dados dos pacientes e das anamneses de seus exames não serão apagados.

14.3. APAGANDO PACIENTES



ESTA OPÇÃO PERMITE A ELIMINAÇÃO, DE FORMA IRREVERSÍVEL, DA BASE DE DADOS DE UM OU MAIS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS EXAMES, DEVENDO, PORTANDO, SER USADA APENAS POR PESSOAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO E COM A DEVIDA CAUTELA. EM CASO DE DÚVIDA, NÃO PROSSIGA.

Para apagar exames de seu banco de dados, acesse a opção *Exame* ⇒ *Apagar* ⇒ *Paciente* do menu principal do programa. Devido à natureza irreversível desta operação, é pedida uma confirmação, como na figura abaixo:

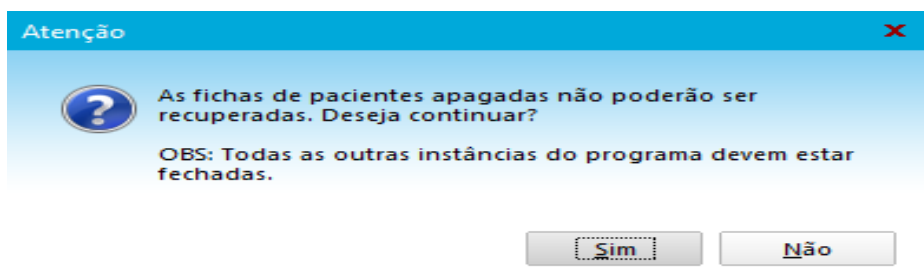

Em caso de dúvida, clique em “Não”. Se optar por continuar, será mostrada a janela *Apagar Paciente*:

Apagar Paciente

Apagar paciente selecionado

Busca: Campo de Busca: Nome

(v. 2.0)

Código	Nome	Data
pc00015	Paciente00015	03/02/2023
pc00020	Paciente00020	03/02/2023
pc00006	Teste	
pc00017	Teste ErgoMET	

ECG (Incompleto)

Apagar pacientes sem exame

Esta opção apaga da tabela os pacientes que não contêm exames associados, permitindo a limpeza da base de dados após a remoção de exames.

Apagar

Detalhes

Fechar

Há duas formas de apagamento de pacientes:

- **Apagamento individual:** se a opção *Apagar paciente selecionado* estiver marcada, basta digitar o nome do paciente no campo *Busca* ou escolhê-lo diretamente na lista. Se desejar, o critério de pesquisa pode ser alterado para *Código*, bastando para isto modificar a opção *Campo de busca*. Em caso de dúvida (homônimos), clique sobre o paciente desejado e no botão (*Detalhes*) para obter mais informações sobre este paciente e seus exames, mostrados na lista à direita.
- **Apagar pacientes sem exame:** esta opção é normalmente usada após o apagamento de grandes quantidades de exames, permitindo a eliminação da base de dados de todos os pacientes, independentemente da data em que foram cadastrados, que não possuam ao menos um exame.

Para prosseguir, clique no botão (*Apagar*). Antes de efetuar o apagamento propriamente dito, o programa pedirá uma última confirmação. Somente responda “Sim” se tiver absoluta certeza do que está fazendo.


14.4. MOVENDO EXAMES

Eventualmente, a base de dados de exames pode vir a ocupar muito espaço em disco. Neste caso, o programa oferece outra opção além do apagamento de exames e/ou pacientes conforme visto anteriormente, permitindo também que exames sejam *movidos* do disco rígido local para outro, no mesmo micro ou em outro, através de uma rede. Vale notar um aspecto importante: como o próprio nome diz, os arquivos associados serão apenas transferidos para outro local, o que não pode ser confundido com backup, que implica, necessariamente, na existência simultânea de duas cópias dos arquivos. O que a opção


14. Manipulação de Pacientes e Exames

“*Mover exames*” *oferece não é backup*, pois a cópia única de cada exame é meramente transferida de um lugar para outro, não havendo portanto nenhuma duplicidade.

Para mover exames de seu banco de dados, acesse a opção “*Exame*” no menu principal do programa e selecione a opção “*Mover*”. Será então mostrada a seguinte janela de confirmação:

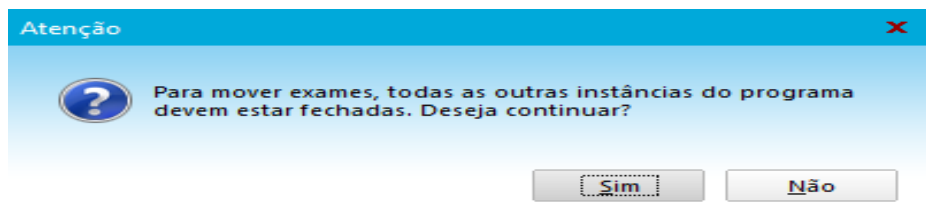


A razão por trás dessa pergunta é que o programa pode estar configurado para funcionar com um computador no qual os exames são feitos e outros computadores acessam seus dados. Por exemplo: os exames são feitos na *Sala de Exames* e os dados são acessados pela *Secretária* e pelo médico em seu *Consultório* (veja outras informações em Outros modos de funcionamento do programa, página 137). Neste cenário (vários usuários potencialmente acessando os dados), se houverem outras instâncias do programa rodando (por exemplo, o médico pode estar revendo um exame antigo de um paciente). Caso nenhum computador tenha sido configurado para acesso remoto aos dados, pode-se responder “*Sim*” à pergunta. Caso existam micros configurados para acessar os dados remotamente, como no caso “*Sala de exames - Secretária - Consultório*” mencionado acima, certifique-se com absoluta certeza que o programa esteja fechado (não pode ser apenas minimizado) em todos os micros antes de responder “*Sim*” a esta pergunta. Em caso de dúvida, não prossiga, clicando no botão “*Não*”. Se a resposta ao pedido de confirmação for “*Sim*”, será mostrada a seguinte janela:

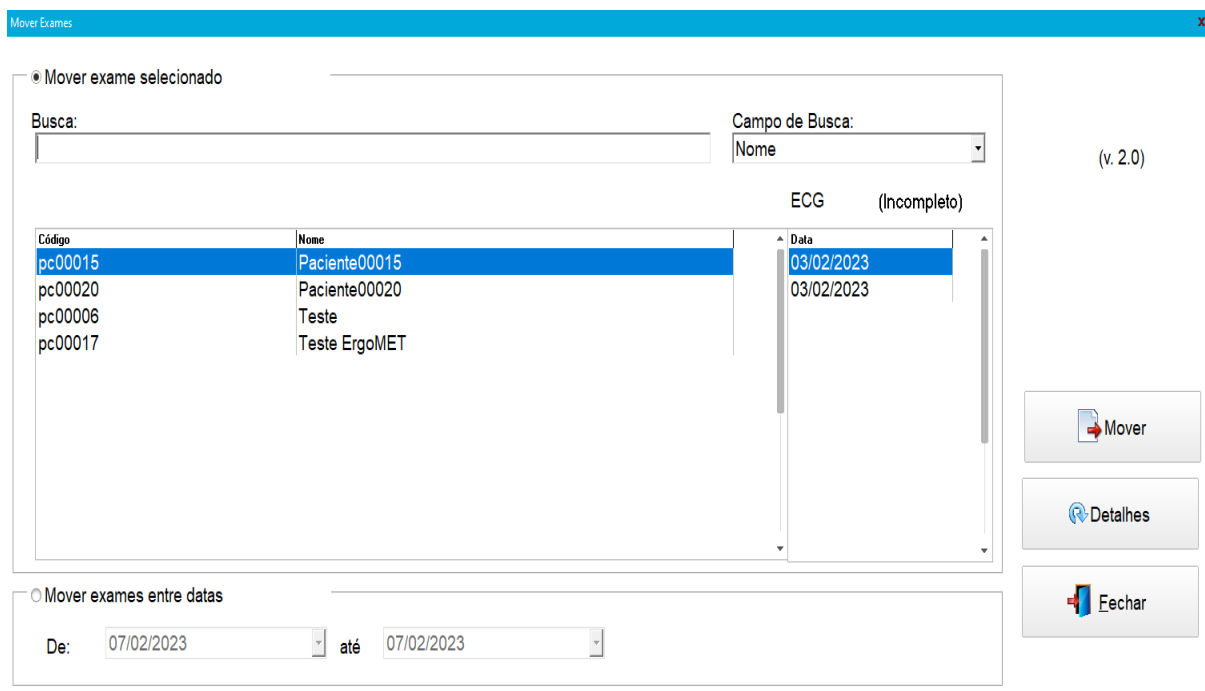



Há duas formas de movimentação de exames:

- **Movimentação individual:** se a opção *Mover exame selecionado* estiver marcada, basta digitar o nome do paciente no campo *Busca* ou escolhê-lo diretamente na lista.

Se desejar, o critério de pesquisa pode ser alterado para *Código*, bastando para isto modificar a opção *Campo de busca*. Clique sobre o paciente desejado e escolha o exame a ser movido, clicando na data apropriada na coluna *Data*. Para facilitar a identificação inequívoca do exame, logo acima desta coluna é mostrado o tipo de exame (*ECG*, *Ergo* ou *Espirom*) correntemente selecionado. Quando necessário, clique no botão  (*Detalhes*) para obter mais informações sobre este paciente e exame.


- **Movimentação por período:** se habilitada, a opção *Mover exames entre datas* permite a transferência num só comando de todos os exames feitos entre duas datas quaisquer. Para tal, defina a data inicial no campo *De* e a data final no campo *Até*.

Uma vez escolhidos o paciente e a data (ou intervalo de datas) dos exames a serem apagados, clique no botão  (*Mover*). Escolha o destino do(s) arquivo(s) de exame e confirme com o botão  (*OK*). Antes de efetuar a transferência propriamente dita dos exames, o programa pedirá uma última confirmação. Somente responda “*Sim*” se tiver certeza do que está fazendo.



Relembrando: a movimentação de exames não implica em retirá-los de sua base de dados, isto é, os arquivos associados aos exames movidos são apenas transferidos para o local que você definiu. Como o programa grava informações referentes ao destino dos arquivos movidos, para abri-los é necessário que os arquivos sejam mantidos no local para onde foram transferidos. **IMPORTANTE:** se o caminho para onde os exames foram movidos for modificado ou apagados, o programa não conseguirá mais achar os referidos exames.

Nas janelas de seleção de Paciente e/ou exame, os arquivos movidos são indicados por “(*Movido*)” em vermelho e, nos detalhes do paciente/exame, no canto inferior esquerdo é mostrado para onde o exame foi transferido:

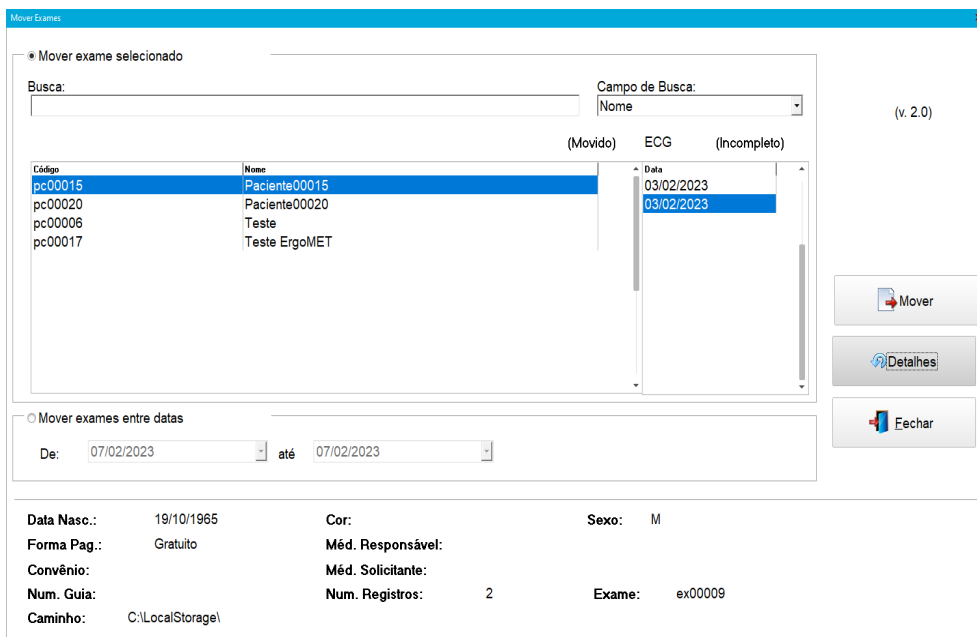

Mover Exames

● Mover exame selecionado

Busca: Campo de Busca: Nome (v. 2.0)

Código	Nome	Data
pc00015	Paciente00015	03/02/2023
pc00020	Paciente00020	03/02/2023
pc00006	Teste	
pc00017	Teste ErgoMET	

(Movido) ECG (Incompleto)

○ Mover exames entre datas

De: 07/02/2023 até 07/02/2023

Mover **Detalhes** **Fechar**

Data Nasc.: 19/10/1965 Cor: Sexo: M
 Forma Pag.: Gratuito Méd. Responsável:
 Convênio: Méd. Solicitante:
 Num. Guia: Num. Registros: 2 Exame: ex00009
 Caminho: C:\LocalStorage\

14.5. IMPRIMINDO EXAMES JÁ REALIZADOS

Com um exame aberto na janela principal do programa, acesse o menu *Exame* e escolha *Imprimir*. Você poderá imprimir separadamente a *Anamnese*, os *Traçados* (todos ou parte deles), *Laudo* (completo ou parte dele), o *Resumo do exame* e os *Dados do Espirômetro*. Se for escolhida a opção *Completo*, será mostrada a janela *Impressão de Exame*, como na figura a seguir:

Impressão de Exame

Itens a serem impressos Selecionar todos

- Anamnese
- Traçados
 - Em Pé (00:28) FC: 84 - 120/80
 - Rampa - 0,6 MET/min (08:07) FC: 80 - 120/80
 - Recuperação 1 (01:00) FC: 86 - 120/80
- Laudo
 - Itens de Laudo
 - Conclusões Finais
 - Resposta Cardiovascular
 - Curvas da Ergoespirometria
- Resumo do Exame
- Prescrição de Exercício
- Dados do Espirômetro
- Dados da Calorimetria

Trabalho único de impressão

Escolha os itens que deseja imprimir e dê um clique no botão (*Imprime*). Caso esteja usando uma “*Impressora PDF*” para gerar um arquivo do exame no formato *PDF*, marque a opção *Trabalho único de impressão*.

14.6. EXPORTANDO EXAMES


Buscando poder interagir e se integrar a outros sistemas médicos, os programas da família FÁCIL podem exportar exames e registros de ECG em formatos públicos. Os formatos públicos disponíveis são: PDF, DICOM PDF, HL7 aECG e EDF. Alguns formatos proprietários também são suportados. Refira-se a seção *Configurações/Opções/Internet* para detalhes sobre estes formatos proprietários.

14.7. INTERCÂMBIO DE EXAMES

Para facilitar o intercâmbio de exames, o programa pode criar um arquivo em formato próprio contendo todas as informações de um exame (exceto o registro contínuo, que toma muito espaço), que pode ser lido em outro computador que tenha este programa instalado e, desta forma, os exames podem ser visualizados, impressos e editados em outro computador. Este processo pode ser útil em várias situações: intercâmbio e consulta com colegas; “Centrais de Laudo” nas quais um exame é recebido, o laudo é dado e o exame, agora completo, é mandado de volta para quem o enviou; caso haja algum contratempo, o usuário pode enviar os exames para si mesmo por e-mail, e dar os laudos em casa, com calma, enviando-os de volta para a clínica, por exemplo.

O conceito por trás deste recurso é usar duas áreas independentes e separadas de sua base de dados: a *Caixa de Saída* e a *Caixa de Entrada*. Os exames que vão para a Caixa de Saída ficam nesta área aguardando para serem enviados para o destino determinado (e-mail, outro disco, outro computador em rede). Os exames recebidos de outros computadores são enviados para a Caixa de Entrada e ficam disponíveis para visualização, impressão edição podendo, inclusive, serem incorporados à base de dados local.

14.7.1. Enviando exames para Caixa de Saída


Para enviar um exame para a *Caixa de Saída*, abra o exame desejado e, a partir da tela principal do programa dê um clique no botão  (*Enviar para Caixa de Saída*).

Se responder afirmativamente à pergunta anterior, o programa exibirá uma mensagem informando que todos os dados do exame (exceto um eventual registro contínuo) foram gravadas num arquivo único, gravado na *Caixa de Saída*:

Pode-se enviar quantos exames desejar para a *Caixa de Saída*. Normalmente, nos casos em que é necessário enviar todos os exames diários, usa-se o procedimento descrito anteriormente, enviando os exames à medida que são feitos, antes de fechá-los.

Para visualizar os exames que estão na *Caixa de Saída* e dar-lhes o destino desejado, abra o menu *Exame* e escolha a opção *Caixa de Saída*. A janela da *Caixa de Saída*, mostrada na figura a seguir, será aberta com a lista dos exames previamente enviados para a *Caixa de Saída*:

14. Manipulação de Pacientes e Exames

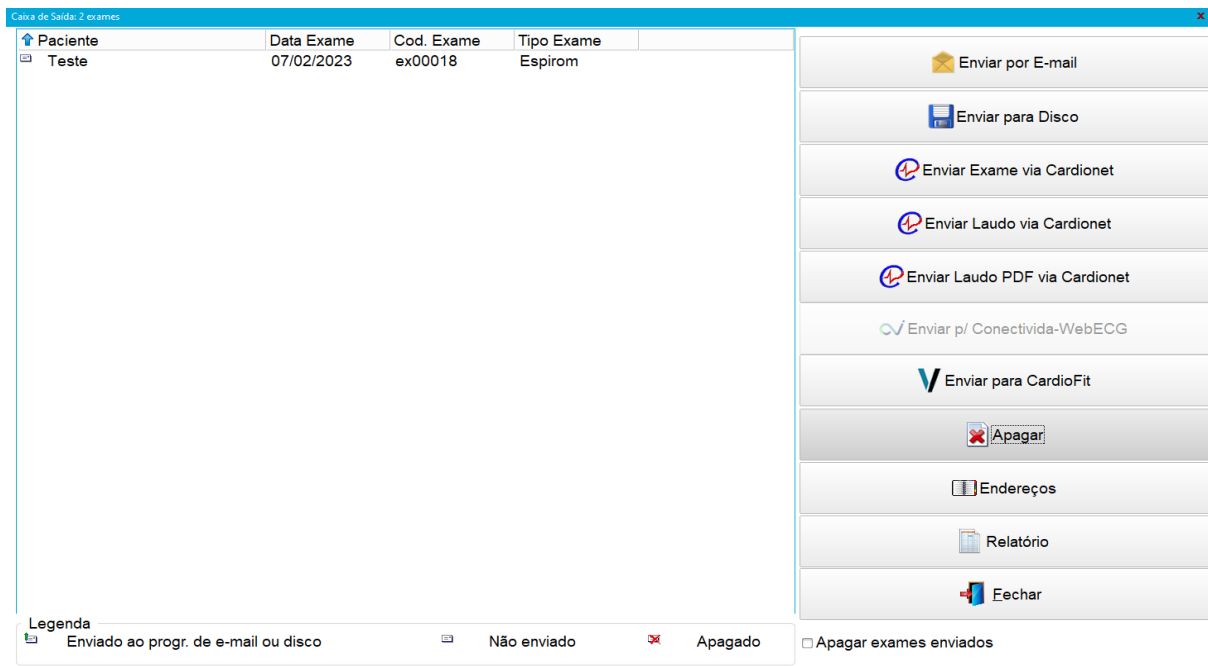

Observe os símbolos que aparecem à esquerda dos pacientes da lista: o símbolo indica exames ainda não enviados ao seu destino; o símbolo indica exames que já foram enviados. Para excluir um exame da *Caixa de Saída*, basta selecioná-lo na lista ao clicar no botão (*Apagar*). Como dito anteriormente a *Caixa de Saída* é completamente independente da base de dados de exames, portanto, o exame original não é afetado por este apagamento.


O botão (*Endereços*) é usado para abrir o cadastro de endereços de destinatários em seu programa. Tais endereços estarão disponíveis na janela de *Enviar para Internet*, abordada adiante.




Uma vez cadastrado o *destinatário* não será possível apagá-lo da lista. Você tem como alternativa desativá-lo ao desmarcar a caixa *Ativo*. Assim, ele não aparecerá na lista de destinatários durante o preenchimento do envio pela Internet.

Há duas opções de envio de exames a partir da *Caixa de Saída*: através de e-mail ou por meio de arquivo em disco. Na primeira opção, o exame é enviado para o programa padrão de gerenciamento de e-mails, previamente instalado e configurado, como o *Microsoft Outlook Express* ou *Mozilla Thunderbird*. Na segunda opção, o exame é salvo em disco ou mídia podendo, posteriormente, ser anexado manualmente em um e-mail.

Para enviar exames via e-mail, escolha-o(s) na lista e clique em (*Enviar para Internet*). Surgirá então uma janela semelhante à da figura a seguir, na qual devem ser preenchidos os dados do destinatário nos campos *Nome* e *Endereço Eletrônico* (e-mail). Se o destinatário já tiver sido cadastrado, clique no botão para selecioná-lo de uma lista. Preencha também os campos referentes ao remetente, *Nome* e *Endereço Eletrônico*. Use o botão (*Inserir dados de remetente padrão*) para recuperar os dados-padrão do remetente, previamente configurados (veja mais detalhes na seção Guia Internet à página 65). Use o campo *Descrição* para acrescentar algum texto ao e-mail a ser enviado. Para terminar, clique no botão (*OK*). Em seguida, o(s) arquivo(s) de transporte de exame com os endereços e o texto da descrição serão enviados para seu programa padrão de e-mail.

Para enviar um ou mais exames para um determinado disco, escolha-o(s) na lista da *Caixa de Saída* e depois clique em  (*Enviar para Disco*). O programa pedirá uma confirmação e, caso a resposta seja positiva, os exames serão copiados e, se tudo correr bem, será mostrada uma mensagem de que o envio foi finalizado, como na figura a seguir. Os arquivos salvos através do envio para disco podem ser anexados manualmente a um e-mail ou copiados para outro computador.

Para sair da *Caixa de Saída*, use o botão  (*Fechar*) Veremos a seguir como receber os arquivos através da *Caixa de Entrada*.

14.7.2. Recebendo exames na Caixa de Entrada

Na seção anterior, vimos como enviar um exame para um destinatário qualquer, seja por Internet (e-mail) ou por disco. Nesta seção veremos como receber estes exames para editá-los e até mesmo incorporá-los à sua base de dados. Um exame proveniente da *Caixa de Saída* é transportado de forma especial por meio de um arquivo do tipo *HWT* cujo nome começa com "hw" seguido por um código numérico seguido pela extensão "HWT". A figura a seguir mostra o ícone associado aos arquivos do tipo *HWT* e um nome típico.

Para manipular este tipo de arquivo em seu micro, o mesmo deve ter instalado um dos programas da família de eletrocardiógrafos *Fácil* da HW Sistemas podendo, inclusive, ser uma versão de demonstração. O único cuidado a ser tomado é que o programa instalado só é capaz de ler os exames que pode executar, por exemplo: o **ErgoMET**, pode ler *Testes Cardio-Pulmonares*, *Testes Ergométricos* e *ECGs* de repouso, enquanto que programa **Ergo 13** só pode ler *Testes Ergométricos* e *ECGs* de repouso e, finalmente, os programas **ECG V6** só pode ler *ECGs* de repouso.


O primeiro contato com um arquivo de transporte de exame é feito em seu programa gerenciador de e-mails (por exemplo *Microsoft Outlook Express* ou *Mozilla Thunderbird*) ou através do *Explorador de arquivos* do Windows.

Para enviar um exame para a *Caixa de Entrada* a partir de seu programa de e-mail, basta abrir diretamente o arquivo de transporte anexo ao e-mail ou salvá-lo em algum local,

14. Manipulação de Pacientes e Exames

preferencialmente a pasta *C:\HW\Entrada*. No entanto, se você copiou o arquivo ou salvou-o em algum outro local, abra a pasta onde ele está e dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele para inserir automaticamente o exame na *Caixa de Entrada*. Surgirá uma mensagem informando que o exame foi copiado com sucesso, semelhante à figura a seguir. Se o exame já estava na *Caixa de Entrada*, será perguntado se deseja sobrescrevê-lo.

Para abrir o exame, acesse o menu *Exame* e escolha a opção *Caixa de Entrada* a partir do menu principal do programa e uma janela como na figura a seguir será aberta.

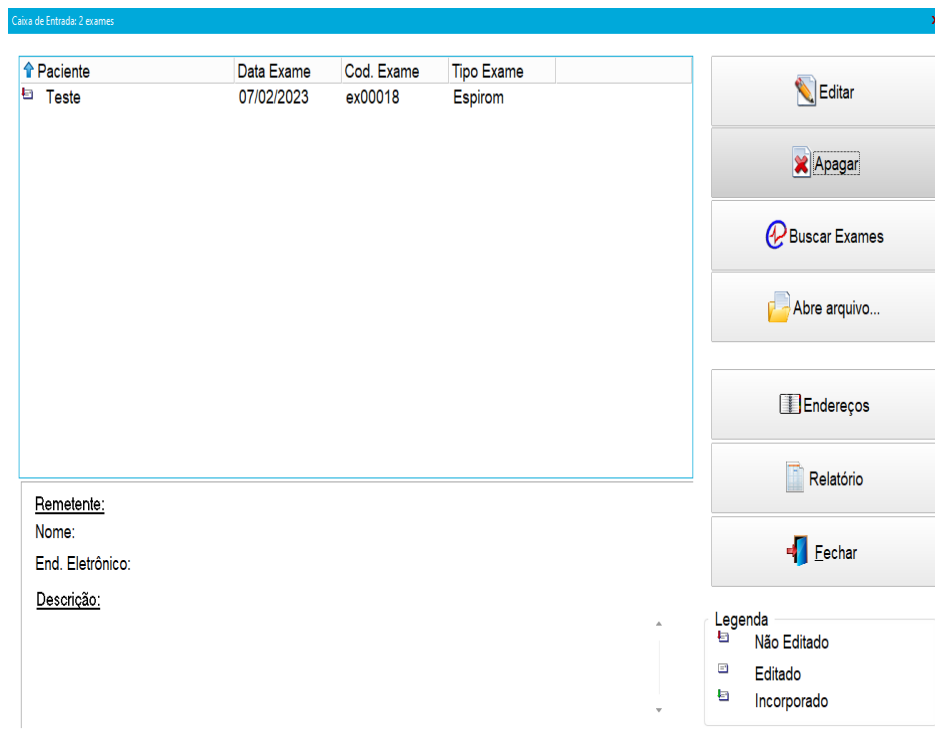


Conforme indicado na legenda no canto inferior direito da figura anterior, a situação de cada exame da lista é indicada pelo ícone à esquerda do nome do paciente: indica exame ainda não aberto; indica exame ainda já aberto e, finalmente, o ícone indica um exame já incorporado à base de dados. Para ver mais informações sobre um determinado exame, selecione-o na lista e, na parte inferior da janela serão exibidas informações adicionais. Para eliminar um exame da lista, selecione-o e dê um clique no botão (*Apagar*).

Exatamente como visto na seção anterior (página 79), o botão (*Endereços*) serve para abrir a janela de cadastro de destinatários em seu programa, usados para enviar exames via internet.

Para abrir um exame, basta selecioná-lo na lista e clicar no botão (*Editar*). Uma vez aberto, o exame pode ser tratado como um exame normal, isto é, usando os botões (*Ficha do paciente*), (*Ficha de Anamnese*), (*Traçados*) e (*Laudos*) na tela principal do programa, como se o exame tivesse sido feito neste computador. Caso o exame esteja Incompleto, é possível prosseguir-lo, bastando clicar no botão (*Prosseguir exame*). O prosseguimento do exame dependerá do ponto em que ele foi encerrado: se não foi feito nenhum registro de sinal, então pode-se basicamente reiniciar o exame, a partir da tela de *Monitoração de sinal*; caso tenham sido feitos registros mas o *Laudos* ainda não tiver sido elaborado, o programa prosseguirá para a tela de *Visualização de Traçados* para inspeção visual ou impressa de um ou mais traçados eletrocardiográficos, permitindo que o

especialista elabore o laudo com base nos traçados e demais dados colhidos ao longo do teste.

Como dito anteriormente, exames da *Caixa de Entrada* são gravados em separado da base de dados de exames feitos num determinado micro. Há, no entanto, situações em que pode ser útil ou mesmo necessário incorporar um exame à base de dados local. Para fazê-lo é necessário que o exame esteja aberto e, na tela principal do programa o botão  (*Incorporar Exame à Base Local*) esteja ativo (indicando ser um exame proveniente da *Caixa de Entrada*). Neste caso, basta um clique no referido botão para inserir o exame na base de dados local.

Cada paciente cadastrado recebe um código numérico e, de forma semelhante, cada exame também possui um código próprio. Enquanto estes códigos são gerados num único programa, não existe a possibilidade de ocorrerem duplicatas. No entanto, na situação que estamos abordando (incorporação de exames feitos em outros micros), isso pode ocorrer eventualmente. Caso já exista em sua base um paciente com o mesmo código que o paciente do exame a ser incorporado, será aberta uma janela, semelhante à mostrada figura seguinte, dando-lhe as opções de *Criar novo paciente* (mesmo que os nomes sejam iguais - homônimos), *Criar novo exame* (sob o mesmo paciente) ou *Incorporar no exame encontrado na base* (substituindo o exame existente). Nesta última opção, pode-se escolher o que se deseja incorporar (dados do paciente, dados da anamnese, traçados e laudo), substituindo desta forma somente o que for desejado.


Um exame, aberto a partir da caixa de entrada, pode, por exemplo, após a confecção do laudo, ser devolvido ao remetente, bastando usar o processo de enviar para a *Caixa de Saída*, descrito na seção anterior.

15. RECURSOS ADICIONAIS

15.1. MÓDULO DE MEDIDAS



Este recurso não pode, em nenhuma hipótese, ser considerado um módulo de medidas automáticas. Ainda que possua uma ferramenta de ajuda, que faz um posicionamento preliminar dos pontos de referência, este módulo não atende aos requisitos necessários para ser considerado um módulo de medidas automáticas e não foi certificado para tal função.


Para usar o *Módulo de Medidas* é necessário estar com um exame aberto na tela de *Visualização de traçados*. Use o botão  (*Módulo de medidas*) para acessar este recurso no registro de ECG corrente. A seguir são introduzidos os conceitos deste recurso.

15.1.1. Complexo Médio versus Complexo Representativo

Se tentarmos aplicar nosso conceito intuitivo de média (soma de n valores dividida por n) ao traçado acima, alinhando os complexos, somando-os ponto a ponto e dividindo esta soma pelo número de complexos, logo veremos que o complexo médio resultante não tem nenhum significado clínico. Toma-se necessário então sofisticar um pouco nosso conceito de média. Um passo a ser tomado que poderia melhorar o resultado seria a exclusão de complexos aberrantes (no exemplo acima excluiríamos os complexos 2 e 3). Ainda assim teríamos alguns problemas:

- Nem sempre é fácil definir para o computador o que é um “complexo aberrante”, de forma que alguns destes complexos poderiam passar despercebidos e “poluir” nossa média.
- Algumas alterações eletrocardiográficas importantes são por demais sutis para serem detectadas por metodologias simples de exclusão. Um exemplo disto pode ser observado analisando os complexos 1, 4 e 5 acima: vemos que a morfologia dos três é semelhante, porém os complexos 1 e 5 possuem ondas S largas em comparação com o complexo 4. Se fizéssemos a média destes três complexos obteríamos um complexo médio com um segmento ST no mínimo pouco confiável.
- Do exposto no item anterior, surge outro problema: o complexo 4 é do ponto de vista fisiológico, o mais “normal” de todos mas não é o de morfologia mais frequente, não sendo portanto o mais adequado para representar o traçado acima.

Dos problemas apresentados acima, surge a necessidade de definirmos o chamado **Complexo Representativo** de um traçado como a média dos complexos pertencentes à morfologia dominante no referido traçado. Seguem dois exemplos para esclarecer melhor esta definição:

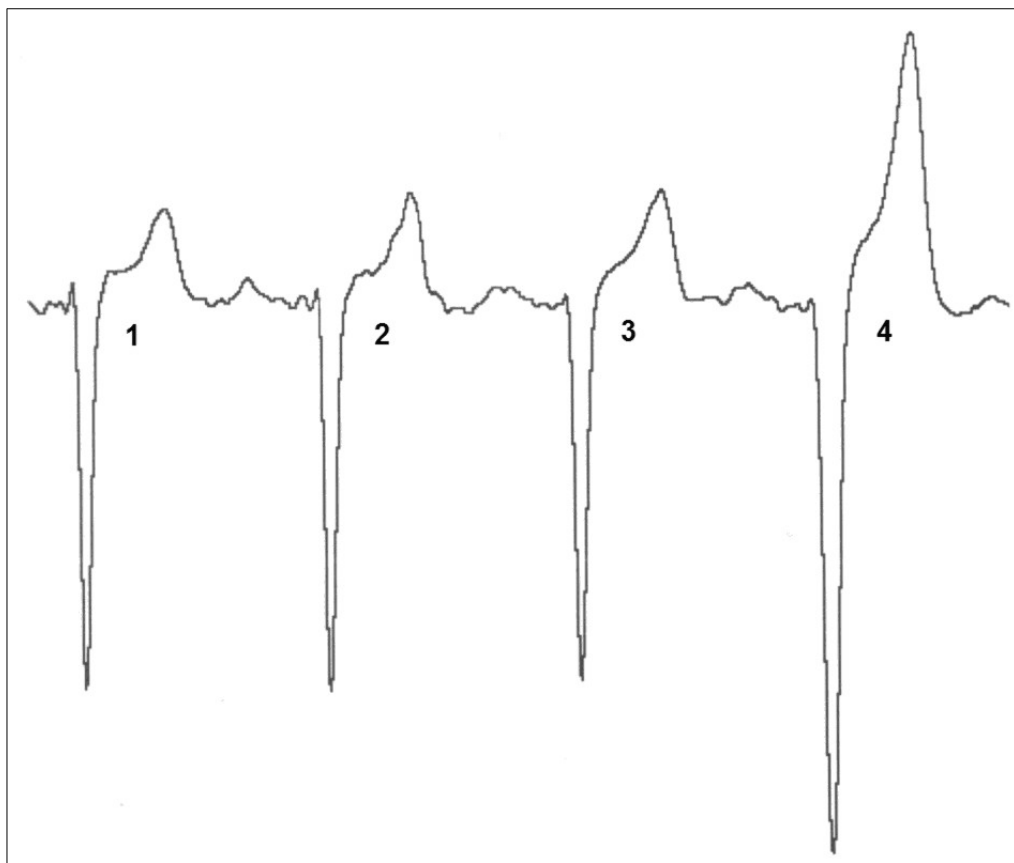

Exemplo de traçado 1


O traçado acima possui duas morfologias diferentes: uma referente aos três complexos normais e outra referente à extrassístole. De acordo com a definição acima, a morfologia dominante neste traçado é a dos complexos normais. Desta forma, o complexo representativo deste traçado será a média dos complexos 1, 2 e 3, como visto na figura a seguir:



Complexo representativo do exemplo 1

15. Recursos Adicionais

Outro exemplo, do mesmo paciente:

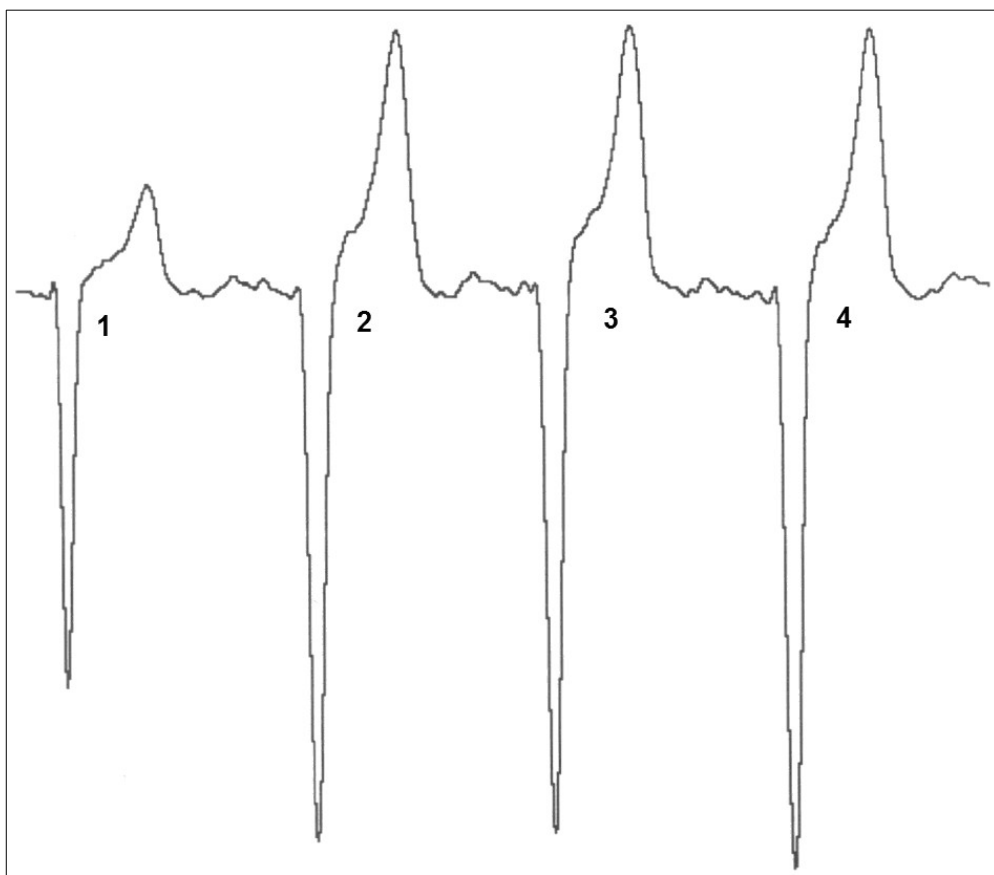

Exemplo de traçado 2


Novamente, o traçado possui duas morfologias diferentes: uma referente ao complexo normal e outra referente às três extrassístoles. Agora, a morfologia dominante é a referente às extrassístoles. O complexo representativo deste traçado será a média dos complexos 2, 3 e 4, como visto na figura abaixo:



Complexo representativo do exemplo 2

15.1.2. Convenções adotadas


As figuras e tabelas a seguir mostram algumas das convenções adotadas:

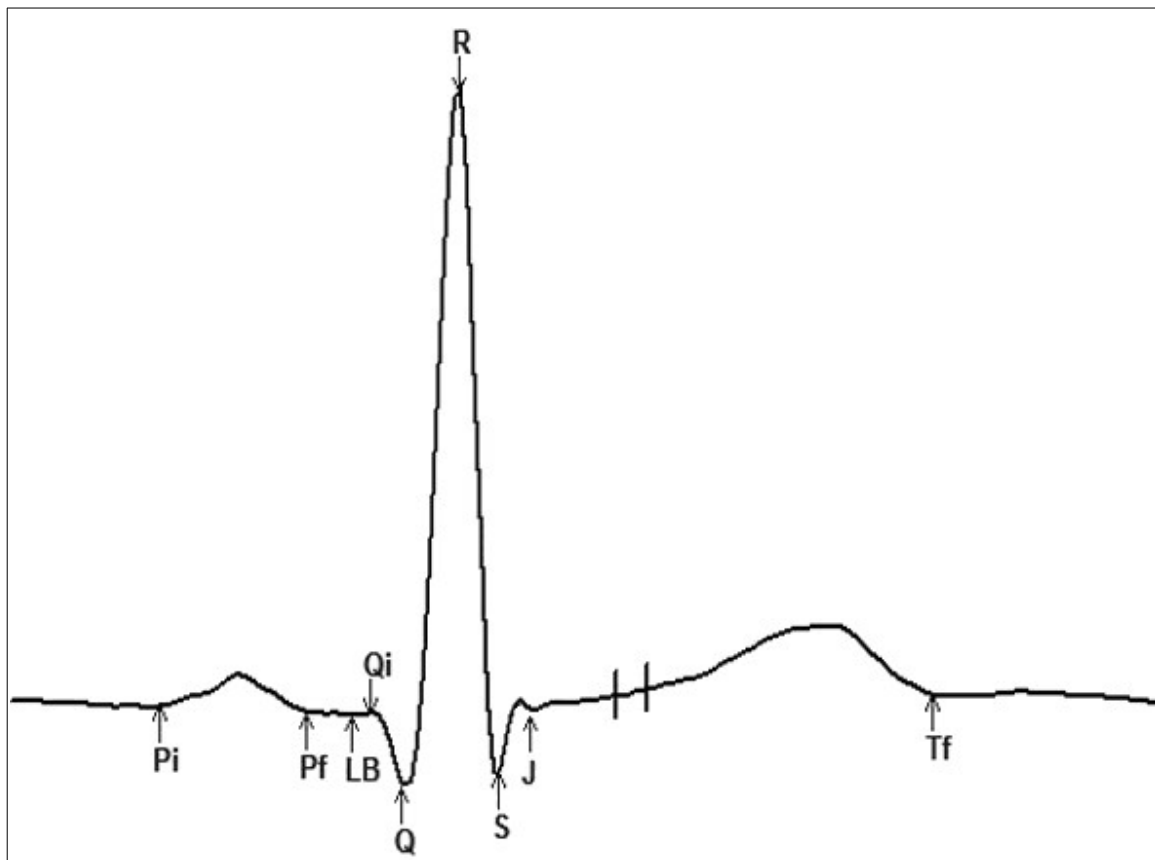

Pontos de um complexo representativo

Ponto	Significado
P_i	Início da onda P
P_f	Fim da onda P
LB	Referência de linha de base
Q_i	Início do complexo QRS
Q	Pico da onda Q
R	Pico da onda R
S	Pico da onda S
J	Ponto J OBS.: as duas barras verticais à direita do ponto J e que acompanham seu movimento indicam, respectivamente, J+60ms e J+80ms (ponto Y)
T_f	Fim da onda T


15. Recursos Adicionais

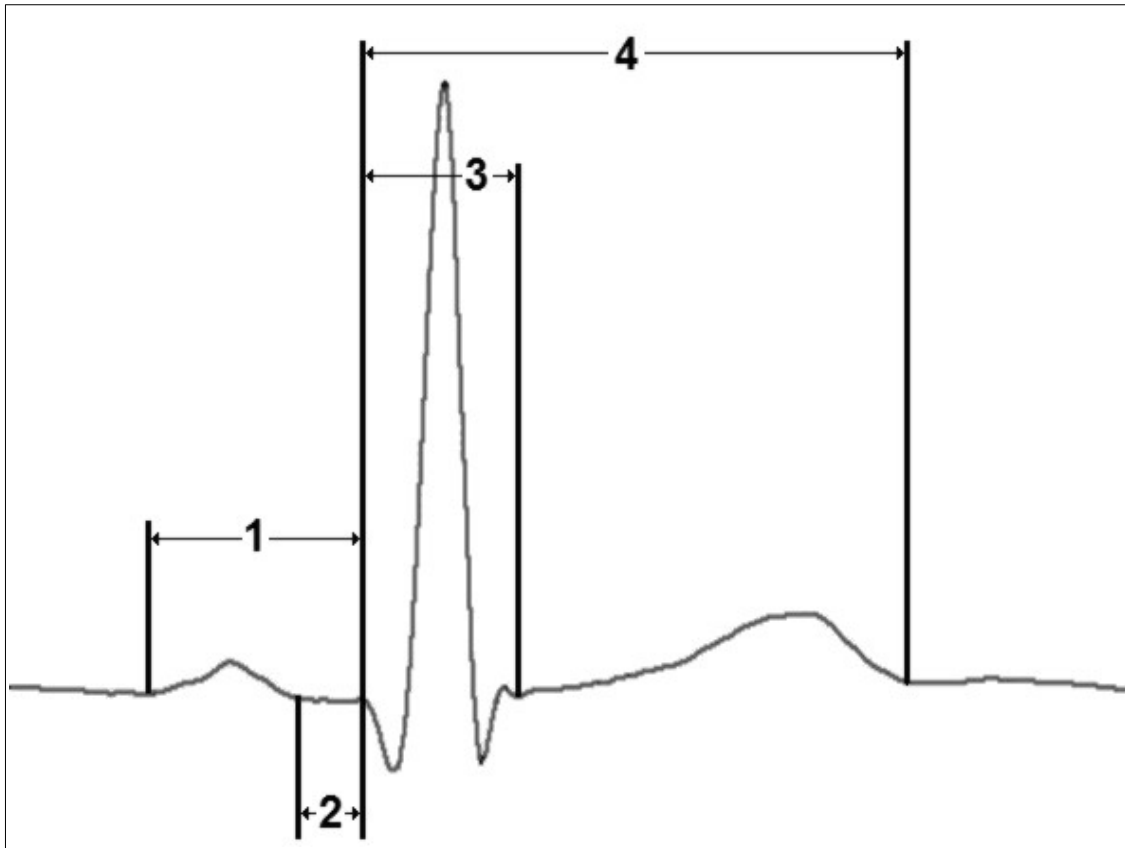


Intervalos e segmentos em um complexo representativo

Número	Significado	Abreviatura
1	Intervalo PR (ms)	Interv. PR
2	Segmento PR (ms)	Segm. PR
3	Duração do QRS (ms)	QRS
4	Intervalo QT (ms)	QT

15.1.3. Medições no complexo representativo

Para usar o *Módulo de Medidas* é necessário estar com um exame aberto na tela de *Visualização de traçados*. Use o botão  (*Módulo de medidas*) para acessar este recurso no registro de ECG corrente. A seguir são introduzidos os conceitos deste recurso.

A figura abaixo mostra a tela principal do módulo de medidas automáticas nos complexos representativos (caso o usuário solicite o pré posicionamento dos pontos fiduciais):

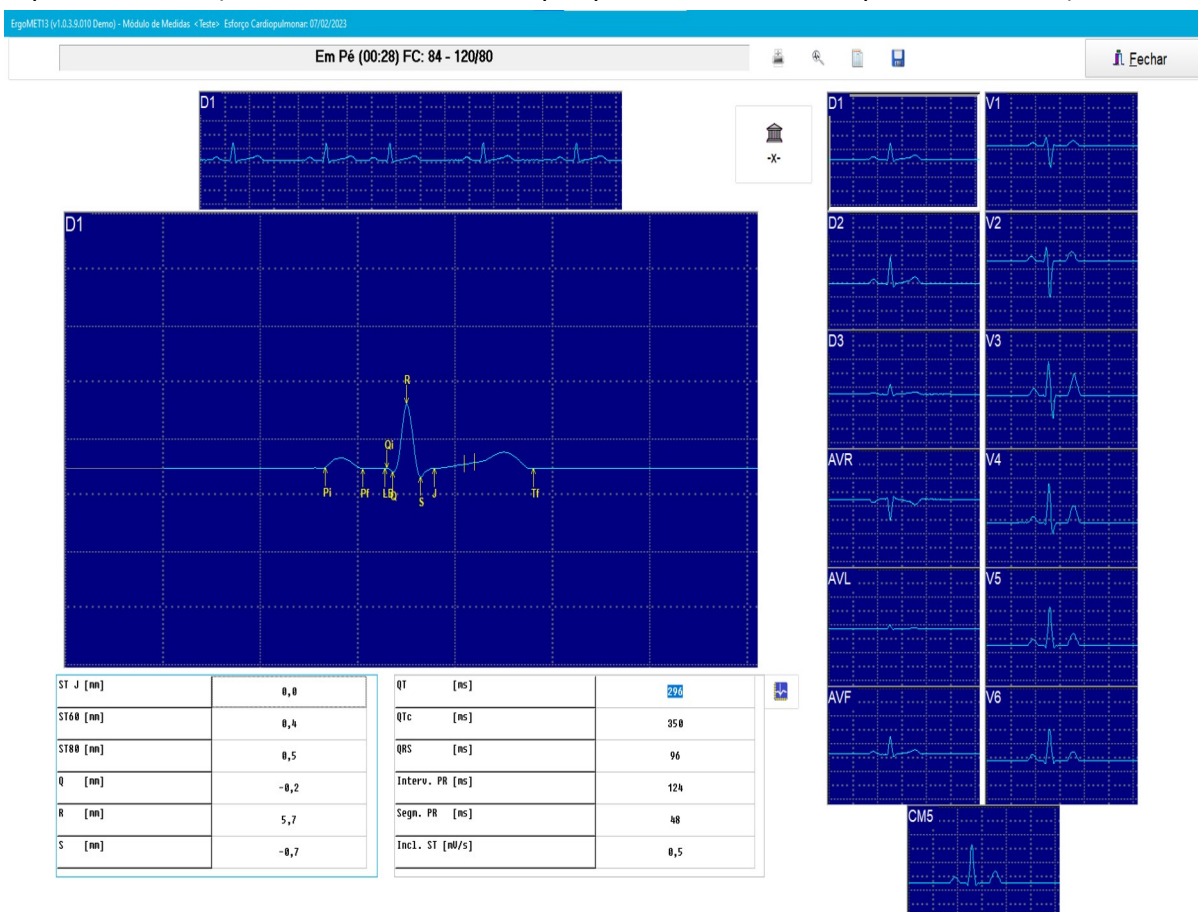


Os pontos fiduciais indicados por solicitação do operador são apenas uma sugestão baseado em heurística (foram posicionados usando metodologias puramente matemáticas). A distinção das diversas ondas em certas morfologias é intrinsecamente dúbia, até mesmo para um clínico experiente como, por exemplo, quando ocorre a fusão das ondas T e P em frequências cardíacas elevadas. Por estas razões, a existência e o posicionamento de todos os pontos, em todas as derivações, deve ser verificada e corrigida pelo médico responsável pelo exame, uma vez que as medições são baseadas nestes pontos.

De acordo com a metodologia descrita no item Complexo Médio versus Complexo Representativo (página 84), temos aqui o complexo representativo da derivação corrente (indicada no canto superior esquerdo do complexo ampliado e pela moldura no respectivo botão de troca de derivação). Sobre o sinal, podemos ver os marcadores com as sugestões de posicionamento dos pontos referenciais para medição. Estes pontos podem ser movidos livremente, de forma que qualquer erro de posicionamento por parte do programa pode ser corrigido pelo usuário. Na figura abaixo, o ponto T_f (final da onda T) está obviamente fora de posição. Para corrigi-la, basta pressionar o botão esquerdo do mouse sobre a haste da seta do marcador (surgirá uma reta vertical vermelha para facilitar a visualização), manter o

15. Recursos Adicionais

botão apertado e arrastar o marcador para sua devida posição, conforme mostrado nas figuras subsequentes:

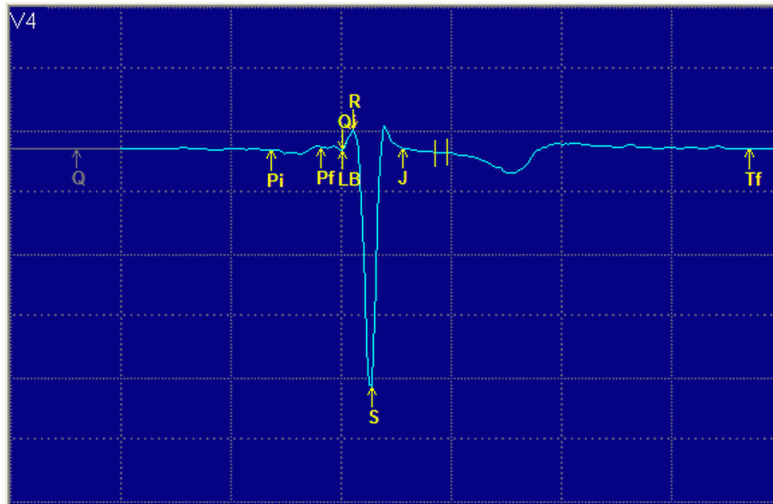

Deseja-se mover o marcador T_f


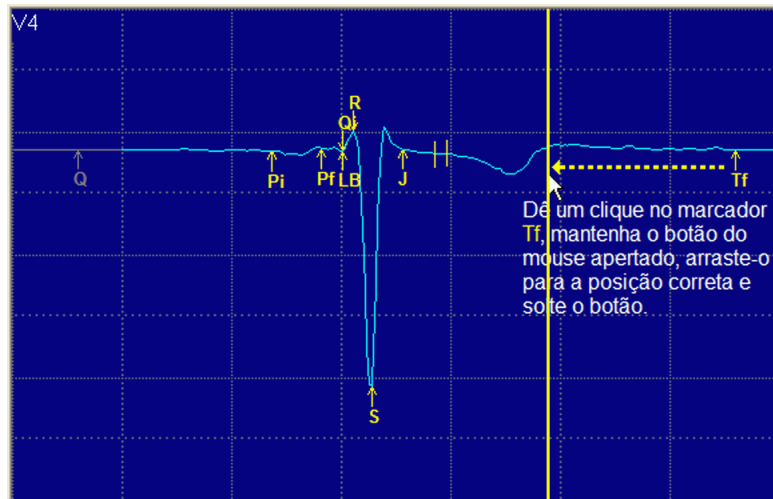


Figura 1: Movendo o marcador T_f




Nova posição do marcador T_f

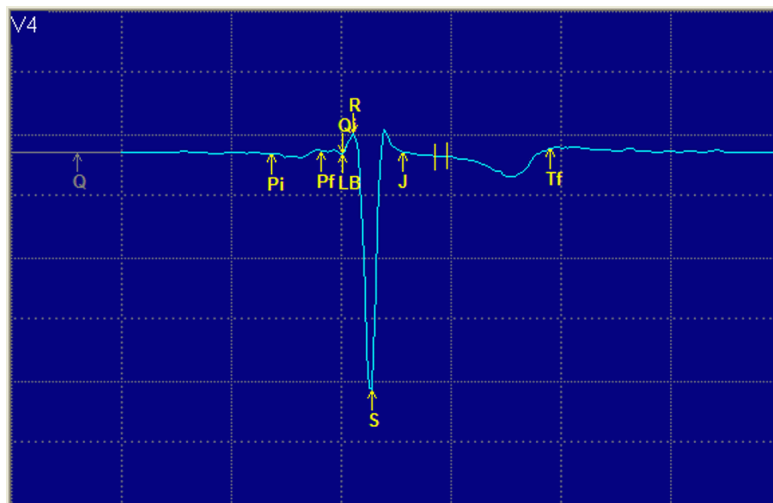

Uma correção feita em uma derivação **não** é repassada automaticamente para as outras devido à diversidade morfológica intrínseca às diversas derivações e à existência de variações fisiológicas normais (especialmente as ligadas à repolarização cardíaca), captadas pelo registro em treze derivações simultâneas.

Caso algum ponto tenha sido movido da posição original calculada pelo programa, ao se fechar esta tela, surgirá a seguinte pergunta:

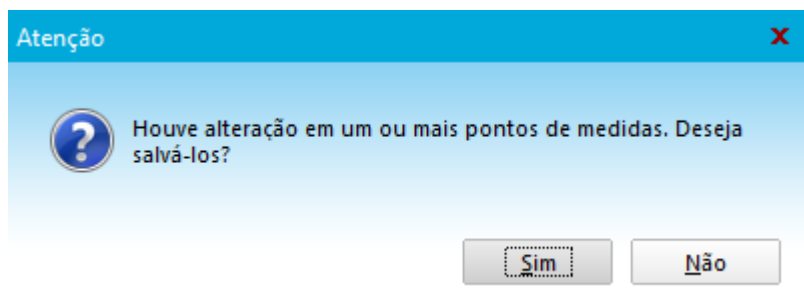

Se a resposta for “Sim”, o programa gravará a posição de todos os pontos em todas as derivações e não irá mais calculá-las, tentando se impor à vontade do médico responsável que, desta forma, sempre tem a última palavra, com deve sempre ser. Caso não deseje gravar as alterações feitas, basta clicar em “Não”.

Acima do complexo representativo corrente, temos o registro completo usado em seu cálculo (após a necessária filtragem), o que permite ao usuário avaliar se o programa discerniu bem as diversas morfologias presentes no sinal, descartando aquelas não pertencentes à morfologia predominante. Caso haja alguma incongruência, recomenda-se a não utilização de médias neste registro.

Caso o programa não identifique um determinado ponto (seja porque ele não existe no complexo corrente ou por falha na sua identificação), o mesmo será colocado sobre o sinal na área indicada na primeira figura desta seção por Zona Neutra, correspondente aos primeiros cinco milímetros do gradeado (repare a cor cinza e o posicionamento do marcador relativo ao pico da onda Q na referida figura). Todos os pontos posicionados sobre esta área serão considerados pelo programa como não aplicáveis ao complexo corrente. Caso o programa considere como válido um ponto que na realidade não existe, basta movê-lo para a zona neutra e ele será desconsiderado nas medições. De forma análoga, se um ponto for erroneamente considerado pelo programa como não aplicável e colocado na zona neutra, basta movê-lo para a posição correta para que ele passe a ser considerado como válido. Para mover um ponto, basta seguir as instruções descritas anteriormente.





Os pontos relativos ao início e fim das ondas Q, R e S são calculados automaticamente a partir da posição do pico das referidas ondas e não são mostrados para evitar uma "superpopulação" de marcadores na tela, que dificultaria bastante o entendimento da mesma bem como a movimentação dos pontos. Especificamente no Eletrocardiograma, são calculados também os dados relacionados a eventuais ondas R' e S'.


Caso dois ícones fiquem "encavalados", basta tentar mover um deles e ver qual será movido (o programa testa os ícones sempre da esquerda para a direita, a saber: Pi, Pf, LB, Qi, Q, R, S, J, Tf). Caso seja necessário, mova um dos ícones encavalados para uma posição temporária, posicione o outro ponto no local desejado e restaure o primeiro para sua posição original.

15. Recursos Adicionais


Para facilitar o posicionamento dos pontos, pode-se efetuar um zoom na área de interesse, da mesma forma vista em *Zoom de Sinal* (página 47) isto é: pressione o botão esquerdo do mouse no canto superior esquerdo da área de interesse e arraste-o, mantendo o botão pressionado, em direção ao canto inferior direito da área de interesse. Durante o processo é mostrado um retângulo mostrando a área correntemente selecionada. Quando o botão for liberado, a área contida no retângulo será expandida, passando a ocupar toda a janela. Para desabilitar o zoom, basta fazer o inverso: pressione o botão esquerdo do mouse em qualquer ponto da janela e arraste-o, mantendo o botão pressionado, para cima e para a esquerda por cerca de um centímetro e libere o botão.

Para trocar a derivação corrente, basta dar um clique no botão adequado na área indicada por Botões para troca de derivação na figura acima.

Para imprimir os complexos representativos e respectivas medições em todas as derivações, basta um clique no botão  (*Imprimir medidas do traçado corrente*). Veja um exemplo das medidas impressas no anexo *Impressão do Módulo de medidas*, página 128. O botão  (*Imprime medidas em arquivo*) permite salvar o mesmo relatório em arquivo nos formatos BMP ou JPG, para fácil envio pela internet, utilização em trabalhos, etc. Veja mais detalhes em *Exportação para arquivo de imagem*, página 104.

No canto inferior esquerdo da tela principal do Módulo de Medidas, encontra-se uma tabela (indicada na figura por Tabela reduzida de medições) com as principais medições feitas na derivação corrente, de acordo com o posicionamento dos pontos referenciais para medição. A figura a seguir mostra a tabela completa, com todas as medidas em todas as derivações. Para visualizá-la, basta dar um clique duplo sobre qualquer ponto da tabela reduzida ou clicar no botão  (*Tabela de medidas*).

	D1	D2	D3	AVR	AVL	AVF	V1	V2	V3	V4	V5	V6	CM5
P+ amp.	0,9	1,5	0,6	—	—	1,0	1,1	1,8	2,3	2,0	2,0	2,1	2,0
P- amp.	—	—	—	-1,3	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—
P dur.	76	76	76	76	—	84	80	84	80	80	84	80	84
Q amp.	-0,2	-0,4	—	—	—	-0,2	—	—	—	-0,8	-0,8	-1,1	-0,8
Q dur.	20	20	—	—	—	20	—	—	—	16	20	24	20
R amp.	5,7	9,1	3,4	0,3	1,3	6,2	3,0	5,1	11,5	13,2	13,0	10,6	13,0
R dur.	40	40	44	20	44	40	36	36	48	48	56	56	56
S amp.	-0,7	-1,1	-0,4	-7,4	—	-0,7	-7,4	-11,9	-7,9	-3,9	-0,8	-1,0	-0,8
S dur.	36	32	24	40	—	32	48	44	36	40	20	16	20
R' amp.	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
R' dur.	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S' amp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S' dur.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ST J	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
ST J + 20 ms	0,1	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	0,0
ST J + 40 ms	0,2	0,3	0,1	-0,3	0,1	0,2	0,0	0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1
ST J + 60 ms	0,4	0,6	0,2	-0,5	0,1	0,4	0,0	0,3	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	0,0
ST J + 80 ms	0,5	0,9	0,3	-0,7	0,1	0,6	0,1	0,3	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Incl. ST (mV/s)	0,5	0,8	0,3	-0,6	0,0	0,6	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T+ amp.	1,5	2,3	0,9	—	—	1,6	1,8	3,4	7,1	5,6	4,1	3,0	4,1
T- amp.	—	—	—	-1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
QRS dur.	96	92	84	92	72	92	92	88	96	104	104	104	104
Interv. QT	280	300	284	300	—	300	292	292	288	292	292	296	292
Interv. QTc	331	355	336	355	—	355	345	345	341	345	345	350	345
Interv. PR	124	124	132	124	—	128	116	128	136	116	120	116	120
Sigmn. PR	48	48	56	48	—	44	36	44	56	36	36	36	36

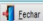Unid. amplitude: (mm) 

Nesta tela, o cursor pontilhado retangular (semelhante ao de uma planilha eletrônica) serve para facilitar a leitura e verificação das medições: para posicioná-lo num determinado campo, basta dar um clique do mouse sobre o mesmo, ou usar as setas (\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow) do teclado. Para voltar à tela anterior visualizando a derivação indicada pela coluna do cursor, basta dar um clique duplo, permitindo a fácil verificação das medições: se um determinado valor parecer estranho, basta posicionar o cursor sobre ele dar um clique duplo para voltar à tela do complexo representativo e verificar se os pontos relativos a esta medição estão corretamente posicionados. No exemplo acima, o valor do QT na derivação V4 (736 ms) está errado e em desacordo com o das demais derivações. Para verificar a causa, basta dar um clique duplo no valor para retornar à tela anterior (já em V4), para notar que o marcador para o fim da onda T está totalmente fora de lugar, bastando arrastá-lo para a posição correta para corrigir os valores de QT e QT_c nesta derivação.

15.2. RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS

Os relatórios administrativos são usados para ajudá-lo na gestão de seu negócio. Na tela principal do programa, clique no menu *Relatórios* para acessar as cinco opções de balancetes administrativos que podem ser gerados para seu negócio.

15.2.1. Relatório comparativo breve

O relatório *Comparativo Breve* faz um levantamento geral nas modalidades de pagamento (*Particular, Cortesia, Grátis e Convênio*) por tipo de exame (*ECG ou Ergometria*). Quando acessado, será aberta uma janela, como na figura a seguir, dando-lhe as opções de itens que deseja incluir no relatório (*Faturamento, Gráficos e Exames Incompletos*).

Itens do Relatório

Incluir no Relatório

- Faturamento
- Gráficos
- Incluir exames incompletos (sem laudo)
 - Incompletos

Tipo do Exame

- Ergometria
- ECG
- Ergoespirometria
- Estresse Farmacológico
- Visualizar

Faixa

De: 08/01/2023 Até: 07/02/2023

Conteúdo

- Todos
- Selecionados

OK Cancela

Defina a *Faixa* de datas nos campos *De* e *Até*. Use o botão ▼ selecioná-las. Clique no botão ✓ (OK) para gerar o relatório (ver anexo Impressão dos Relatórios Administrativos, página 132).

15.2.2. Relatório comparativo extenso

O relatório *Comparativo Extenso* é semelhante ao *Comparativo Breve*, exceto que neste caso o programa exibe o faturamento individual de cada convênio. Quando acessado, será aberta uma janela, como na figura a seguir, dando-lhe as opções de itens que deseja incluir no relatório (*Faturamento, Gráficos e Exames Incompletos*).

Defina a *Faixa* de datas nos campos *De* e *Até*. Use o botão ▼ para selecioná-las. Clique no botão ✓ (OK) para gerar o relatório (ver o anexo Impressão dos Relatórios Administrativos, página 132).

Itens do Relatório

Incluir no Relatório

- Faturamento
- Gráficos
- Incluir exames incompletos (sem laudo)
 - Incompletos

Tipo do Exame

- Ergometria
- ECG
- Ergoespirometria
- Estresse Farmacológico
- Visualizar

Faixa

De: 08/01/2023 Até: 07/02/2023

Conteúdo

- Todos
- Selecionados

OK Cancela

15.2.3. Relatório de exames por convênio

Este relatório gera uma lista de *Exames por convênio*, incluindo os nomes dos pacientes. Quando selecionado, será aberta uma janela tal como na figura a seguir. Nela, você poderá escolher os itens que serão usados no relatório (*Faturamento, Gráficos e Exames Incompletos*). Você deverá especificar para qual tipo de exame deseja o relatório. Especifique também se deseja incluir *Todos* os convênios ou se deseja apenas aqueles *Selecionados* na lista.

Defina a *Faixa* de datas nos campos *De* e *Até*. Use o botão ▼ para selecioná-las. Clique no botão ✓ (OK) para gerar o relatório (ver anexo Impressão dos Relatórios Administrativos, página 132).

15.2.4. Relatório comparativo por médico responsável

Este relatório gera um *Comparativo por médico responsável*, incluindo a quantidade de exames por modalidade de faturamento que cada um fez. Você poderá escolher os itens que serão usados no relatório (*Faturamento e Exames Incompletos*). Você deverá especificar para qual tipo de exame deseja compor o relatório.


Defina a *Faixa* de datas nos campos *De* e *Até*. Use o botão ▼ para selecioná-las. Clique no botão ✓ (OK) para gerar o relatório (ver anexo Impressão dos Relatórios Administrativos, página 132).

15.2.5. Relatório comparativo por médico solicitante

Este relatório gera um *Comparativo por médico solicitante*, incluindo a quantidade de exames que cada um fez. Você deverá especificar para qual tipo de exame deseja compor o relatório.


Defina a *Faixa* de datas nos campos *De* e *Até*. Use o botão ▼ para selecioná-las. Clique no botão ✓ (OK) para gerar o relatório (ver anexo Impressão dos Relatórios Administrativos, página 132).

15.3. INSERINDO FRASES PRÉ-PROGRAMADAS

Em alguns locais do programa, na edição dos Dados da Anamnese (página 39), na Carteira de ECG (página 100), na Erro: Origem da referência não encontrada (página Erro: Origem da referência não encontrada) e na Edição das Conclusões Finais (página 46) é possível inserir frases pré-programadas através do botão  (*Inserir frases*). Já o cadastro das frases somente poderá ser feito na tela principal do programa, veja mais detalhes em Cadastro de Frases pré-programadas, página 54.

Quando solicitado para inserir frases, o programa abrirá uma janela tal como na figura a seguir. As *Frases disponíveis* são organizadas em grupos, como na lista à esquerda na janela. Os grupos serão visíveis conforme o local onde você solicitou a inserção de frases. Por exemplo, quando estiver na edição da anamnese, o grupo *Medicamentos* estará disponível, mas o grupo *Carteira de ECG* não estará.


15. Recursos Adicionais

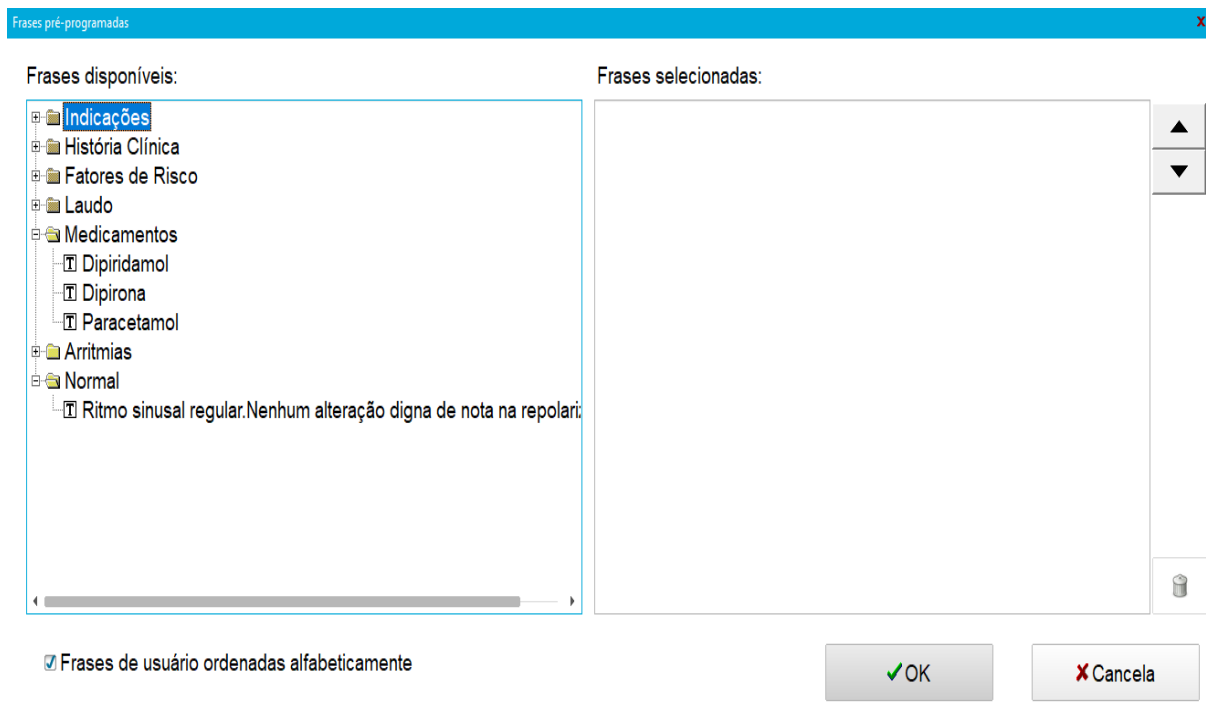






Clique no sinal de “+” para abrir o grupo de frases e em seguida elas aparecerão logo abaixo. Para escolher uma frase, dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela e, em seguida, ela passará ao lado direito na lista de *Frases selecionadas*. Você poderá mudar a ordem na lista das frases selecionadas usando os botões ▲ (*Mover acima*) e ▼ (*Mover abaixo*). Se precisar descartar a frase, use o botão 🗑️ (*Remover seleção*).

15.4. REGISTRO CONTÍNUO DE ECG

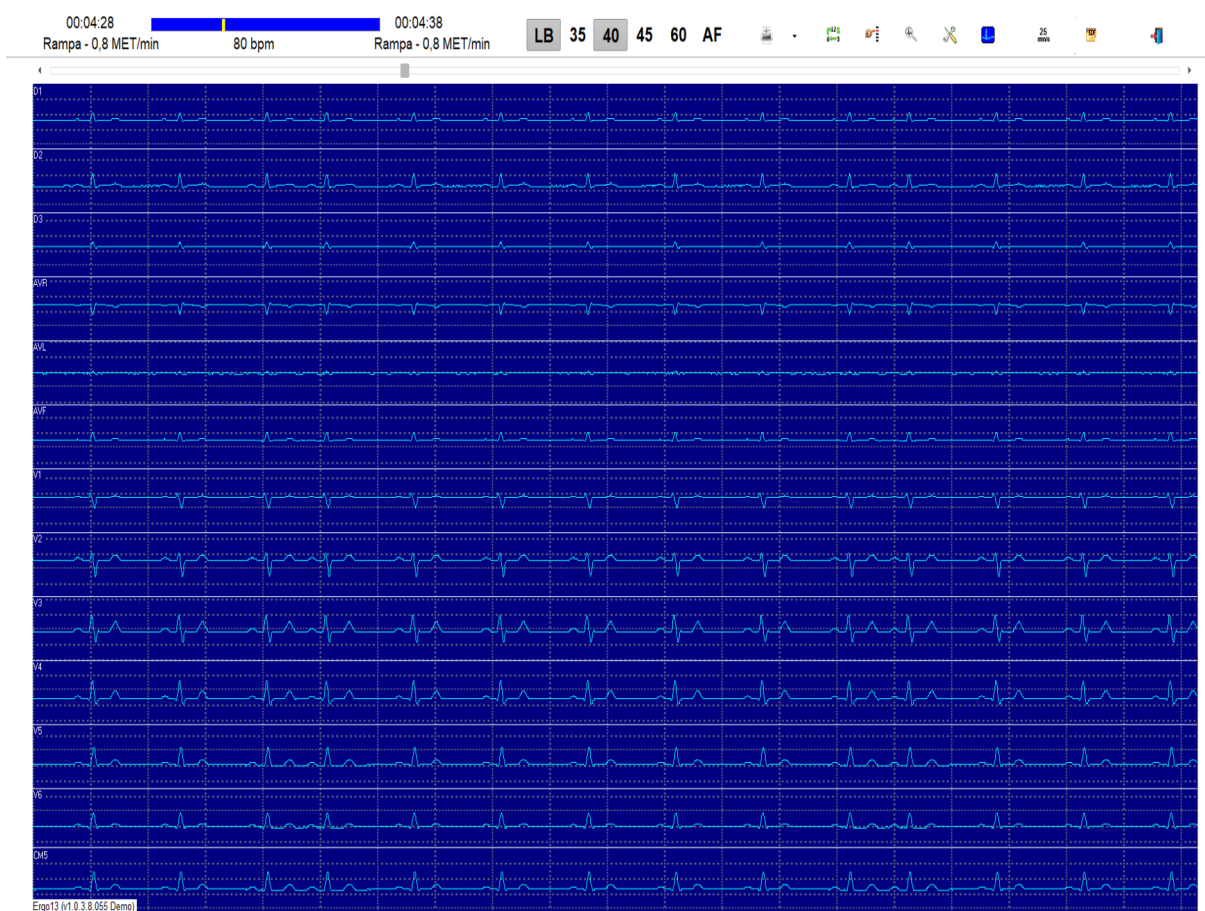O *Registro contínuo de ECG* é um recurso disponível somente na tela de Visualização de Traçados (página 44), logo após interrupção da monitoração dos sinais durante o exame ou através de um exame aberto que tenha este registro guardado. Esse registro armazena a evolução dos sinais de ECG do início ao término da monitoração, incluindo o ECG e o esforço. Isto permite ao usuário inspecionar os sinais na tentativa de encontrar algum evento não registrado durante o exame.


Para abrir este recurso, clique no botão  (*Registro Contínuo de ECG*) a partir da tela de visualização de traçados. Em seguida, será aberta uma janela semelhante a da figura seguinte. Os botões de filtro são os mesmos daqueles nas telas de monitoração de sinais e de visualização de traçados, e podem ser aplicados da mesma forma sobre os sinais do registro contínuo.




Use o botão  (*Canais Visualizados*) para alternar entre o número de derivações visualizadas. O botão  (*Velocidade*) possibilita alterar a velocidade do traçado entre 25 mm/s e 50 mm/s. Para visualizar melhor uma determinada derivação utilize o botão  (*Zoom de Sinal*), veja mais detalhes como usá-lo em Zoom de Sinal, página 47. Use o botão  (*Ir para*) encontrar o início do basal, pré-esforço, esforço ou recuperação. Mas você poderá deslocar o traçado através da barra horizontal deslizante. Observe que as linhas amarelas

15. Recursos Adicionais



que cortam verticalmente a tela indicam que ali foi feito um registro durante o exame ou que há uma transição de fase.

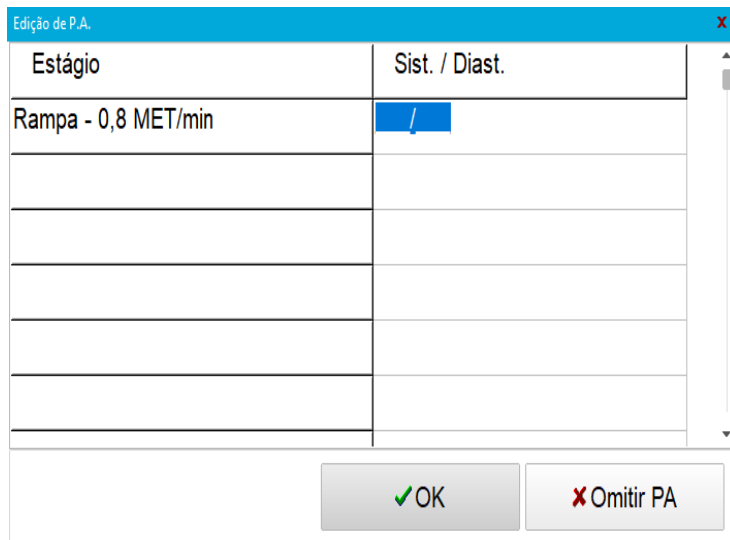
Para registrar os sinais correntes na tela clique no botão  - (*Registrar sinal*). Em seguida o programa solicitará a edição de PA, conforme a figura a seguir. Você pode digitar diretamente os valores de pressão ou, se preferir, poderá cancelá-la em perder o registro.




A dialog box titled "Edição de P.A." with a close button (X) in the top right corner. It contains a table with two columns: "Estágio" and "Sist. / Diast.". The first row has "Rampa - 0,8 MET/min" in the "Estágio" column and a blue box with a slash "/" in the "Sist. / Diast." column. Below the table are two buttons: "OK" with a green checkmark and "Omitir PA" with a red X.

Estágio	Sist. / Diast.
Rampa - 0,8 MET/min	/



A folha impressa do registro contínuo é, por padrão, orientada na posição “deitada” e em uma única folha. Então o registro impresso é muito semelhante ao que se vê na tela. No entanto, se você clicar no botão  ao lado do botão  então será possível alterar o modo de imprimir (e registrar) o registro contínuo. Existem duas opções de impressão do registro contínuo: *Registro Longo (2,5 mm/mV)* e *Registro Padrão (13 Derivações – 12+Longa e respectivas médias)*. Nos dois primeiros, a página é impressa na orientação “deitada”. No terceiro, a orientação é “em pé”, semelhante aos registros que são efetuados durante o exame.

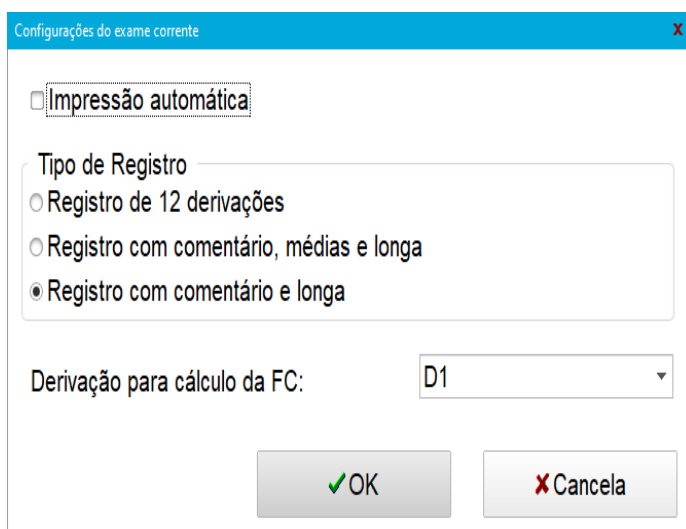

O botão  (*Configurações*) dá acesso a algumas alterações possíveis no comportamento do registro contínuo. Ao usá-lo será aberta uma janela, tal como na figura seguinte




A dialog box titled "Configurações do exame corrente" with a close button (X) in the top right corner. It contains a checkbox labeled "Impressão automática" which is unchecked. Below it is a section titled "Tipo de Registro" with three radio button options: "Registro de 12 derivações", "Registro com comentário, médias e longa", and "Registro com comentário e longa" (which is selected). Below this is a label "Derivação para cálculo da FC:" followed by a dropdown menu showing "D1". At the bottom are two buttons: "OK" with a green checkmark and "Cancela" with a red X.

Nas configurações do exame no registro contínuo você poderá ativar ou desativar a *Impressão automática*, alterar a *Derivação para cálculo da FC* e alterar o *Tipo de registro*. Observe que esta última opção somente terá efeito se você usar optar pelo modo de registro padrão, como discutido anteriormente.

O botão  (*Módulo de Medidas*) abre o recurso discutido na seção Módulo de Medidas, página 84. Contudo, ao usá-lo, o programa obrigatoriamente fará um registro no registro contínuo, solicitando inclusive a edição da PA, como se estivesse usado o botão  .


Para fechar a tela do *Registro Contínuo* ou *FullDisclosure* use o botão  no canto superior direito da janela. Em seguida o programa retornará à tela de visualização de traçados. Por padrão, o registro contínuo não é guardado juntamente com o exame. Ao clicar nos botões *Laudado* ou *Fechar* na tela de visualização de traçados ele será descartado. Mas, eventualmente, você poderá guardá-lo. Naquela tela, clique no botão  (*Configurações do exame corrente*) para abrir a janela tal como mostrada na figura a seguir, marque a caixa *Mantém registro contínuo de ECG*. Ao selecionar esta configuração, o programa informará que o registro contínuo ocupa uma grande área no disco. Confirme se deseja guardá-lo assim mesmo.

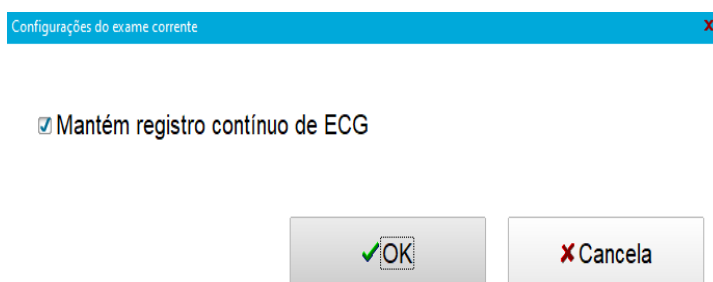


O *registro contínuo de ECG* consome cerca 338 KB de espaço no disco para cada minuto de registro. Por exemplo, em um exame de 10 minutos o arquivo associado ao registro contínuo ocupará aproximadamente 3,3 MB. Portanto, mantê-los continuamente poderá sobrecarregar seu computador. Veja como eliminá-los em Apagando exames (página 73).

Se você optou por guardar o registro contínuo, então, ao fechar a tela de visualização de traçados o programa exibirá uma janela conforme a figura a seguir, indicando o quanto o arquivo do registro contínuo ocupa seu disco e se você deseja mantê-lo mesmo assim.

15.5. CARTEIRA DE ECG

A *Carteira de ECG* é um documento pequeno que o paciente poderá portá-lo em seu bolso. Ela pode conter algumas informações úteis que o ajudarão numa situação de emergência. Para acessar este recurso, você deverá estar na tela de Visualização de Traçados (veja detalhes na página 44). Escolha nesta tela registro será usado como base para construção da carteira de ECG e em seguida clique no botão  (*Carteira de ECG*). A figura a seguir mostra a janela deste recurso.

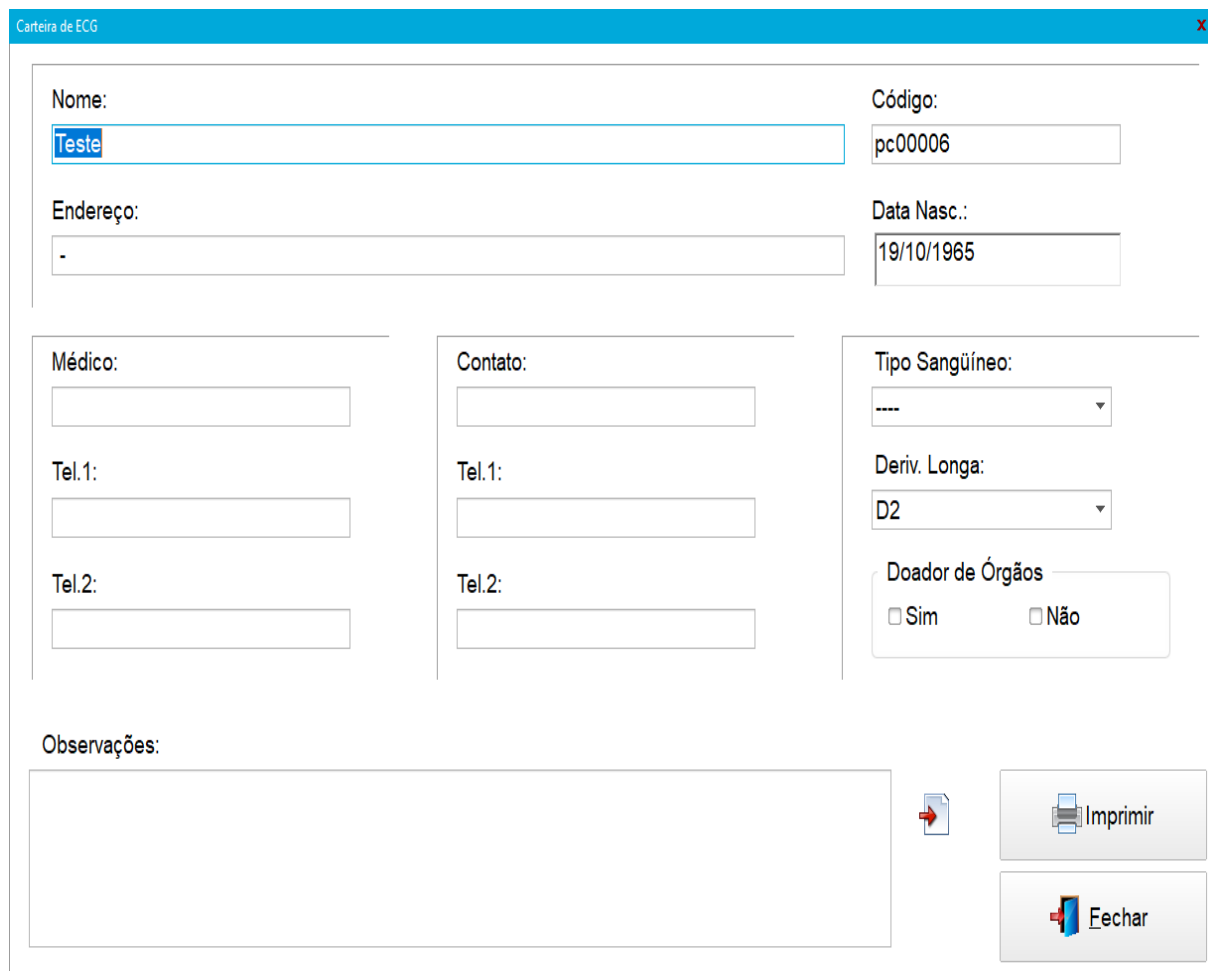

Carteira de ECG

Nome: Código:

Endereço: Data Nasc.:

Médico:

Contato:

Tel.1:

Tel.1:

Tel.2:



Tel.2:


Tipo Sanguíneo:


Deriv. Longa:


Doador de Órgãos
 Sim Não

Observações:

  Imprimir

 Fechar

Todos os campos da carteira podem ser editados. Contudo, alguns deles são automaticamente carregados a partir dos dados cadastrados do paciente. Use o botão  (*Inserir Frases*) para inserção de frases pré-programadas. Consulte a seção *Inserindo frases pré-programadas* (página 95) para mais detalhes.


Quando estiver pronto, clique no botão  (*Imprimir*) para realizar a impressão da carteira. Em seguida o programa abre uma tela, tal como na figura a seguir, dando-lhe a opção de alterar a margem do papel. Mude-as se necessário e clique novamente em *Imprimir*.


Impressão da Carteira de ECG

Entre com a distância das margens desejadas na impressão:


Margem Horizontal (mm):


Margem Vertical (mm):





A carteira de ECG impressa é semelhante ao que está mostrada na figura a seguir.

 HW Sistemas - HeartWare Ltda. Serviço de Instalação, Treinamento e Suporte Av. Alphonso de Guimarães, 115, Santa Efigênia, Belo Horizonte, MG. 30270-020 - (31) 3461-7226		
Nome	Código	Emissão
Fulano Ciclano de Tal	pc001000	11/04/2007
Endereço	Tipo Sang.	Data Nasc.
Av. Alphonso de Guimarães, 115, BH	O+	23/07/1980
Contato	Fone 1	Fone 2
Beltrana de Tal	(31) 9823-4101	(31) 9631-7226
Médico	Fone 1	Fone 2
Dr. Médico Responsável 1	(31) 3461-7226	(31) 3482-8615
Observações (Doador de Órgãos) Aqui pode-se escrever algumas observações.		

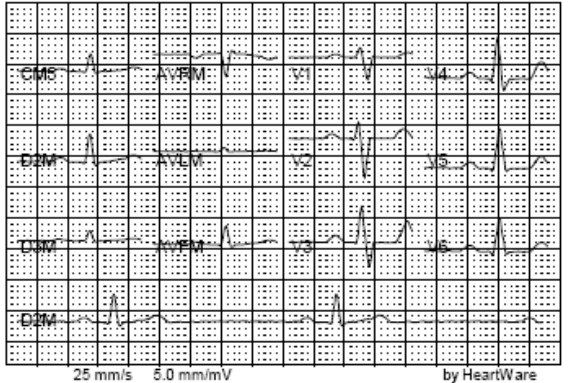

15.6. RECURSOS AVANÇADOS NA EDIÇÃO DAS CONCLUSÕES FINAIS DO LAUDO


Na *Edição das conclusões finais* do laudo existe um recurso que possibilita a inserção de alguns dados do paciente e do exame automaticamente.




Imagine, por exemplo, que você deseja inserir no texto de laudo o número do CRM do médico solicitante. Então, primeiro, você precisaria pesquisar esta informação para depois digitá-la no texto. Isto tornaria o processo muito exaustivo.


A solução naquele exemplo é a inserção de um *Campo automático*, que, quando concluído o laudo, será substituído pelo valor ou dado desejado. Um campo automático é uma palavra especial, escrita sempre em letras maiúsculas, reservada ao programa, que é colocada entre dois símbolos de @ (arroba).


A figura a seguir mostra um exemplo de laudo preparado com alguns campos automáticos (observe que é possível formatá-los conforme desejado). Considere o exemplo anterior, onde era necessário inserir o CRM do médico solicitante. Deixamos o cursor do editor posicionado no local desejado do texto (usando para isto as setas do teclado) e, em seguida, clicamos com o botão direito do mouse. Um menu surgiu no local e encontramos o campo desejado na opção *Dados gerais* ⇒ *CRM Médico Solicitante*. Assim, o programa insere naquele local do texto a palavra “@CRMEDSOLIC@”. Este é o campo automático relativo ao CRM do médico solicitante.

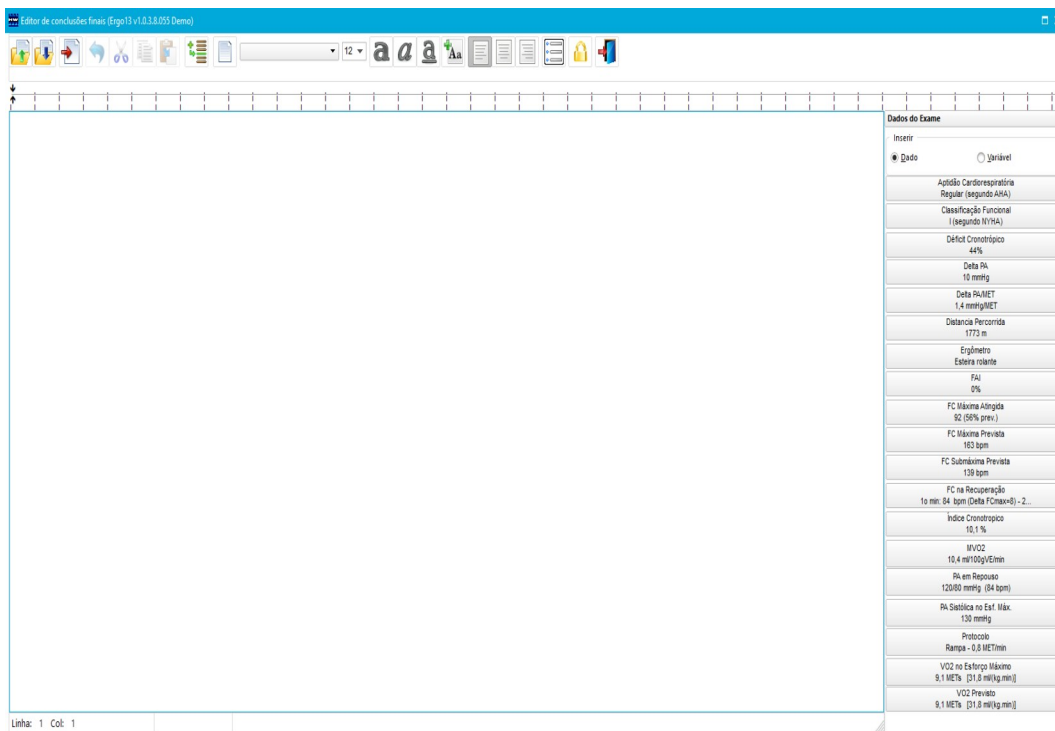15. Recursos Adicionais





Para saber como o texto do laudo será impresso, clique no botão  (*Visualiza*) e a janela de *Visualização* será aberta, tal como na figura a seguir. Nesta janela, o botão  (*Transforma em texto*) faz a transformação definitiva dos campos por seus valores, como mostrados na visualização. Para fechar esta janela e voltar à edição do laudo, clique no botão  (*Fecha*).

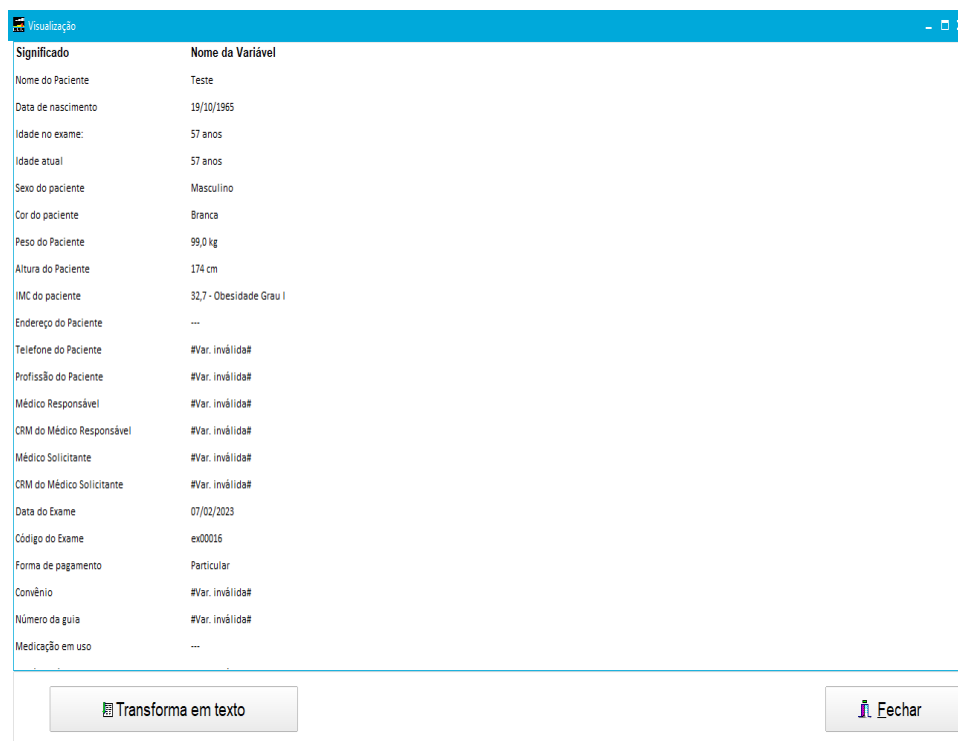


Outro recurso muito útil na edição do laudo é o uso de *Modelos de laudo*. Você pode digitar um texto de laudo como modelo, com ou sem os campos automáticos e usá-lo sempre que necessário em seu dia-a-dia. Uma vez digitado, clique no botão  (*Salvar modelo*) para guardar o modelo de laudo em um arquivo. Na janela *Salvar laudo como modelo*, como mostrada a seguir, digite um nome para o modelo no campo *Nome do arquivo*. Se desejar

salvar em outra pasta, mude-a no campo *Salvar em* (use a seta ▼). Confirme a gravação no botão *Salvar*.

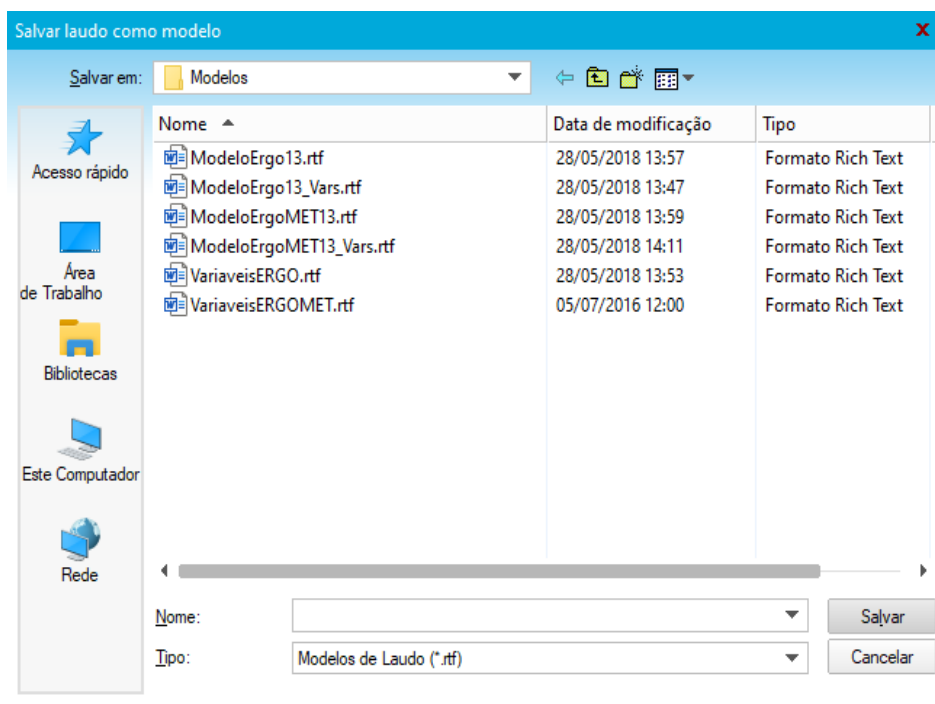


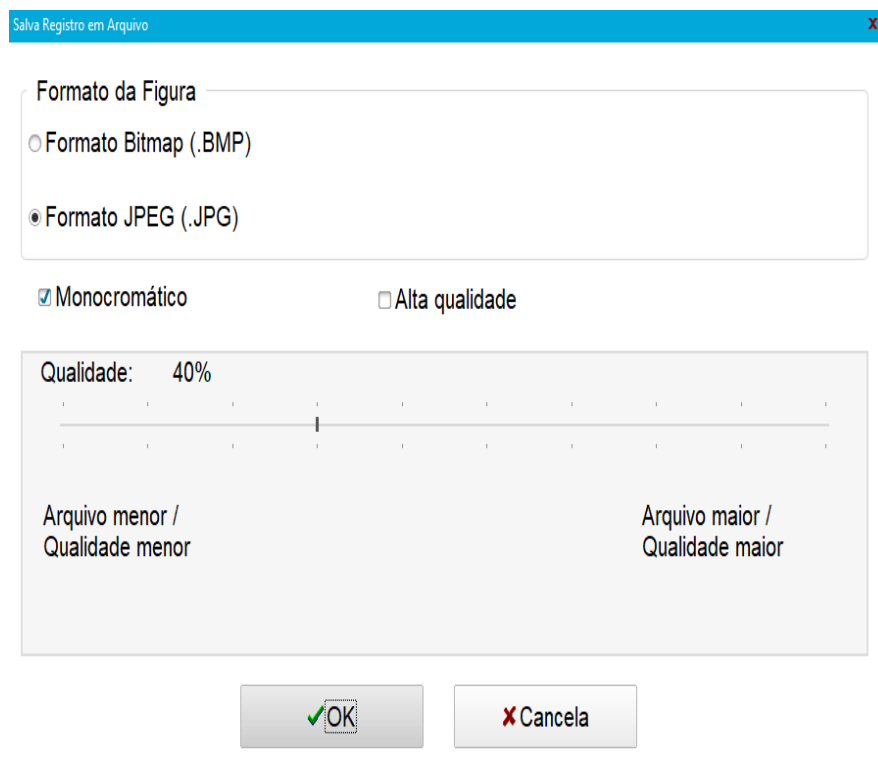
Toda vez que entrar na *Edição das conclusões finais* do laudo você poderá abrir algum modelo de laudo clicando no botão  (*Abrir Modelo*). Na janela *Abrir modelo de laudo existente*, localize o arquivo e depois clique no botão *Abrir*.

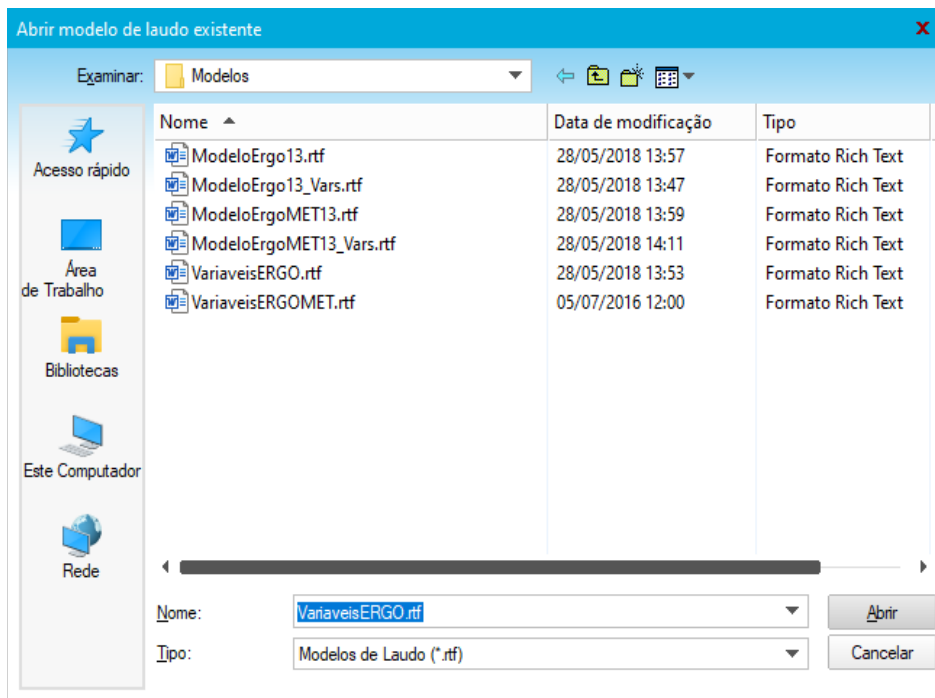



15.7. EXPORTAÇÃO PARA ARQUIVO DE IMAGEM

Em algumas áreas do programa (Visualização de Traçados e Módulo de Medidas, páginas 44 e 84) é possível exportar algumas páginas de impressão para um formato facilmente manipulado pelo Windows. Na verdade, o que o programa faz é imprimir tais folhas em um arquivo de imagem.

Para exportar o traçado no formato de imagem, possibilitando visualizá-lo fora do programa, clique no botão  (*Imprime Registro em arquivo – BMP/JPG*) a partir da tela de visualização de sinais. Em seguida, o programa abrirá a janela semelhante à figura a seguir, na qual se pode escolher entre os dois formatos de figura: *Bitmap (BMP)* ou *JPEG (JPG)*. O formato BMP é o mais simples e universal, podendo ser visualizado e editado em virtualmente qualquer PC, porém seus arquivos são geralmente bem maiores que os no formato JPG, que é o mais utilizado na internet. A opção *Monocromático* é praticamente auto-explicativa: caso esteja marcada, o arquivo gerado terá apenas duas cores (preto e branco), ficando com um tamanho bem menor mas com uma qualidade um pouco menor. Se o formato escolhido por JPEG, então será possível definir a *Qualidade da Imagem* através do cursor na régua horizontal: quanto mais à esquerda (próximo do 0%), menor será o arquivo e pior a qualidade, e quanto mais à direita (próximo do 100%), maior será o arquivo e melhor a qualidade.



Para criar o arquivo, clique no botão  (*OK*), digite um nome para o arquivo, escolha o local e conclua com botão *Salvar*.

O mesmo procedimento está disponível na tela do módulo de medidas através do botão  (*Imprime Medidas em arquivo – BMP/JPG*).

16. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Em qualquer situação não abordada neste capítulo ou caso exista alguma dúvida, procure o Suporte Técnico (veja como contactá-lo na página 1).

16.1. O ELETROCARDIÓGRAFO NÃO LIGA

Sintoma:

A luz de indicação de estado de operação no eletrocardiógrafo não acende.

Solução:

Verifique a correta conexão do cabo de comunicação USB ao amplificador e também a uma porta USB do computador.

Verifique se os drivers de comunicação do cabo USB estão corretamente instalados.

Consulte mais detalhes destas conexões em Identificação das partes (página 13) e Instalando o equipamento (página 32).


Persistindo o problema, entre em contato com um representante mais próximo na Rede de Assistência Técnica (página 111) ou com a Assistência Técnica (página 1).

16.2. PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO

16.2.1. Erro na detecção do pré-amplificador na entrada do programa

Sintoma:


Quando entro no programa surge a mensagem “Não foi possível detectar a presença do pré-amplificador de ECG nesta máquina”.

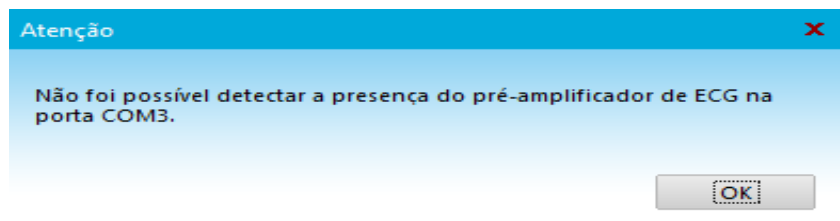

16. Solução de problemas

Solução:

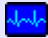

Se essa mensagem surgiu ao entrar no programa, o botão  (*Traçados*) não estará disponível na janela *Dados da Anamnese*, impossibilitando-o de prosseguir com um novo exame.

Verifique se a luz de indicação de estado está acesa no eletrocardiógrafo (amplificador). Verifique se o cabo USB está corretamente conectado ao eletrocardiógrafo e ao computador. Certifique-se que a porta USB à qual o equipamento está conectado é versão 2.0; em caso de dúvida, feche o programa, troque o aparelho para outra porta USB e tente novamente. Consulte mais detalhes destas conexões em Identificação das partes (página 13) e Instalando o equipamento (página 32).

Verifique se o amplificador que está sendo conectado corresponde ao programa em uso. Amplificador ECGV6 só se comunica com o programa ECGV6; no caso dos demais programas, ocorre de forma respectiva.

16.3. PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO

Sintoma:

Inseri a mídia *de Instalação* em meu computador mas o processo de instalação não iniciou automaticamente.

Solução:

Clique no botão *Iniciar* do Windows, escolha *Executar* e digite <disco>:\SETUP.EXE, onde <disco> indica a letra da unidade onde está inserida a mídia. Se isto não funcionar, clique duas vezes sobre o ícone *Meu Computador* que está na *Área de trabalho* do Windows, em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre a unidade que contém a mídia de instalação e escolha *Abrir*. Em seguida, localize, entre as pastas do caminho principal do disco o aplicativo *Setup.exe* e, finalmente, clique duas vezes sobre ele.

Caso não tenha acesso à mídia de instalação do programa, você pode baixar o programa de instalação em:

- ECGV6
 - <https://tinyurl.com/ecgv6-instalador>

Se o procedimento anterior não der certo, é possível que a conta de usuário do Windows que está sendo usada não possua os *direitos administrativos*. Consulte um técnico de informática nesta situação.

16.4. PROBLEMAS NOS SINAIS DE ECG



Para os problemas de sinais, sempre que precisar entrar em contato com um representante mais próximo na Rede de Assistência Técnica (veja página 111) ou com o Suporte Técnico (veja página 1), imprima o registro que apresentou o problema ou faça um novo registro, desligando-se todos os filtros. Procure também transmitir mais detalhes de como isto ocorreu.

Verifique, com a ajuda de um eletrotécnico ou profissional da área, se sua rede elétrica está estável e com tensão correta. Certifique-se que os equipamentos estão devidamente aterrados e se o aterramento elétrico está em boas condições, em conformidade à Norma Brasileira **NBR-5410**. Certifique-se de que quaisquer periféricos conectados ao computador estejam no mesmo aterramento que este.

16.4.1. Sinais “grossos” ou ilegíveis

Sintomas:

Os sinais no traçado estão aparentemente “grossos” ou ilegíveis.

Solução:

Imprima o registro com traçado que apresentou o problema ou faça um novo registro, *desligando-se todos os filtros*. Veja se o ruído ocorre, agora, com maior intensidade e simultaneamente, nas derivações D1, D2 e D3 e em algumas precordiais. Sendo esta a situação que ocorreu, então, é provável que exista algum problema no aterramento elétrico. Verifique, com a ajuda de um eletrotécnico ou profissional da área, se sua rede elétrica está estável e com tensão correta. Certifique-se que os equipamentos estão devidamente aterrados e se o aterramento elétrico está em boas condições.

Quando apenas uma das derivações D1, D2 ou D3 está normal, seguindo o teste do parágrafo anterior, então, é possível que exista algum problema na preparação do paciente, ou na montagem dos eletrodos no paciente ou na conexão do cabo de paciente aos eletrodos ou ao eletrocardiógrafo. Consulte maiores detalhes em Preparação do paciente e Posicionamento dos eletrodos (páginas 27 e 29).

Persistindo o problema, mesmo após seguir as recomendações, então, é possível que exista um problema no cabo de paciente. Neste caso, veja como contactar a Rede de Assistência Técnica na página 111.

16.4.2. Sinais com ruídos ou espículas

Sintomas:

Os sinais no traçado apresentam ruídos ou espículas de natureza desconhecida.

Solução:

Certifique-se que a preparação e a montagem dos eletrodos no paciente está de acordo com as recomendações descritas nas seções Preparação do paciente e Posicionamento dos eletrodos (páginas 27 e 29). Verifique também a conexão do cabo de paciente ao eletrocardiógrafo.

16. Solução de problemas

Ruídos musculares podem ocorrer quando o paciente tenciona os músculos peitorais e/ou dos braços, para se manter no ergômetro. Observe se isto não está ocorrendo, pois, isto prejudica a qualidade dos sinais.

Espículas esporádicas podem ocorrer quando há perda de comunicação ou baixa performance do computador. Observe se os sinais, que estão sendo monitorados durante o exame, correm sem passar por pequenas pausas. Verifique, com a ajuda de um técnico de informática ou através de seu revendedor, se o computador está operando normalmente, se não há programas desnecessários sendo executados simultaneamente com o **sistema**. Entre em contato com o representante mais próximo na Rede de Assistência Técnica (ver contatos na página 111).

16.4.3. Inversão de polaridade do complexo QRS

Sintoma:

Algumas derivações apresentam inversão de polaridade no complexo.

Solução:

Certifique-se que a preparação e a montagem dos eletrodos no paciente estão de acordo com as recomendações descritas nas seções Preparação do paciente e Posicionamento dos eletrodos (páginas 27 e 29).

16.4.4. Sinais com grande variação na linha de base

Sintoma:

A linha de base nos sinais de ECG não estabilizam, oscilando em baixa frequência.

Solução:

Certifique-se que a preparação e a montagem dos eletrodos no paciente estão de acordo com as recomendações descritas nas seções Preparação do paciente e Posicionamento dos eletrodos (páginas 27 e 29). Verifique também a conexão do cabo de paciente ao eletrocardiógrafo.

Verifique se o filtro de linha de base está ligado durante o exame. Na tela de *Monitoração de sinais*, clique no botão **LB** (*Filtro de linha de base*), deixando-o com aspecto “desbotado”.

16.4.5. Discrepância no cálculo da frequência cardíaca

Sintoma:


Durante o exame, a frequência cardíaca calculada está incoerente.

Solução:

Logo após iniciar a monitoração, são necessários pelo menos 20 segundos para que o programa calcule a frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca não se estabilizar ou estiver incorreta, provavelmente há algum problema na *Derivação Para Cálculo da FC*. As causas mais prováveis são:

- Existência de interferências nessa derivação. Neste caso, verifique se os eletrodos estão bem afixados e com uma quantidade apropriada de gel condutor (se for o

caso). Para mais detalhes, consulte as seções Preparação do paciente e Posicionamento dos eletrodos (páginas 27 e 29).

- A derivação apresenta complexos QRS de baixa amplitude. Neste caso, deve-se trocar a *Derivação Para Cálculo da FC*, clicando no botão  (*Configurações*).
- A escala de tempo está diferente. Veja no canto inferior direito na tela de Monitoração de sinais a velocidade do traçado (25 ou 50 mm/s).


16.5. PROBLEMAS DE IMPRESSÃO

16.5.1. Impressora não imprime automaticamente

Sintoma:

Ao registrar os sinais e, opcionalmente, após editar as pressões, o programa não imprime o registro.

Solução:

Na tela de *Monitoração de sinais*, clique no botão  (*Configurações*) e marque a caixa de habilitação da *Impressão Automática*. No próximo registro, o programa deverá imprimir automaticamente. Esta alteração é válida apenas para o exame corrente. Para fixá-la em todos os exames, na tela principal do programa, abra o menu *Configurações* e marque a opção *Impressão automática*.

Continuando o problema, na tela principal do programa, abra o menu *Configurações* e escolha *Impressora*. Certifique-se que a impressora selecionada no programa é a mesma disponível para uso no computador. Veja mais detalhes na seção *Impressão*, página 56.

Persistindo o problema, verifique, com a ajuda de um técnico de informática ou através de seu revendedor, se o computador está operando normalmente, se não há problemas com a impressora e seus *drivers* de controle.

16.5.2. Impressão lenta ou demorada

Sintoma:

Ao registrar os sinais e, opcionalmente, após editar as pressões, a impressão é lenta ou demora a começar.

Solução:

Verifique, com a ajuda de um técnico de informática ou através de seu revendedor, as configurações da impressora padrão (consulte também o manual de sua impressora). Recomenda-se trabalhar com a resolução de 300 x 300 dpi (*dots per inch* ou *pontos por polegada*) em impressoras a jato de tinta e 600 x 600 dpi em impressoras a laser.

Impressoras compartilhadas em rede podem causar um sintoma semelhante. Caso a situação seja esta, então, dê preferência ao uso da impressora localmente no computador em que o programa está instalado.

16.5.3. Impressão clara nos traçados e/ou no milimetrado

Sintoma:

Os traçados e/ou o milimetrado impressos estão muito claros.

16. Solução de problemas

Solução:

Na tela principal do programa, acesse o menu *Configurações* e escolha *Opções*. Na janela *Opções de Configuração* e na guia *Impressão*, verifique os níveis de *Densidade dos traçado e do Milimetrado*. Este nível varia na escala de 1 a 5, sendo que, quanto maior, maior será a densidade, deixando o traçado ou milimetrado mais “grosso” ou escuro. Para maiores detalhes, ver Guia Impressão (página 57).

Persistindo o problema, verifique, com a ajuda de um técnico de informática ou através de seu revendedor, as configurações da impressora padrão (consulte também o manual de sua impressora). Recomenda-se trabalhar com a resolução de 300 x 300 dpi (*dots per inch* ou *pontos por polegada*) em impressoras a jato de tinta e 600 x 600 dpi em impressoras a laser. Verifique também se sua impressora possui o modo *Econômico* e se ele está desligado.

16.6. PROBLEMAS RELATIVOS AO EXAME DE ESFORÇO

16.6.1. O programa não realiza o pré-esforço e/ou recuperação

Sintoma:

Ao iniciar monitoração dos sinais no esforço o sistema não realiza o pré-esforço, ou, antes do término do esforço, o sistema não executa a recuperação.

Solução:



Na tela principal do programa, acesse o menu *Configurações* e escolha *Opções*. Na janela *Opções de Configuração*, clique na aba *Periféricos*. Se o controle de seu ergômetro não estiver ativo, então, não será possível usar o *Pré-esforço* e/ou a *Recuperação*. Caso, contrário, isto é, havendo controle de ergômetro via programa, será necessário habilitar e configurar o *Pré-esforço* e/ou *Recuperação*. Veja mais detalhes nas seções Guia Periféricos e Guia Registro de ECG.

16.6.2. Discrepância na frequência cardíaca máxima atingida

Sintoma:

Na folha *Resposta Cardiovascular ao Exercício* (veja-a no anexo *Erro: Origem da referência não encontrada*, página Erro: Origem da referência não encontrada), impressa logo após concluir um exame de esforço, a frequência cardíaca máxima atingida está errada.

Solução:

Na tela de *Edição do laudo*, disponível ao clicar no botão  (*Edita Laudo*), clique no tópico *Dados do teste* e altere, com cuidado, o valor do campo *frequência máxima atingida*. Confirme com botão  (*OK*). Para imprimir novamente aquela folha, abra o menu *Exame*, escolha *Imprimir* ⇒ *Laudo* ⇒ *Resposta Cardiovascular*.

Se o problema da FC máxima atingida persistir nos exames subseqüentes, siga as recomendações das seções *Preparação do paciente* e *Posicionamento dos eletrodos* (páginas 27 e 29).

17. REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este produto contém um guia para acessar a *Rede de Assistência Técnica Autorizada*, que está incluído dentro de sua embalagem original, juntamente com as demais partes.

A HW Sistemas também disponibiliza em seu site, www.hw.ind.br, os dados para contatar a Assistência Técnica autorizada.

Veja mais detalhes como acessar a Assistência Técnica de fábrica na página 1 deste documento.

18. GARANTIA

Este produto contém um *Certificado de garantia*, que está incluído dentro de sua embalagem original, juntamente com as demais partes. Neste certificado, estão descritos os termos da garantia, como as condições de uso, prazos, exceções da garantia, cobertura e obrigações. Há também, no certificado, um formulário que deve ser preenchido pelo cliente ou pelo representante autorizado HeartWare. O uso da garantia somente poderá ser feita mediante apresentação deste certificado devidamente preenchido.

19. COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

As tabelas a seguir descrevem os níveis de compatibilidade eletromagnética do Eletrocardiógrafo FÁCIL em relação aos requisitos da norma ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006.


19.1. TABELA 201

Diretrizes e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas		
O Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Recomenda-se que o cliente ou usuário do Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET garanta que ele seja utilizado em tal ambiente.		
Ensaio de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético - diretrizes
Emissões de RF ABNT NBR IEC CISPR 11	Grupo 1	O Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET utiliza energia de RF apenas para suas funções internas. No entanto, suas emissões de RF são muito baixas e não é provável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
Emissões de RF ABNT NBR IEC CISPR 11	Classe B	O Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET é adequado para utilização em todos os estabelecimentos, incluindo residenciais e aqueles diretamente conectados à rede pública de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão, que fornece energia a edifícios residenciais.
Emissões de harmônicos IEC 61000-3-2	Não aplicável	O microcomputador ao qual o equipamento será conectado deverá atender à norma IEC60950.
Emissões devido a flutuação de tensão/cintilação IEC 61000-3-3	Não aplicável	

19.2. TABELA 202

Diretrizes e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética			
O Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de imunidade	Nível de ensaio da ABNT NBR IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente eletromagnético - diretrizes
Descargas eletrostáticas (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV por contato ± 8 kV pelo ar	± 6 kV por contato ± 8 kV pelo ar	Piso deveria ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se o piso é coberto com material sintético, a umidade relativa deveria ser de pelo menos 30%.
Transitórios elétricos rápidos/trem de pulsos ("burst") IEC 61000-4-4	± 2 kV nas linhas de alimentação ± 1 kV nas linhas de entrada/saída	Não aplicável	Recomenda-se que a qualidade do fornecimento de energia para o microcomputador ao qual o equipamento será conectado seja aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico. O microcomputador ao qual o equipamento será conectado deverá atender à norma IEC60950.
Surtos IEC 61000-4-5	± 1 kV linha(s) a linha(s) ± 2 kV linha(s) a terra	Não aplicável	
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão nas linhas de entrada de alimentação IEC 61000-4-11	< 5% U_T (>95% de queda de tensão em U_T) por 0,5 ciclo. 40% U_T (60% de queda de tensão em U_T) por 5 ciclos. 70% U_T (30% de queda de tensão em U_T) por 25 ciclos. < 5% (>95% de queda de tensão em U_T) por 5 segundos.	Não aplicável	
Campo magnético na frequência de alimentação (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Campos magnéticos na frequência da alimentação deveriam estar em níveis característicos de um local típico em uma ambiente hospitalar ou comercial típico.
Nota : U_T é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de ensaio.			

19.3. TABELA 204

Diretrizes e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética			
O Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de imunidade	Nível de ensaio da ABNT NBR IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente eletromagnético - diretrizes
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz até 2,5 GHz	3 V/m	<p>Equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel não deveriam ser usados próximos a qualquer parte do eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET, incluindo cabos, com distância de separação menor que a recomendável, calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor.</p> <p>Distância de separação recomendada</p> $d = 1,2 \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz até } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,3 \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz até } 2,5 \text{ GHz}$ <p>onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor em Watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação recomendada em metros (m).</p> <p>É recomendada que a intensidade de campo estabelecida pelo transmissor de RF, como determinada através de uma inspeção eletromagnética no local^a, seja menor que o nível de conformidade em cada faixa de frequência^b.</p> <p>Pode ocorrer interferência ao redor do equipamento marcado com o seguinte símbolo </p>
<p>NOTA 1: Em 80MHz e 800MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta.</p> <p>NOTA 2: Estas diretrizes podem não se aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.</p>			
<p>^a As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações radio base, telefone (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, recomenda-se uma inspeção eletromagnética do local. Se a medida de intensidade de campo no local em que o Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET é usado excede o nível de conformidade utilizado acima, o Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET deveria ser observado para verificar se a operação está Normal. Se um desempenho anormal for observado, procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como a reorientação ou recolocação do Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET.</p>			
<p>^b Acima da faixa de frequência de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade de campo deveria ser menor que 3 V/m.</p>			


19.4. TABELA 206

Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de RF portátil e móvel e o Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET			
O Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF radiadas são controladas. O cliente ou usuário do Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e o Eletrocardiógrafo FÁCIL modelo ErgoMET como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação.			
Potência máxima nominal de saída do transmissor W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor m		
	150 kHz até 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz até 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz até 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
Para transmissores com uma potência nominal de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada através da equação aplicável para a frequência do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.			
NOTA 1: Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais alta.			
NOTA 2: Essas diretrizes podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			


20. ANEXOS

20.1. IMPRESSÃO DE REGISTROS

20.1.1. Registro padrão

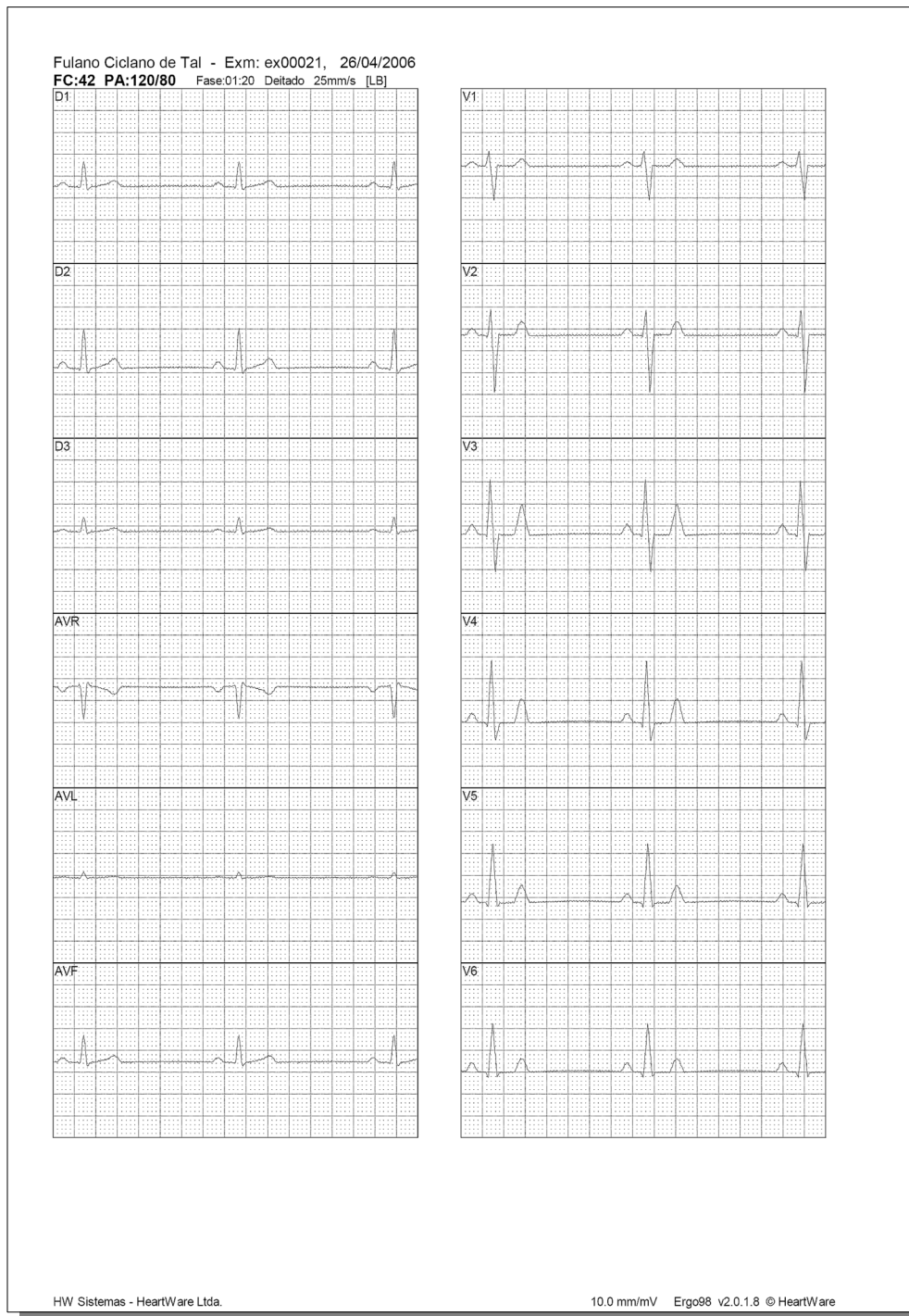


20.1.2. Registro com médias, longa e comentário

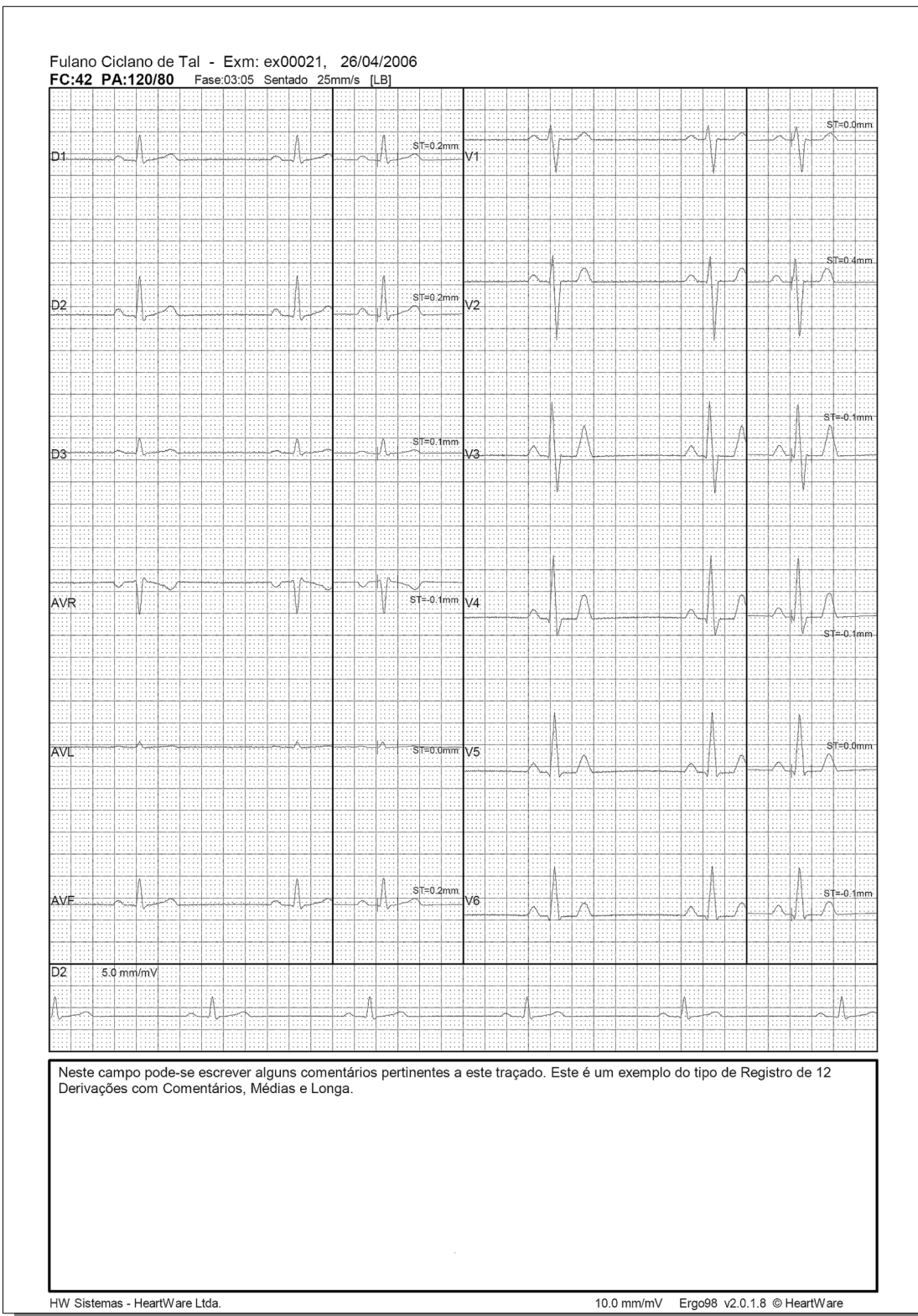

20.1.3. Registro com longa e comentários


Fulano Ciclano de Tal - Exm: ex00021, 26/04/2006
 FC:42 PA:120/80 Fase:07:05 Hiperventilado 25mm/s [LB]

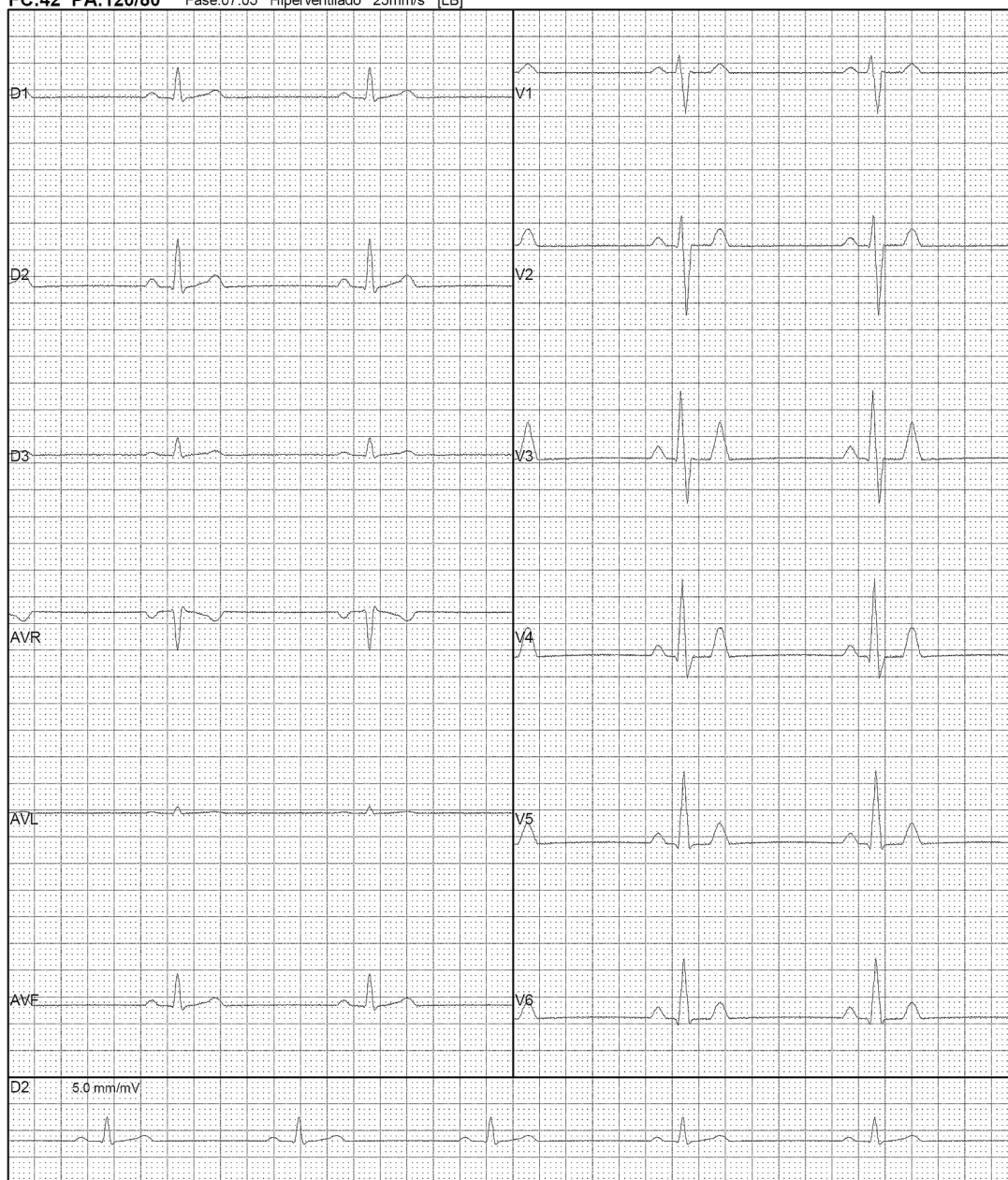



Este é um exemplo de traçados com 12 Derivações e Comentários e uma Derivação Longa.

20.2. IMPRESSÃO DE REGISTRO CONTÍNUO

20.2.1. Registro longo – 2.5 mm/mV – 1 página

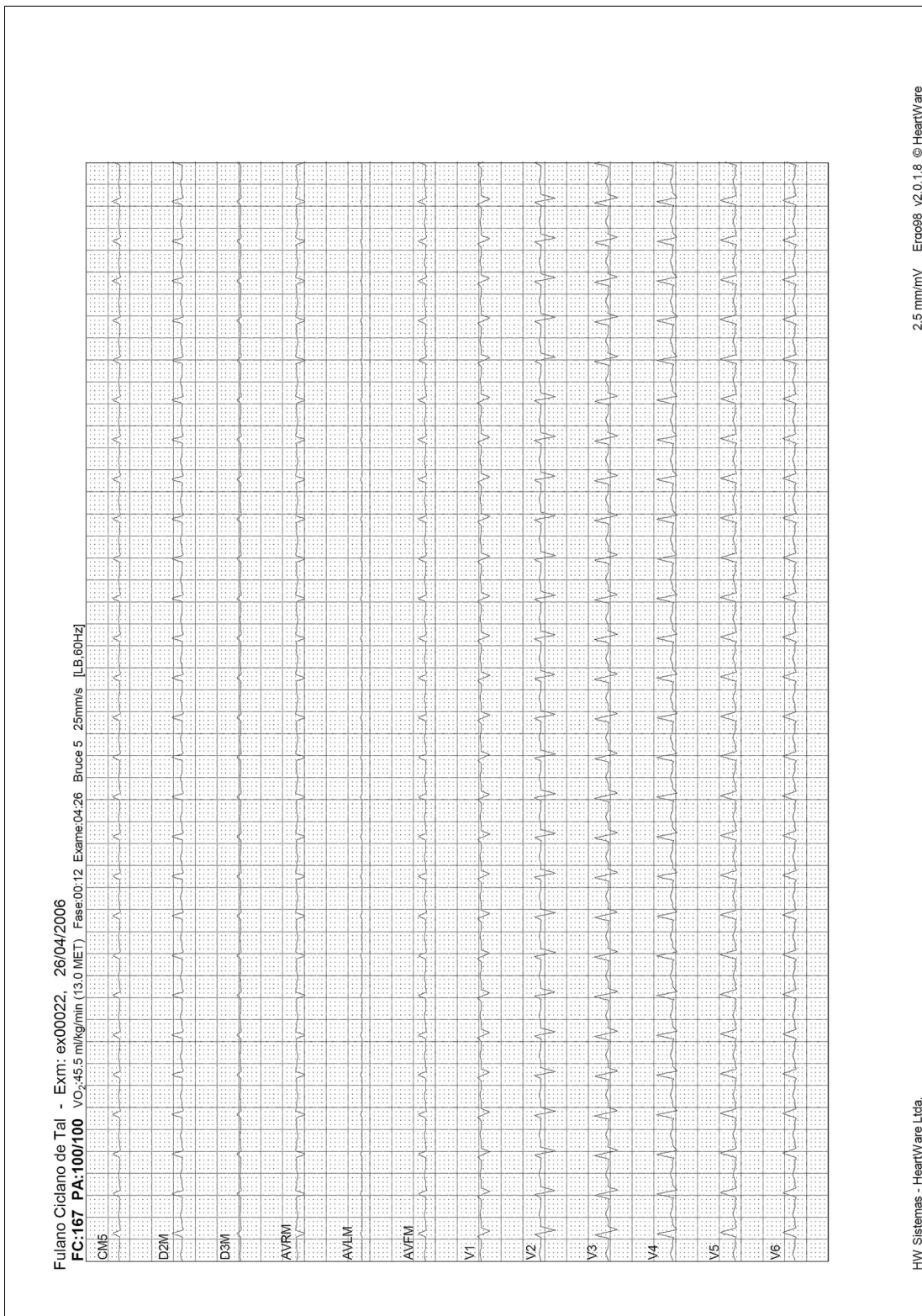


20.2.2. Registro longo - 10 mm/mV - 2 páginas

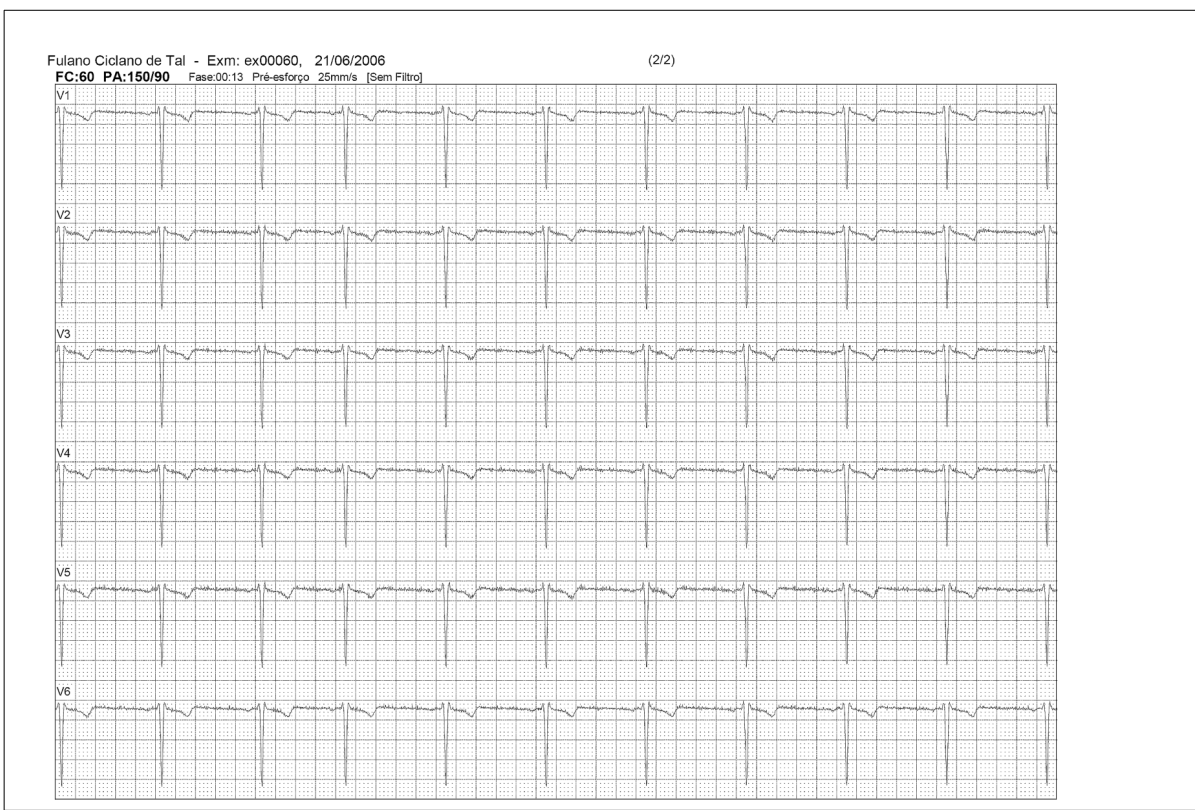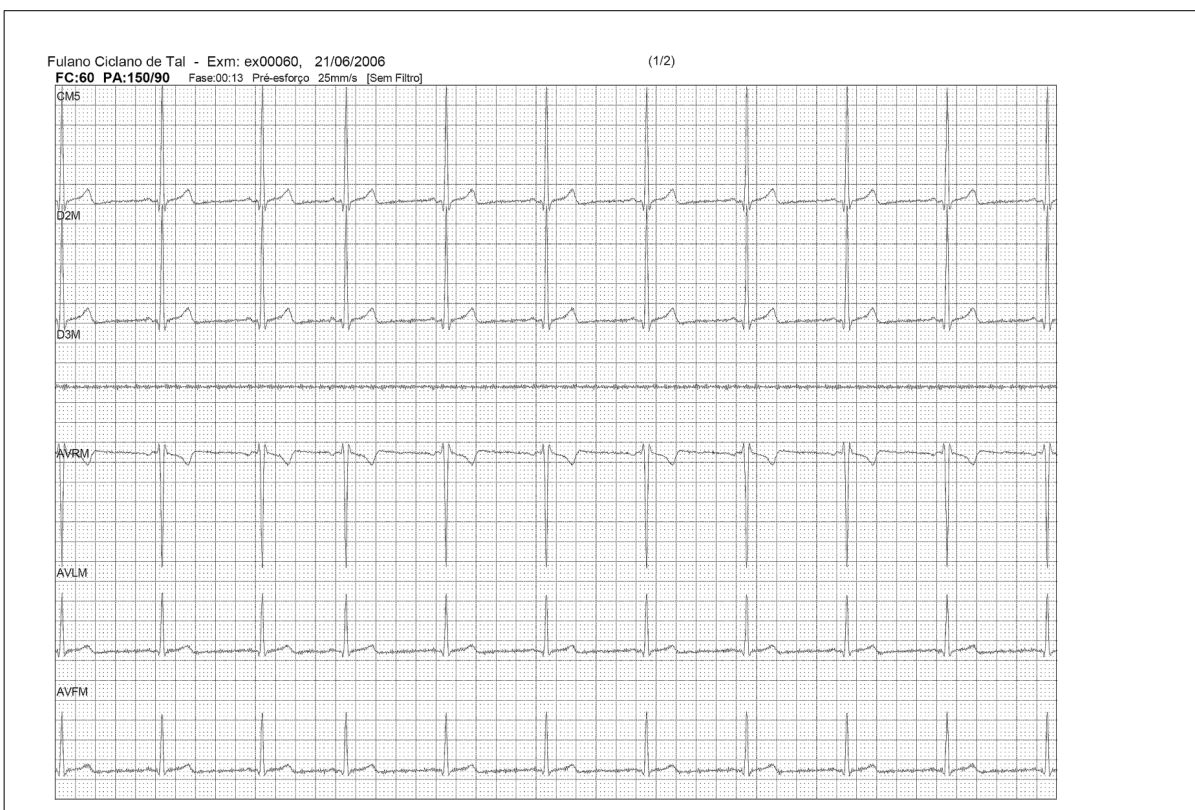


20.3. IMPRESSÃO DE REGISTRO COM 1, 3 OU 6 DERIVAÇÕES


20.3.1. Registro longo de 1 derivação

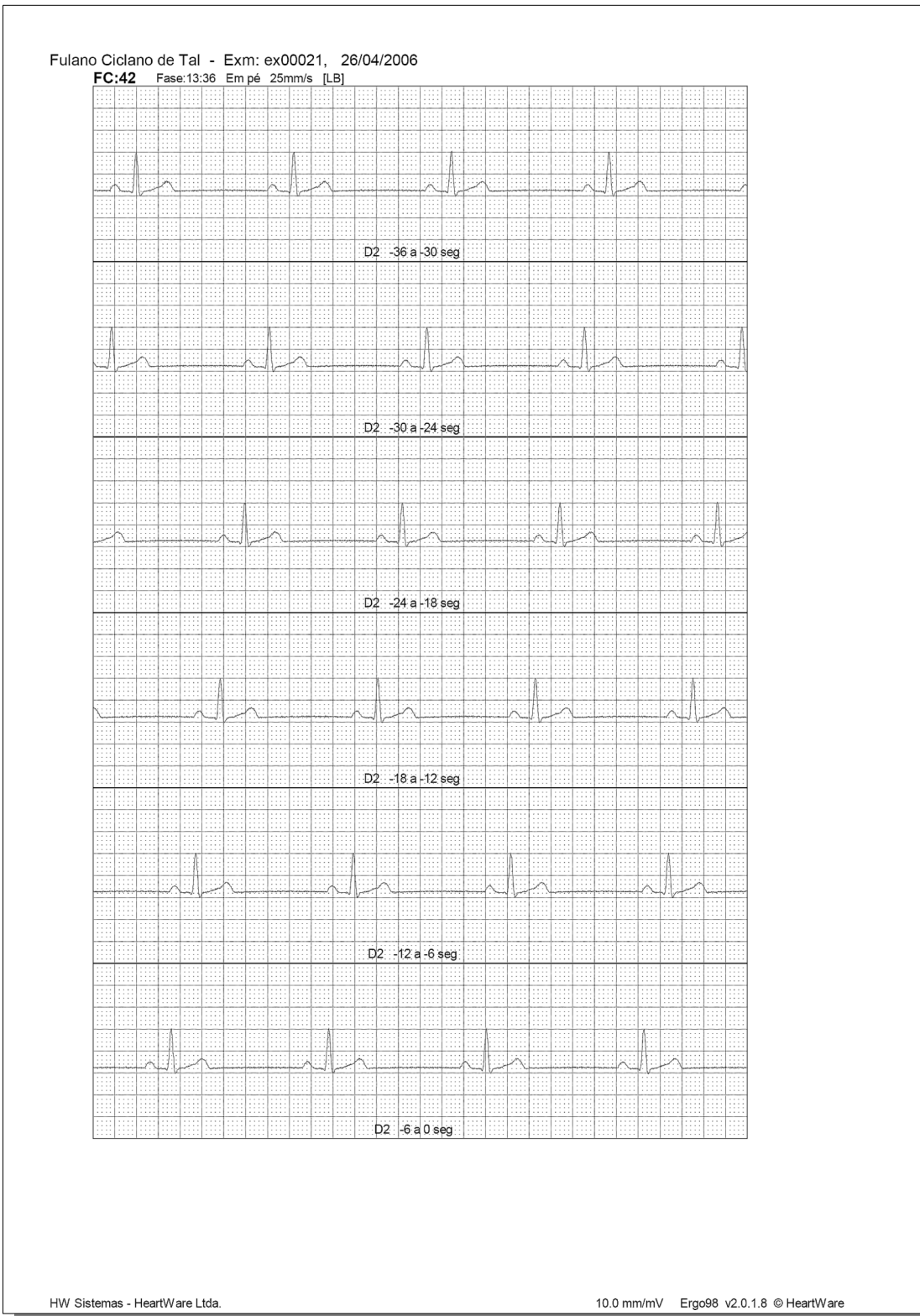


20.3.2. Registro longo - 2.5 mm/mV - 1 derivação

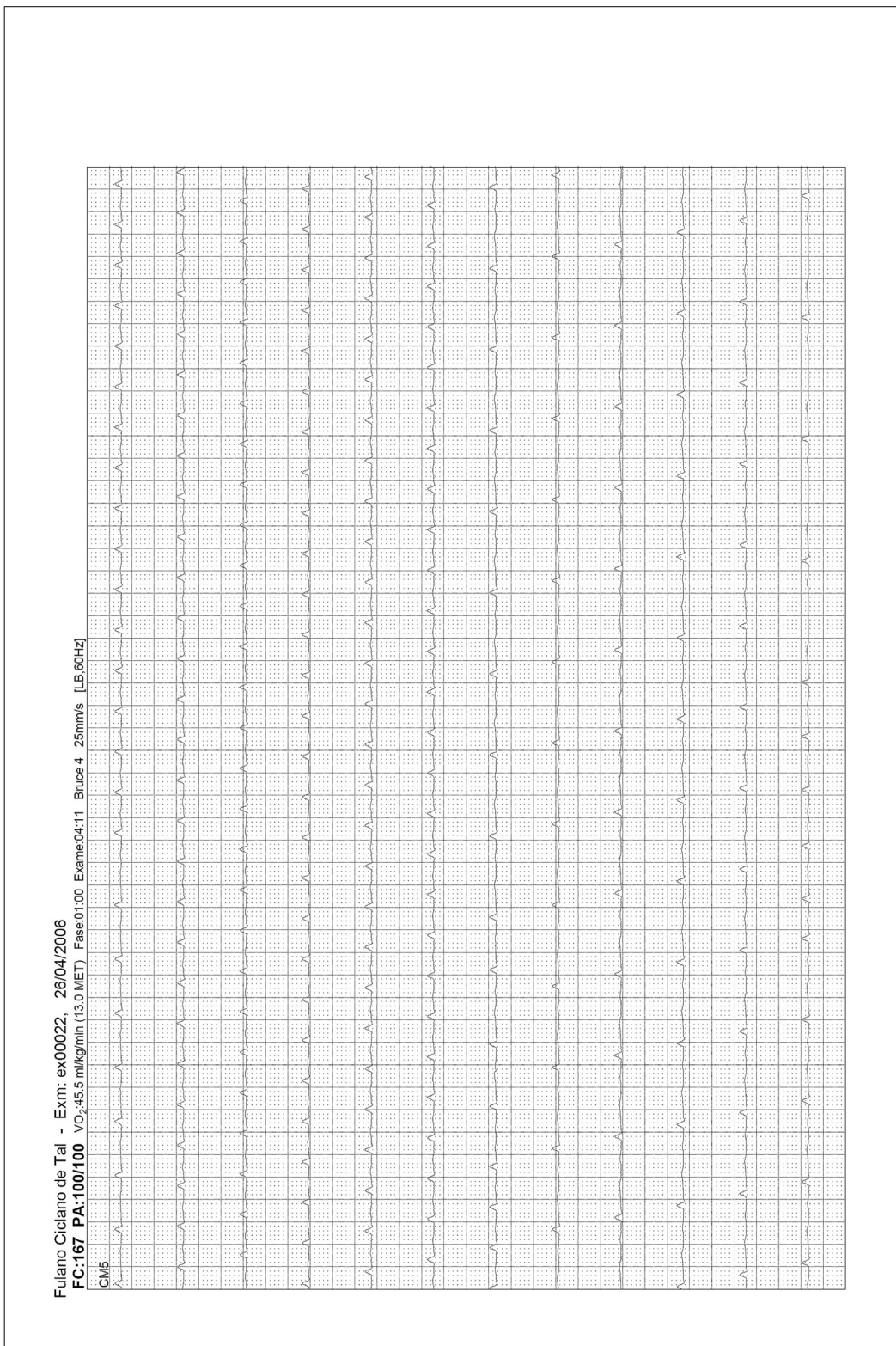


20.3.3. Registro longo – 2.5 mm/mV – 3 derivações

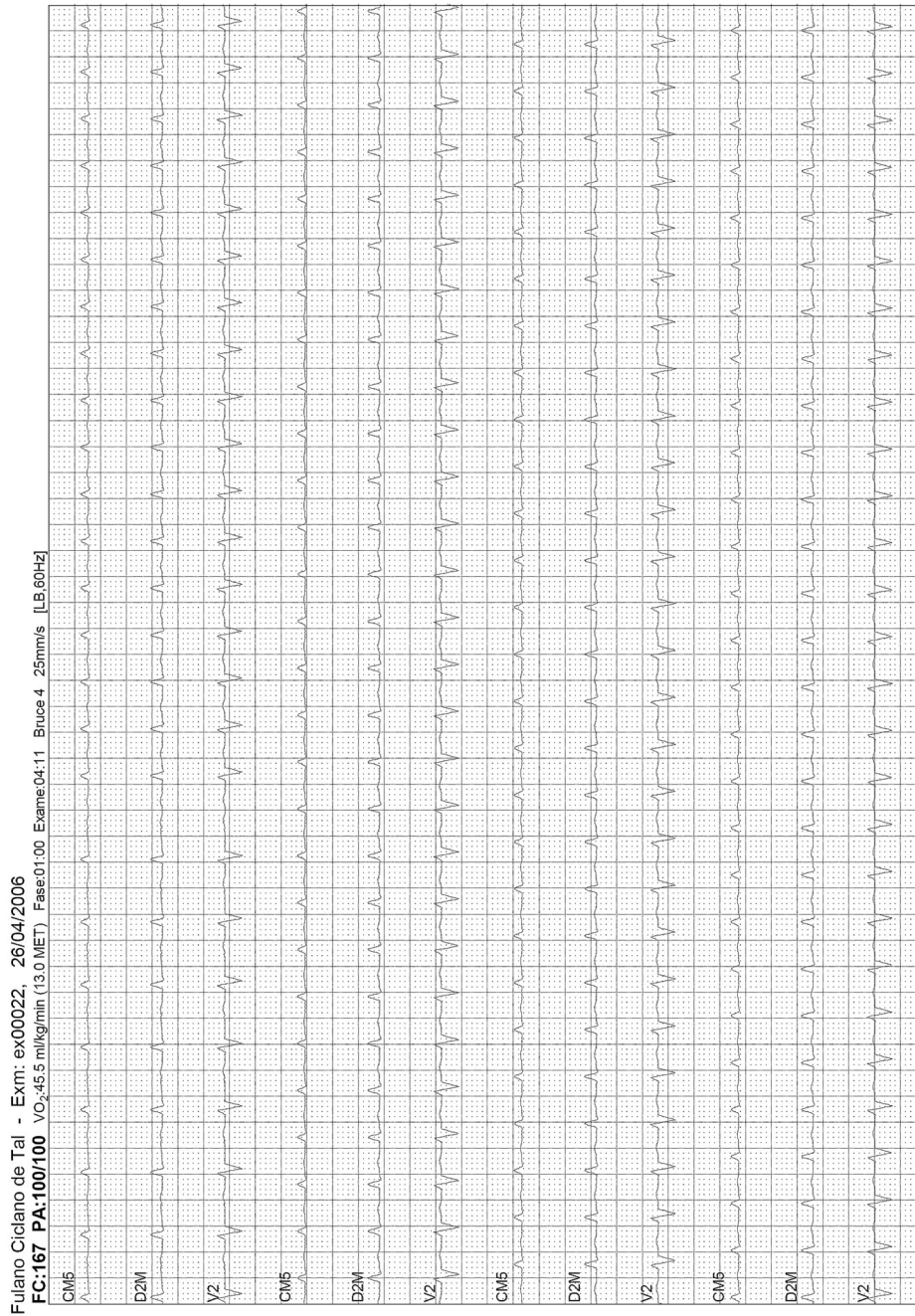

20.3.4. Registro longo - 2.5 mm/mV - 6 derivações

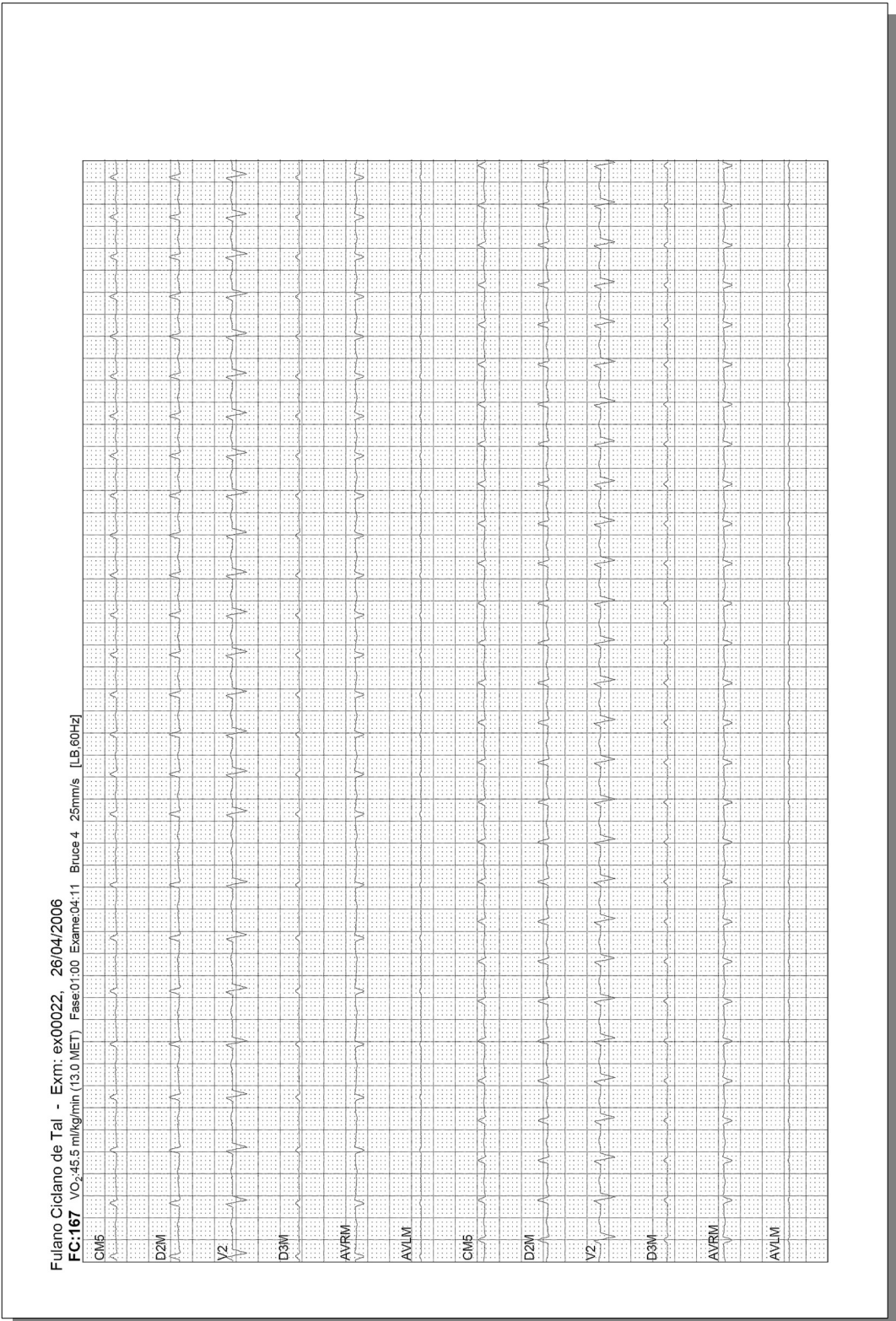

20.3.5. Registro longo – 10 mm/mV – 3 derivações

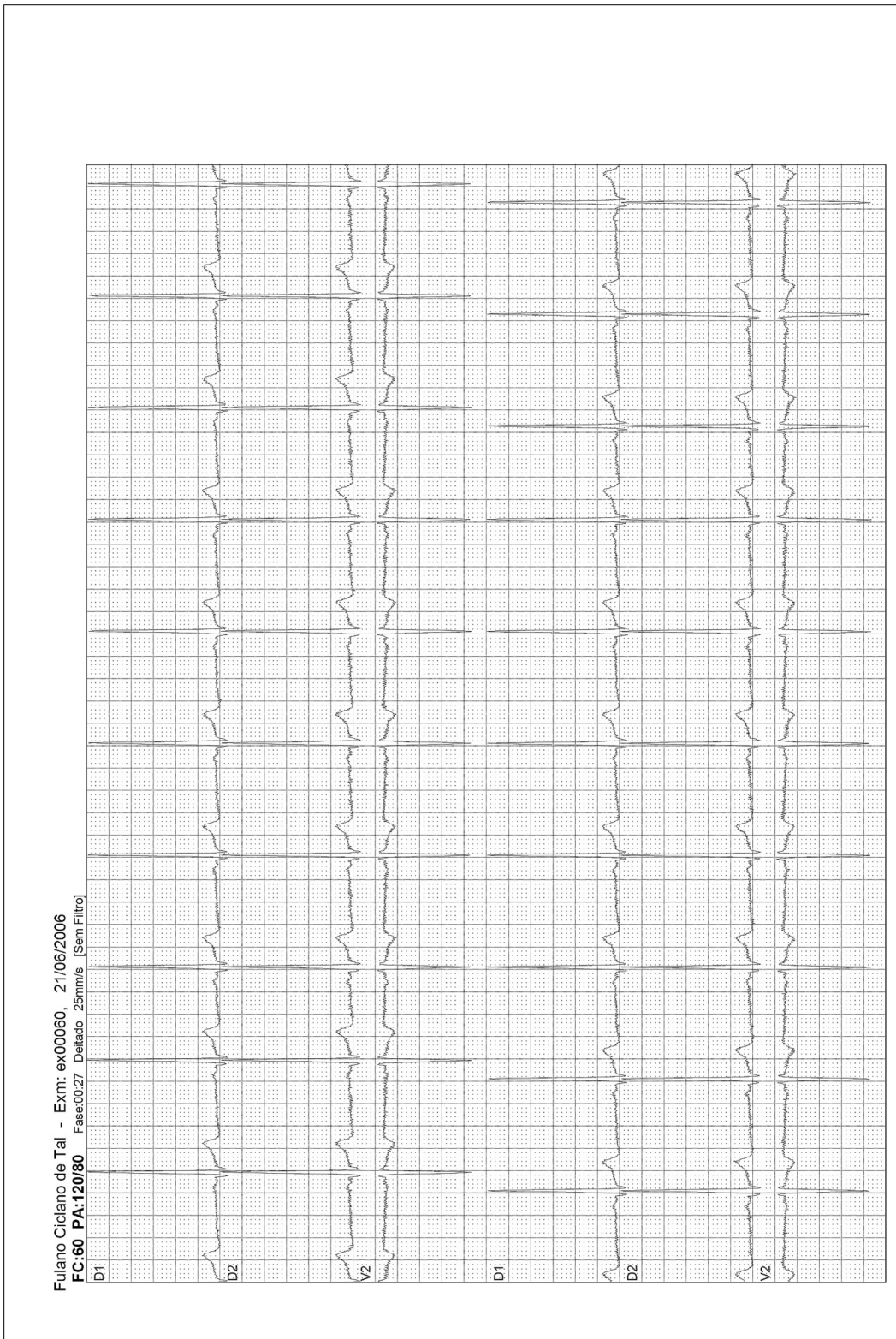

20.4. IMPRESSÃO DE REGISTRO EM CORES

Fulano Ciclano de Tal - Exm: ex00082, 01/08/2006 (Branca, 1.79m, 69.0kg, 26 anos)
FC:61 PA:120/80 Hora do registro: 16:03:15 Deitado 25mm/s [LB,60Hz]




Exemplo de Registro de 12 Derivações com outras cores para traçados (com ou sem destaque) e milimetrado.

20.5. IMPRESSÃO DO MÓDULO DE MEDIDAS

20.5.1. Módulo de medidas no exame de repouso (ECG)

Geraldo Magela - Exm: ex00724, 26/06/2007 (Branca, 1.79m, 69.0kg, 27 anos)
 FC:61 Fase:00:18 (16:19:43) Deitado 25mm/s

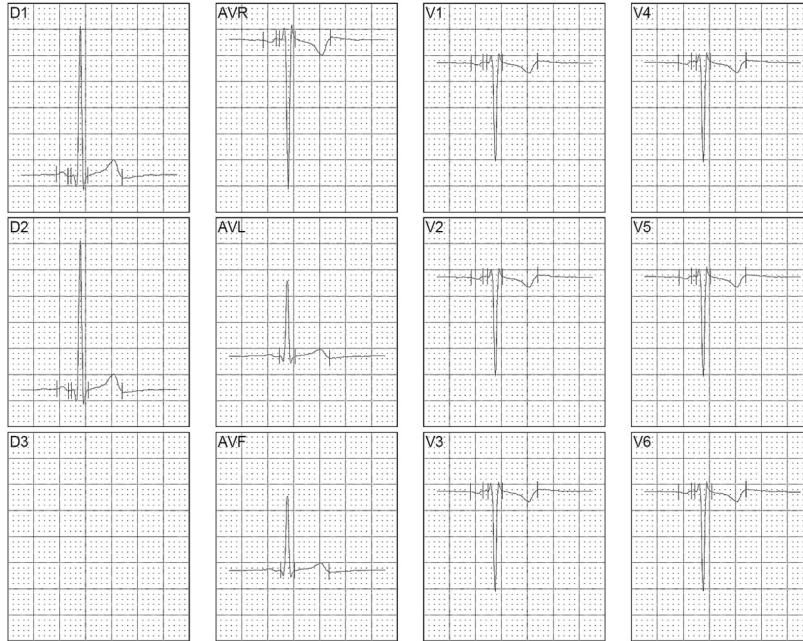


SÂQRS = 25.9° Sokolow-Lyon = 20.6 mm Co melli = 33.4 mm

	D1	D2	D3	AVR	AVL	AVF	V1	V2	V3	V4	V5	V6
P+ amp.	0.8	0.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
P- amp.	---	---	---	-0.7	---	---	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.5
P dur.	88	88	---	96	---	---	92	92	96	100	92	96
Q amp.	-2.0	-2.0	---	---	-1.0	-1.1	---	---	---	---	---	---
Q dur.	32	32	---	---	28	28	---	---	---	---	---	---
R amp.	28.7	28.8	---	2.0	14.4	14.2	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.4
R dur.	44	44	---	32	40	44	32	32	28	28	28	28
S amp.	-2.5	-2.4	---	-29.0	-1.4	-1.4	-19.0	-18.9	-19.0	-19.1	-19.0	-19.1
S dur.	32	32	---	40	36	36	40	40	44	44	44	44
R' amp.	---	---	---	2.5	---	---	1.6	1.6	1.8	1.8	1.9	1.7
R' dur.	---	---	---	36	---	---	40	40	36	32	36	36
S' amp.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S' dur.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ST J	0.1	0.1	---	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.1	0.1	-0.1
ST J + 20 ms	0.2	0.4	---	-0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.3
ST J + 40 ms	0.4	0.5	---	-0.4	0.1	0.1	-0.3	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3
ST J + 60 ms	0.6	0.7	---	-0.6	0.1	0.1	-0.4	-0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.5
ST J + 80 ms	0.7	0.7	---	-0.7	0.2	0.2	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.5
Incl. ST [mV/s]	0.6	0.5	---	-0.7	0.3	0.4	-0.5	-0.4	-0.4	-0.6	-0.5	-0.4
T+ amp.	3.2	3.3	---	---	1.3	1.4	---	---	---	---	---	---
T- amp.	---	---	---	-3.2	---	---	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-2.1
QRS dur.	112	116	---	108	112	108	112	112	108	108	108	116
Interv. QT	376	376	---	376	376	372	376	380	376	380	376	380
Interv. QTc	379	379	---	379	379	375	379	383	379	383	379	383
Interv. PR	128	124	---	136	---	---	132	132	136	140	132	136
Segm. PR	40	36	---	40	---	---	40	40	40	40	40	40

Unid. amplitude: [mm]

20.6. IMPRESSÃO DA CARTEIRA DE ECG

			HW Sistemas - HeartWare Ltda. Serviço de Instalação, Treinamento e Suporte <small>Av. Alphonsus de Guimarães, 115, Serra Elégica, Belo Horizonte, MG, 30270-020 - (31) 3481-7226</small>		
Nome	Código	Emissão			
Fulano Ciclano de Tal	pc001000	11/04/2007			
Endereço	Tipo Sang.	Data Nasc.			
Av. Alphonsus de Guimarães, 115, BH	O+	23/07/1980			
Contato	Fone 1	Fone 2			
Beltrana de Tal	(31) 9823-4101	(31) 9631-7226			
Médico	Fone 1	Fone 2			
Dr. Médico Responsável 1	(31) 3461-7226	(31) 3482-8615			
Observações (Doador de Órgãos) Aqui pode-se escrever algumas observações.					

CM5	AVRM	V1	V4
D2M	AVLM	V2	V5
D3M	AVFM	V3	V6
D2M			

25 mm/s 5.0 mm/mV by HeartWare

20.7. IMPRESSÃO DA ANAMNESE



HW Sistemas - HeartWare Ltda.

Serviço de Instalação, Treinamento e Suporte

Av. Alphonsus de Guimarães, 115, Santa Efigênia, Belo Horizonte, MG, 30270-020 - (31) 3461-7226

TESTE ERGOMÉTRICO

Exame ex00021 realizado em 26/04/2006

Esteira rolante - protocolo Bruce

Médico Responsável: Dr. Médico Responsável 1

Paciente : Fulano Ciclano de Tal

pc001000

Idade : 26 anos
Sexo : Masculino
Cor : Branca
Altura : 1.79 m Peso : 69.0 kg Índice de massa corporal : 21.5
Profissão : Engenheiro Eletricista

Solicitação feita por: Dra. Médica Solicitante 1

Medicação em uso
dipiridamol

Indicações principais do teste

- Avaliação da capacidade funcional
- Avaliação da resposta pressórica
- Avaliação de risco cirúrgico
- Exame admissional
- Realização de Check-up

Fatores de risco coronariano

- Estresse
- Sedentarismo
- Escore Pré-teste (Morise) = 3 (Probab. DAC: < 9 - Baixa Entre 9 e 15 - Média > 15 - Alta)
- Escore Framingham = 3% (Risco de DAC em 10 anos)


História clínica

- Dor atípica
- Tontura em repouso
- Tontura pós esforço

Observações


Neste campo pode-se escrever algumas observações pertinentes à Anamnese deste exame.

20.8. IMPRESSÃO DAS CONCLUSÕES FINAIS DO LAUDO

	HW Sistemas - HeartWare Ltda. Serviço de Instalação, Treinamento e Suporte Av. Alphonsus de Guimaraes, 115, Santa Efigênia, Belo Horizonte, MG, 30270-020 - (31) 3461-7226																
	ELETROCARDIOGRAMA																
Exame ex00071 realizado em 01/08/2006		Médico Responsável: Dr. Médico Responsável 1															
Paciente : Fulano Ciclano de Tal		pc001000															
<table border="1"> <tr> <td>Idade</td> <td colspan="2">: 27 anos</td> </tr> <tr> <td>Sexo</td> <td colspan="2">: Masculino</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td colspan="2">: Branca</td> </tr> <tr> <td>Altura</td> <td>: 1.79 m</td> <td>Peso : 69.0 kg Índice de massa corporal : 21.5</td> </tr> <tr> <td>Profissão</td> <td colspan="2">: Engenheiro Eletricista</td> </tr> </table>			Idade	: 27 anos		Sexo	: Masculino		Cor	: Branca		Altura	: 1.79 m	Peso : 69.0 kg Índice de massa corporal : 21.5	Profissão	: Engenheiro Eletricista	
Idade	: 27 anos																
Sexo	: Masculino																
Cor	: Branca																
Altura	: 1.79 m	Peso : 69.0 kg Índice de massa corporal : 21.5															
Profissão	: Engenheiro Eletricista																
Solicitação feita por: Dra. Médica Solicitante 1																	
<i>Laudos</i>																	
<p>O Sistema ECG98 permite ao usuário criar diversos modelos (exame normal, isquêmico, de atletas, etc.) de laudo utilizando os recursos avançados de editoração disponíveis em Windows.</p>																	
Alinhamento pela Esquerda	Centralização	Alinhamento pela Direita															
Negrito	<u>Sublinhado</u>	<i>Itálico</i>															
<hr/> Dr. Médico Responsável 1 CRM: 01548692																	
HW Sistemas - HeartWare Ltda.	Ecg98 v2.0.1.8 © Heartware																

20.9. IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS

20.9.1. Relatório Comparativo Breve

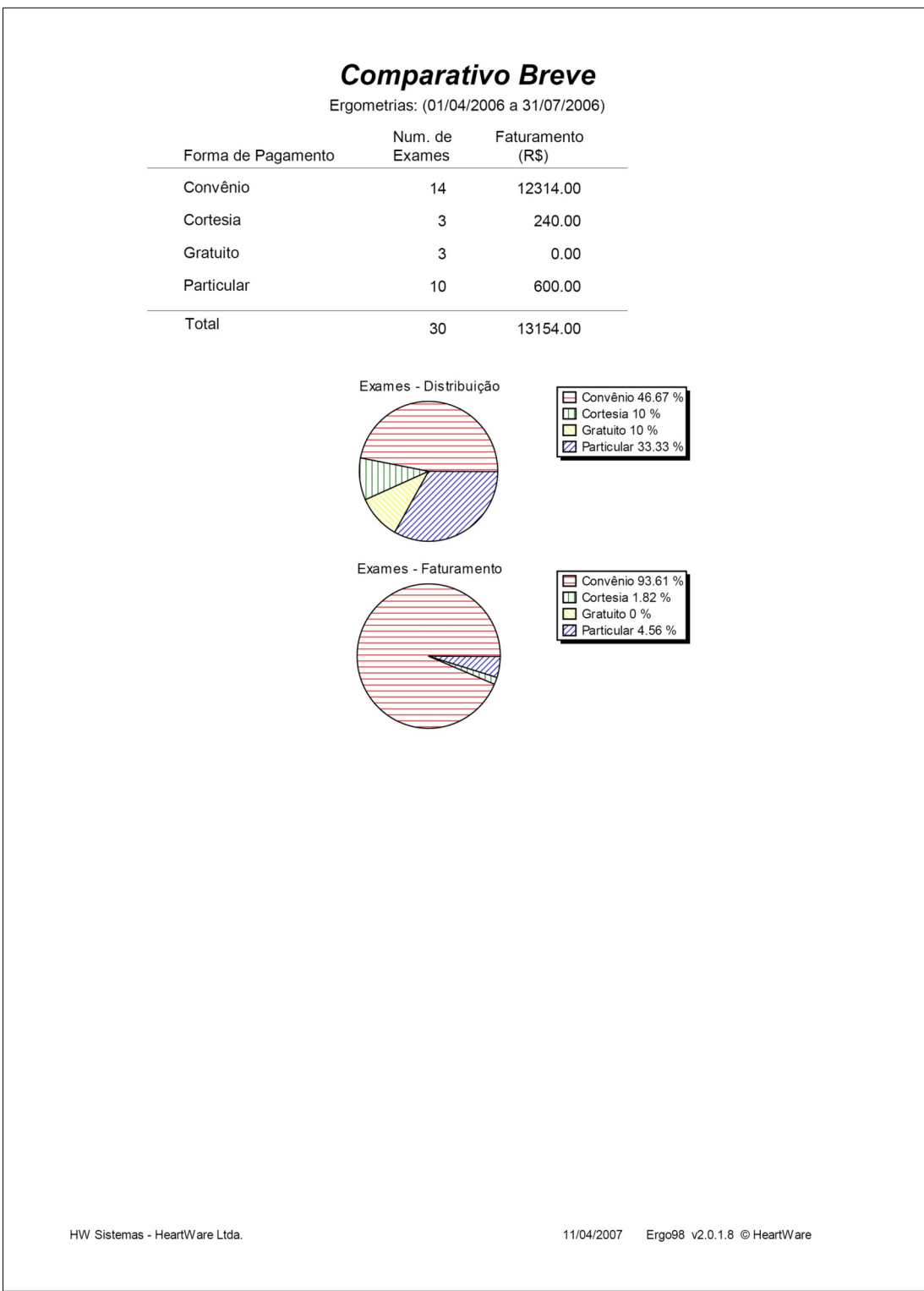



20.9.2. Relatório Comparativo Extenso

Comparativo Extenso


Ergometrias: (01/04/2006 a 31/07/2006)

Forma de Pagamento	Num. de Exames	Faturamento (R\$)
Convênio "A"	5	8750.00
Convênio "B"	5	2000.00
Convênio "C"	4	1564.00
Cortesia	3	240.00
Gratuito	3	0.00
Particular	10	600.00
Total	30	13154.00

Exames - Distribuição

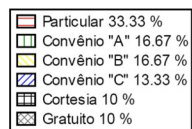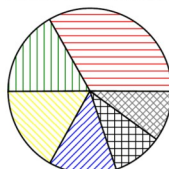

Exames - Faturamento


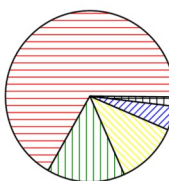


20.9.3. Relatório por Exames de Convênio

Exames por Convênio

Ergometrias: (01/04/2006 a 31/07/2006)

Cód. Exame	Data Exm.	Nome Pac.	Num. Guia	Faturamento (R\$)
Convênio: "A"				
ex00021	26/04/2006	Fulano Ciclano de Tal	123654	1750.0
ex00022	26/04/2006	Fulano Ciclano de Tal		1750.0
ex00030	04/05/2006	Paciente A		1750.0
ex00034	18/05/2006	Paciente E		1750.0
ex00032	23/05/2006	Paciente C		1750.0
Total:			5 Exame(s)	8750.0
Convênio: "B"				
ex00037	31/05/2006	Paciente H		400.00
ex00042	14/06/2006	Paciente K		400.00
ex00040	14/06/2006	Paciente L		400.00
ex00049	05/07/2006	Paciente S		400.00
ex00050	05/07/2006	Paciente T		400.00
Total:			5 Exame(s)	2000.0
Convênio: "C"				
ex00033	17/05/2006	Paciente D		391.00
ex00039	01/06/2006	Paciente J		391.00
ex00044	15/06/2006	Paciente N		391.00
ex00045	28/06/2006	Paciente O		391.00
Total:			4 Exame(s)	1564.0
Total Geral:			14 Exame(s)	12314.

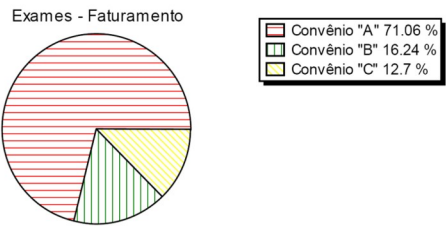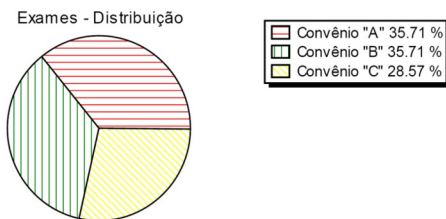

20.9.4. Relatório Comparativo por Médico Responsável**Comparativo por Responsável**

Ergometrias: (01/04/2006 a 31/07/2006)

Médico Responsável		Num. de Exames	Faturamento (R\$)
Dra. Médica Responsável 2			
	Convênio "A"	2	3500.00
	Convênio "B"	4	1600.00
	Convênio "C"	1	391.00
	Cortesia	1	80.00
	Particular	2	200.00
	Total	10	5771.00
Dr. Médico Responsável 1			
	Convênio "A"	3	5250.00
	Convênio "B"	1	400.00
	Convênio "C"	3	1173.00
	Cortesia	2	160.00
	Gratuito	3	0.00
	Particular	4	400.00
	Total	16	7383.00
Total Geral		26	13154.00

20.9.5. Relatório Comparativo por Médico Solicitante

Comparativo por Solicitante

Ergometrias: (01/04/2006 a 31/07/2006)

Médico Solicitante	Num. de Exames
Dra. Médica Solicitante 1	17
Dr. Médico Solicitante 2	9
Total	26

20.10. CÓPIA DE SEGURANÇA DA BASE DE DADOS



Jamais sobrescreva ou misture arquivos de duas ou mais pastas *DATABASE*. Não apague total ou parcialmente os arquivos desta pasta. Qualquer ação neste sentido poderá danificar, permanentemente, a base de dados. Sempre que houver dúvidas, procure o Suporte Técnico (veja como encontrá-lo na página 1).



Sugere-se contar com a ajuda de um técnico de informática para proceder às recomendações desta seção.

O programa deste equipamento possui uma pasta contendo a base de dados no disco do computador, com todos os pacientes, exames, registros, laudos etc. Normalmente, através da instalação padrão do programa, esta pasta é a C:\HW\DATABASE. Se estiver funcionando em rede, deve-se fazer a cópia de segurança da pasta *DATABASE* do servidor onde os exames estão sendo efetivamente gravados.

Devido às inúmeras metodologias de backup existentes e usadas por nossos clientes, os programas da família FÁCIL não possuem uma ferramenta própria para copiar a *DATABASE*, com o objetivo de fazer um *backup* da base de dados. Logo, todo o procedimento de segurança deverá ser feito, exclusivamente, fora do programa da HW Sistemas, usando o próprio Windows ou programas de terceiros.

Essencialmente, fazer uma cópia de segurança da base de dados, consiste em copiar a pasta *DATABASE* para algum local que não seja o próprio disco onde o programa funciona. **A política de segurança e os procedimentos adotados são de total responsabilidade do cliente.**

Para restaurar a base de dados, deve-se proceder com a substituição completa da pasta *DATABASE* atual pela original, sem, no entanto, sobrescrever ou misturar os arquivos de duas ou mais pastas *DATABASE*. Não é possível abrir um exame diretamente pelo Windows simplesmente tentando-se abrir um determinado arquivo. O acesso a uma base de dados, mesmo que apenas a um único exame, deve considerar, sempre, a pasta *DATABASE* completa.

20.11. OUTROS MODOS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

Os programas da família FÁCIL pode funcionar em ambiente de rede local, de modo que uma única base de dados possa ser compartilhada para acesso em outros computadores da rede. Também é possível configurar o programa para não se comunicar com o eletrocardiógrafo, fazendo com que ele trabalhe no modo *Remoto*, sem poder realizar exames, mas podendo abrir, visualizar, editar, imprimir, enviar exames pela Internet, etc.

Como exemplo de um caso, os exames que são feitos na Sala de Exames podem ser acessados pela Sala da Secretária e pelo médico, em sua Sala do Consultório, desde que estes computadores estejam sob um mesmo grupo de trabalho em uma rede de arquivos Microsoft.

Consulte o representante mais próximo na Rede de Assistência Técnica (página 111) ou o Suporte Técnico (página 1) para conhecer mais detalhes desta solução.

